

# PROVINICE

## SELF-CURING ACRYLIC RESIN

プロビナイス  
歯科用常温重合レジン

松風デンチャーライナー硬化促進材



医療用具承認番号 21400BZZ00451



医療用具承認番号 20900BZZ00452



簡単！  
短時間！  
キレイ

松風デンチャーライナー硬化促進材を使うと…

**短時間で、より表面を滑らかに研削・研磨することが可能です！！**

松風デンチャーライナー硬化促進材に浸漬すると、  
表面硬化性が大幅に向上します。  
これにより、短時間で滑らかな研磨面に仕上げることが可能となります。

\* 硬化促進材の硬化性を向上させる効果は、残留モノマー量を大幅に低減できることから確認されています。(右グラフ)

それを下記の方法にて検証してみました…。

<試験方法>


サッと溶かすだけ！

プロビナイス混合法にて制作した硬化物を  
「松風デンチャーライナー硬化促進材」を溶かしたお湯に浸漬 (50℃、5分)

硬化物をシリコンポイントPBにて100g荷重で30秒間研削

デュラポリッシュにて15秒間研磨 **A**、同じく45秒間研磨 **B**

**A**、**B** 2種の研磨後の表面粗さ (Ra) および光沢度 (Gs60°) を測定

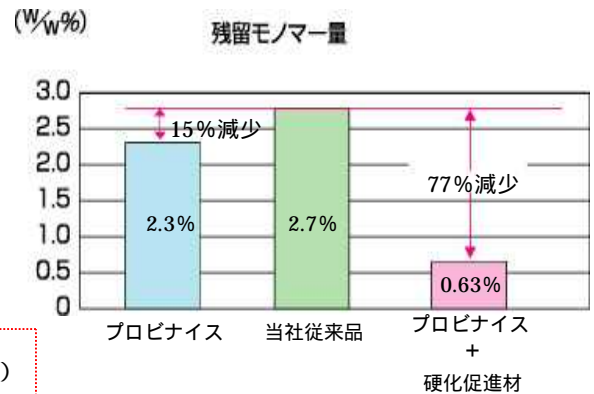

《結論》短時間で、より滑らかで光沢のある研削・研磨が可能です。

