

アイスペシャル C-III ファームウェアバージョンアップ手順


2017/11/9
株式会社 松風

本ドキュメントでは、アイスペシャル C-III のファームウェア(カメラ本体の制御用ソフトウェア)をバージョンアップする方法について解説します。

手順1 ファームウェアバージョンの確認

- ① カメラの電源を ON にしてください。
- ② 下記画面の左上に表示されるバージョン番号が最新版であるかどうかを確認します。

バージョンが表示されます。

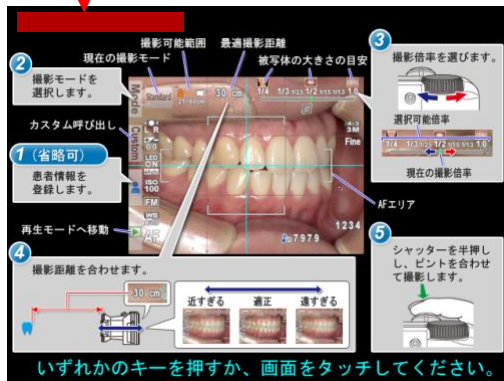

※現在の最新バージョンは松風ホームページ(<http://www.shofu.co.jp/eyespecialc3/firmware.html>)よりご確認ください。
※ファームウェアのバージョンが最新版の場合はバージョンアップの必要はありません。

- ③ カメラの電源を OFF にしてください。

手順2 松風ホームページからファームウェアのダウンロード

松風ホームページから最新ファームウェアをダウンロードしてください。


<http://www.shofu.co.jp/eyespecialc3/firmware.html>

手順3 バージョンアップ用 SD カードの準備

i 注意

- ・ Eye-Fi カード等の無線 LAN 内蔵型 SD カードはご使用にならないでください。
- ・ アイススペシャル C-III に同梱されていた SD カードの使用を推奨します。
- ・ SD カードの中にデータが残っている場合は、パソコンや他のメディアにコピーするなどして、データを別の場所に保存してください。

- ① SD カードの中に保存されているデータをすべて消去してください。
- ② 「手順2」でダウンロードした最新ファームウェア (UPDATE2.FRM) を SD カードのルートディレクトリ (マイコンピュータから SD カードのドライブを開いたすぐの場所) にコピーしてください。

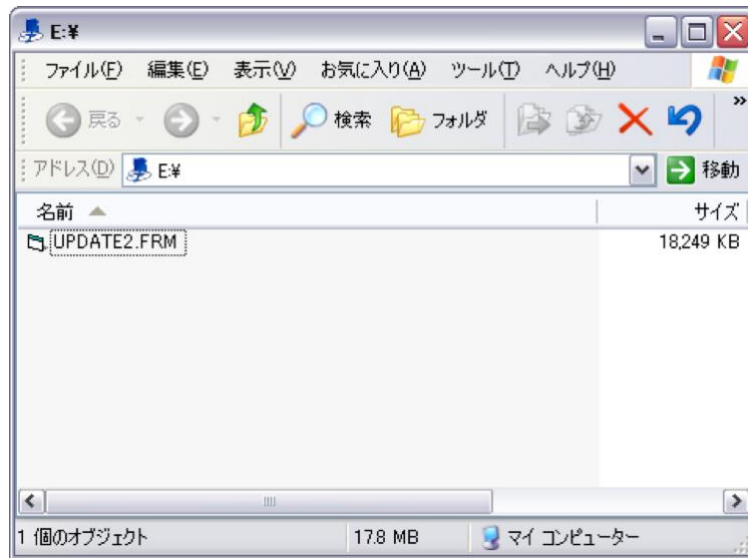

i 参考

- ・ SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み可能」側にしたままの状態ではバージョンアップを行うと、バージョンアップ完了後に自動的にファームウェア (UPDATE2.FRM) が削除されます。
- ・ 連続して複数のカメラをバージョンアップする場合は SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み禁止」側に切り替えてからお使いください。




手順4 バージョンアップ作業


i 注意

- ・ 新しいアルカリ乾電池、またはフル充電された充電式電池を使用してバージョンアップを行ってください。
- ・ バージョンアップ中は、以下のことは絶対に行わないでください
 - カメラの電源を OFF にしたり、電池を抜いたりしないでください。
 - SD カードを抜かないでください。
 - ボタン、ダイヤルなどの操作を行わないでください。
 - カメラに強い衝撃を与えないでください。


- ① 「手順3」で作成したバージョンアップ用 SD カードを、カメラの電源を切った状態でカードスロットに挿入してください。
- ② カメラの電源を ON にしてください。
- ③ 下記の画面が表示されたら、「OK」をタッチしてください。

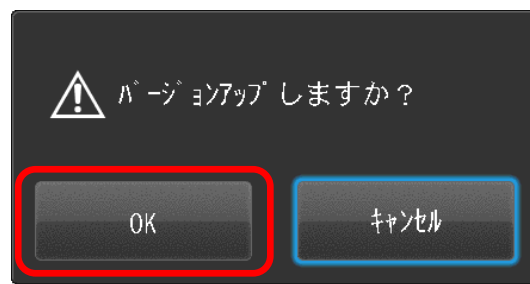

- ④ 下記の画面が表示されている間はしばらくお待ちください。

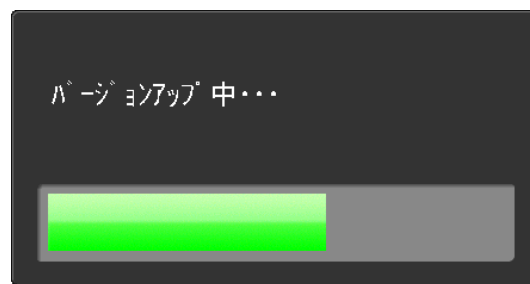

- ⑤ バージョンアップが完了すると下記のように表示されます。赤線部分のバージョンが最新版になっていることを確認してください。

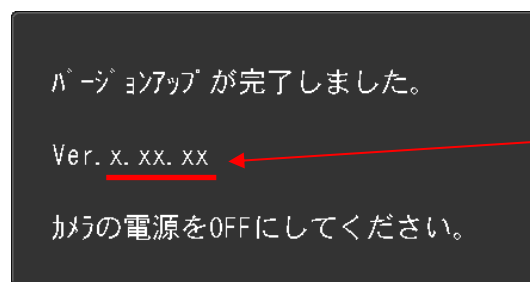

バージョンが表示
されます。

- ⑥ カメラの電源を OFF にしてください。
- ⑦ SD カードを取り出して、「手順1」に従いバージョンが最新版になっていることをもう一度確認してください。
- ⑧ 別のカメラをバージョンアップする場合は「手順4」を繰り返してください。

i 注意

- ・ SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み可能」側にしたままの状態バージョンアップを行った場合、バージョンアップ完了後に自動的に SD カード内のファームウェア (UPDATE2.FRM) が削除されていますので、続けてバージョンアップすることはできません。

手順5 バージョンアップ用 SD カードのフォーマット

SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み禁止」側に切り替えてバージョンアップを行った場合は、最後に下記の手順でファームウェア (UPDATE2.FRM) を削除してください。

【カメラで SD カードをフォーマットしてファームウェアを削除する方法】

- ① SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み可能」側に切り替えてください。




- ② SD カードをカメラに挿入してください。
- ③ 下記を参考に、SD カードをフォーマットしてください。

<http://www.shofu.co.jp/eyespecialc3/sdcardformat.html>

【パソコンでファームウェアを削除する方法】

- ① SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み可能」側にスライドさせてください。

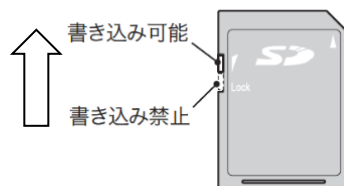

- ② SD カードをパソコンに挿入してください。必要に応じて SD カードリーダーをご使用ください。
- ③ 「手順3」で SD カードに保存した UPDATE2.FRM を削除してください。

以上