

歯科材料 9 歯科用研削材料
 一般医療機器 歯科用口腔内清掃キット 70927000

メルサージュ

【禁忌・禁止】

- メルサージュカップ（No. 15を除く）は、天然ゴムを使用しています。天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある歯科医療従事者の使用及び患者への使用は禁止すること。
- 本材及び本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

* 本材は、研磨ペースト、ブラシ、カップより構成される。

【構造】

1) 研磨ペースト

構成	性状・種類	成分
レギュラー	ペースト状 粗粒	パーミス、グリセリン、CMC、パラベン、モノフルオロリン酸ナトリウム、その他
ファイン	ペースト状 細粒	シリカ、グリセリン、CMC、パラベン、モノフルオロリン酸ナトリウム、その他

2) ブラシ、カップ

**【種類】

種類	種類	識別	作業部材質
ブラシ	CA用	白色リング (No. 2を除く)	ナイロン
	スクリュータイプ	—	
ブラシソフト	CA用	ピンク色リング	天然ゴム ※合成ゴム
	スクリュータイプ	二重ライン	
カップ	CA用	—	天然ゴム ※合成ゴム
	スクリュータイプ	—	

※合成ゴム：カップ No. 15

**【軸部】

種類	種類	軸部形式	軸部材質
ブラシ	CA用	軸部形式 1	真鍮 ニッケルメッキ
	スクリュータイプ	No. 1-72UNF	
ブラシソフト	CA用	軸部形式 1	
	スクリュータイプ	No. 1-72UNF	
カップ	CA用	軸部形式 1	真鍮
	スクリュータイプ	No. 1-72UNF	

**【形状】

形状及び形態番号						
形状						
種類	ブラシ	ブラシソフト	ブラシ	ブラシソフト	ブラシ	ブラシソフト
CA用	No. 1	No. S1	No. 2	No. S2	No. 3	No. S3
スクリュータイプ	No. 11	No. S11	—	—	No. 13	No. S13
形状						
CA用	カップ No. 1	カップ No. 2	カップ No. 3	—	—	—
スクリュータイプ	—	カップ No. 12	カップ No. 13	—	—	—
形状				—	—	—
CA用	カップ No. 4	—	—	—	—	—
スクリュータイプ	カップ No. 14	カップ No. 15	—	—	—	—

【使用目的、効能又は効果】

歯面の研磨、清掃に用いる。

**【操作方法又は使用方法等】

- ブラシ、カップを滅菌します。
- ブラシ、カップを歯科用電気エンジン、マイクロモーターまたは、スクリュータイプのプロフィーコントラハンドピースなどに装着します。
- 研磨ペーストをブラシまたはカップに適量塗布（又はペーパーパッドに取り出してから採得）し、2,000min⁻¹以下で歯面研磨を行います。
- ブラシ、カップを再使用する際は速やかに、清掃液、消毒剤を用いて、付着物を洗浄除去した後、滅菌を行います。
滅菌方法：EOG又は各種薬液による滅菌を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ハンドピースメーカーの指示に従って、シャックを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 使用前に予備回転を行い、振れないことを確認すること。
- 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがあるので、2,000min⁻¹以下で使用すること。
- ペーストは乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。
- ペーストは液成分が分離する可能性があります、品質には問題ありません。
- スクリュータイプのブラシ及びカップは、モーターを左（逆）回転させるとハンドピースから外れるので、必ず右（正）回転で使用すること。
- オートクレーブ、ケミクレーブ又は乾熱滅菌は避けること。
- ブラシについては、プラズマ滅菌は避けること。
- EOG又は各種薬液による滅菌については、各機器メーカーもしくは各薬液メーカーの指示に従って行うこと。
- 清掃液、消毒剤については、各メーカーの指示に従って使用すること。

【使用上の注意】

- 使用注意
 - ①指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度を越えて使用しないこと。
 - ②塩素系薬剤は使用しないこと。
 - ③変形、キレツ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
 - ④本材を使用して研磨する際には、目の損傷を防ぐために術者及び患者は保護眼鏡等を使用すること。
 - ⑤本材は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑥本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 重要な基本的注意
 - ①天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。この様な症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談するなど適切な措置を施すこと。
 - ②本材の使用により、かゆみ、蕁麻疹などのアレルギー性症状が現れた患者には使用を中止し、医師に相談するなど適切な処置を施すこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・高温・直射日光を避け、常温・常湿で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【包装】**

*** [単品包装]**

- 1) ペースト 40g : レギュラー/ファイン
- 2) カップ 36本 : CA用 No. 1、2、3、4
スクリータイプ No. 12、13、14、15
- 3) ブラシ 36本 : CA用 No. 1、2、3
スクリータイプ No. 11、13

- **** 4) ブラシソフト 36本 : CA用 No. S1、S2、S3
***** スクリータイプ No. S11、S13

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112

製造業者 ADVANCED HEALTHCARE LTD.
アドバンスド ヘルスケア
国名 イギリス

製造業者 株式会社 昭研
住所 京都市伏見区淀生津町 641-1