



義歯床用短期弾性裏装材

松風ティッシュコンディショナーⅡ ソフト

TISSUE TREATMENT
TISSUE
CONDITIONER Ⅱ
SOFT

CGⅡ



ソフトタイプが新登場！

SHOFU INC.

松風ティッシュコンディショナーII に

ティッシュコンディショナーIIの使いやすさはそのままに、
性状をやわらかくし、“粘膜調整”や“短時間の機能印象”に適した設計にしました。


粘膜調整

SOFT

だから

患者さまにやさしい

やわらかさが持続するため咬合圧を緩和し、患者さまの負担を軽減します。また、装着感も良好です。

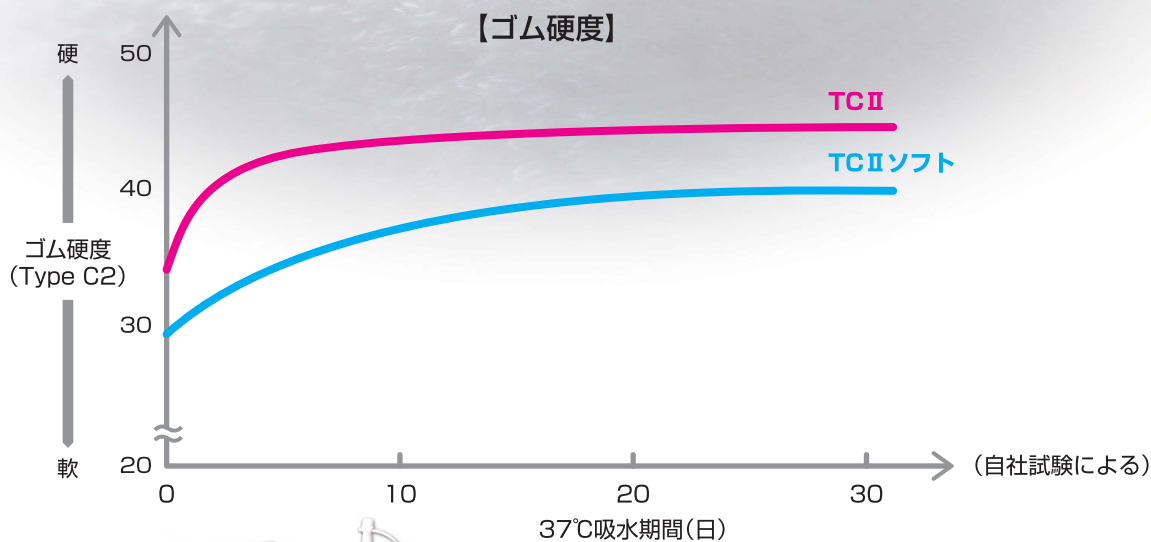

※推奨最長使用期間は2週間です。

ティッシュコンディショナーIIの使いやすさはそのまま継承

● 盛り上げに適した操作感

粉液のなじみが良く、スムーズに混和でき、
義歯床粘膜面の盛り上げに適したペースト性状が
得られます。

● 色調はホワイト、ピンクを用意

義歯床粘膜面の状態が判別しやすい「ホワイト」、
審美面で患者さまの要望に対応した「ピンク」の
2色をラインナップしています。




● 分離材の使用で剥がしやすい

別売りのプライマー(分離材)をご使用いただくことで、粘膜調整後、義歯
床から剥がしやすくなります。

※義歯床辺縁部には塗布しないでください。



プライマー未使用

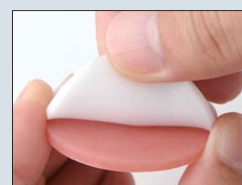

プライマー使用



ソフトタイプが新登場!




機能印象

SOFT だから

短時間の印象でも粘膜面がキレイに採れる!

特に即日の加圧印象(咬座印象)に効果的です。

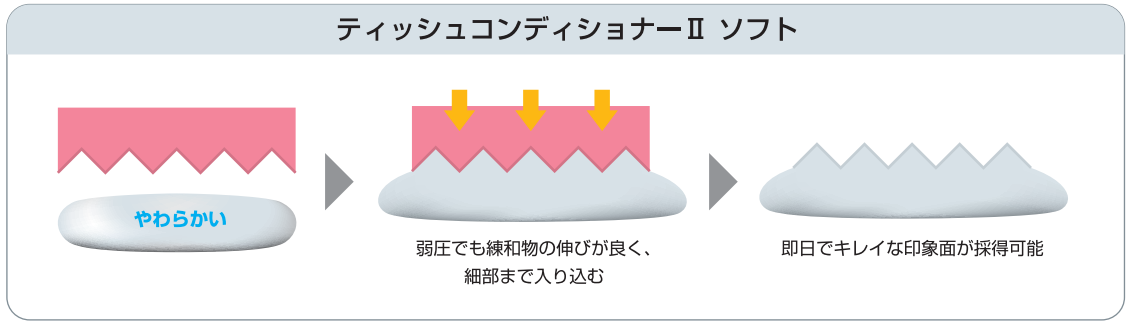

写真提供
アルプス歯科医院
向井 道夫 先生

練和物が粘膜面全体に均一に広がっており、
辺縁部の印象も良好

【ノーマルタイプ(従来品)とソフトタイプの2種類のラインナップ】

ソフトタイプの発売により、松風のティッシュコンディショナーは2種類の性状からお選びいただけるようになりました。

ティッシュコンディショナーII ソフト	ティッシュコンディショナーII
粘膜調整	粘膜調整
機能印象	機能印象
小さい印象圧でも練和物が広がりやすく、その後、適度な弾性が得られるため、即日の加圧印象に適しています。	時間をかけてゆっくりと変形するため、採得に時間のかかる印象に適しています。

※機能印象の場合、混和開始から1時間後に石こうを注ぐことができます。

包装・価格



■販売名・一般名称

販売名	一般名称	承認・認証・届出番号
松風ティッシュコンディショナーII ソフト	義歯床用短期弾性裏装材	管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00078000
松風ティッシュコンディショナープライマー	歯科用分離材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000227

松風ティッシュコンディショナーII ソフト 1-1セット……

【内容】

粉 120g、液 100mL、粉量計、スポイト、混和器、スパチュラ、ステップカード 各1

【色調】2色(ホワイト、ピンク)

※液はホワイト、ピンク共通です。

【単品販売】

粉 120g(粉量計付)

液 100mL(スポイト付)

色調:2色(ホワイト、ピンク)

【別売品】

分離材

松風ティッシュコンディショナー

プライマー 7mL(筆付)

関連商品

筋圧形成印象や、長期間の粘膜調整が必要な症例に

松風ティッシュコンディショナーII
1-1セット



【内容】粉120g、液100mL、粉量計、スポイト、混和器、
スパチュラ、ステップカード 各1

【色調】2色(ホワイト、ピンク)

※液はホワイト、ピンク共通です。

ティッシュコンディショナーの調整に

松風技工用カーバイドバー
キャプチャーカーバ HP

軟性樹脂用カーバイドバー



【形態・包装・価格】


CC7 1本

CC8 1本

CC21 1本

〈最高許容回転速度〉30,000min⁻¹

〈推奨回転速度〉3,000~5,000min⁻¹

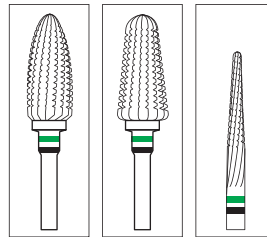

CC7

CC8

CC21

リライニングに

松風デンチャーライナー
義歯床用硬質裏装材



【包装・価格】

1-1-セット

【内容】

粉80g、液50mL、接着材 16mL、
硬化促進材50包(1g/1包)、粉量計、
スポイト、スパチュラ、混和器、粉用ノズル、筆 各1

カタログに記載の価格は2016年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

1605JEJSI