

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 70744000

松風技工用カーバイドバー

** 【形状・構造及び原理等】

[構造]

- ** 1) 作業部：タングステンカーバイド
アジャストカーバPBのみ表面コーティング (TiAlN)
- 2) 軸部：タングステンカーバイド又はステンレス鋼
軸部形式2：HP用

【使用目的又は効果】

レジン床やコバルトクロム合金、石膏模型等の切削に用いる器具である。

* 【使用方法等】

本材を歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイクロモーター及び高速レーズ等に装着して通法により使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 作業部が大きい形状のため、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 発熱を避け、作業部の破損に注意しながら使用すること。
- 5) マイティカーバは、作業部が細く、長いので破折しやすいため、できるだけ軽いタッチで破折に注意しながら使用すること。また、先端が尖っており、刃も鋭利なため、取扱には充分注意すること。特にハンドピースへの装着時に指の突き刺しや、作業部の破折に注意すること。
- * 6) スプリントカーバ SP2 の作業部はドリル形状を有し、細長く、折れやすいためできるだけ軽いタッチで破折に注意しながら使用すること。特に金属に用いる場合は、強い負荷や無理な角度で切削しないこと。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
指定 (製品の被包に記載) の最高許容回転速度を越えて使用しないこと。
変形、振れ、損傷 (錆、表面キズ、曲がり、汚損) などのある本材は使用しないこと。
本材を使用して研削する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
目の損傷を防ぐため、保護眼鏡を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧 (物理的負荷) 及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112