

歯科材料9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

## セラマスター

### 【形状・構造及び原理等】

#### [構造]

- 1) 作業部：ダイヤモンド粒子を合成ゴムで結合した軸付研磨材。
- 2) 軸部：ステンレス鋼  
軸部形式2：HP用

#### [種類]

2種

種類	作業部色調	用途
セラマスター コース	青色	中仕上げ
セラマスター	淡灰色	研磨仕上げ

### 【使用目的又は効果】

陶材、歯冠用硬質レジン、硬質レジン歯、コンポジットレジン、  
メタルの形態修整などの研磨に用いる。

### 【使用方法等】

#### [使用方法]

本材を歯科用電動式ハンドピース、歯科用電気エンジン、マイク  
ロモーター及び高速レーズ等に装着して通法により使用する。

#### [使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥  
まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部が大きい形状のため、折れたり曲がったりすることがあ  
るので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- 4) 研磨時の摩擦熱によりゴムが劣化することがあるので、過度  
の加圧や回転速度での連続的な使用は避けること。

### \*\*【使用上の注意】

#### [重要な基本的注意]

- \*\* 1) 指定の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

最高許容回転速度
20,000min <sup>-1</sup>

- 2) 変形、キレツ、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあ  
るものは使用しないこと。
- 3) 本材を使用して研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が  
認可した防塵マスク等を使用すること。
- 4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### [保管方法]

- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的  
負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理す  
ること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- \* 製造販売業者 株式会社 松風プロダクツ京都  
\* 住所 〒613-0022  
京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1  
\* 電話番号 0774-41-1321

- 販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112