

歯科材料07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス (コード: 16189000)

松風ディスク WAX ソフト

【形状・構造等及び原理等】

【形状・種類】

種類	サイズ	色調
ソフト	φ98×T20mm	灰色
	φ98×T14mm	灰色

【成分】

低分子量ポリエチレン系樹脂、パラフィンワックス、着色染料

【原理】

歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニットにて切削加工を行い、歯科鑄造物のろう型に用いる。

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスをいう。

【使用方法等】

【本材に使用する機械】

歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット

【使用方法】

CAD/CAM 加工機などを用いて加工を行い、必要に応じマージンの調整を行い、通法に従いスプルーを植立し、埋没、鑄造を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 再熔解して使用しないこと。
- 2) 過度の加熱や、加熱したままでの放置はしないこと。
- 3) 石こう系埋没材を使用する場合、マージン部にバリができることがある。その場合、急速加熱を避けるか、マージンをワックスで調整すること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本材の切削粉が目に入らない様に注意すること。万一目に入ったときは、直ぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 2) 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 3) 本材を焼却する際は局所排気装置や換気扇などを設け、焼却による煙及び蒸気を吸入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 本材の使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 3) 本材は、火気厳禁の場所に保管し、ひとつの保管場所に多量に保管しないこと。
- 4) 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本材の使用期限※は、包装に記載のとおり。

※ (例) 20YY-MM-DD は

使用期限 20YY年MM月DD日を示す)

[記載の使用期限は自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 サンエス石膏株式会社
住所 〒564-0063
大阪府吹田市江坂町 1-23-101
大同生命江坂ビル 13F
電話番号 0120-351440
HP: <http://www.san-esugypsum.co.jp>

販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都府京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112