



CAD/CAM用ハイブリッドレジンブロック **健保適用**※

松風ブロック HC 2レイヤー

S-WAVE

※歯科用CAD/CAM装置を用いて、小白歯及び大白歯（大白歯は歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に限る）に対して歯冠補綴装置（全部冠に限る）を設計・製作し、装着した場合。

松風ブロック HC 2レイヤー

A1
増色



実際の製品には製品名、色調、サイズの印字があります。

自然感、さらにアップ

象牙質とエナメル質の2層構造をもつブロックで
天然歯のような自然感を創造します。

従来品 単層 (A3.5-LT)



2レイヤー (A3.5-2L)




SHOFU INC.

2レイヤーで 象牙質とエナメル質の 色調を再現




層比率

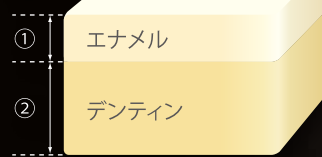


物性

松風ブロックHCはフィラーを高密度充填させたコンポジットレジンを加圧・加熱重合したハイブリッドレジンブロックです。2レイヤー、単層(従来品)ともに成分組成、物性は同じで、高レベルかつ安定した補綴装置の製作が行えます。

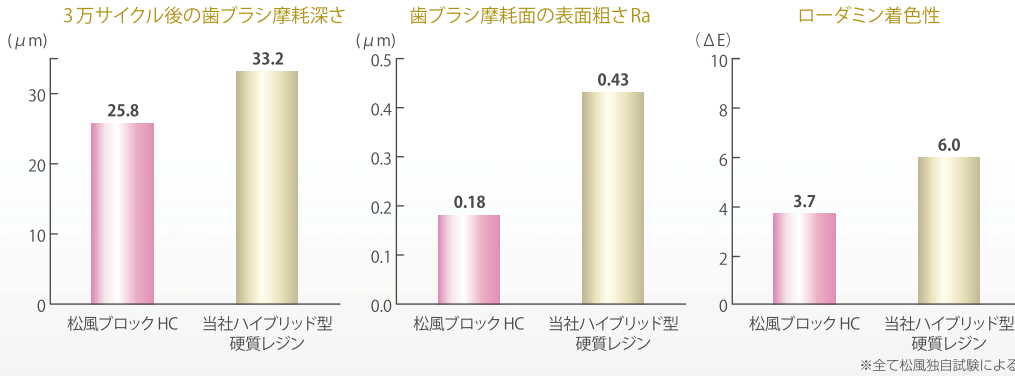


ご注意

製品名、色調、サイズの印字面がデンティン色側です。

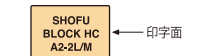

装着方向と補綴装置の設計方向をご確認のうえご使用ください。

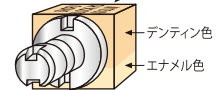

	松風ブロック HC	当社ハイブリッド型硬質レジン
曲げ強さ (MPa)	191	146
圧縮強さ (MPa)	430	354
ビッカース硬さ (HV0.2)	66	74

※試験方法はJIS T 6517:1998「歯冠用硬質レジン」第3種 光重合型に準ずる(松風ブロック HCの曲げ強さのみ、類似の松風独自試験による)

包装



松風ブロック HC (5個入)

2レイヤー(2層)

Sサイズ Mサイズ


〈色調〉4色 : A1-2L、A2-2L、A3-2L、A3.5-2L ※2Lは2Layer(2層)を表しています。

単層(従来品)

Sサイズ Mサイズ

〈色調〉LT 6色 : W2-LT、A1-LT、A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、B3-LT
HT 3色 : A1-HT、A2-HT、A3-HT、エナメル 2色 : 59、OC

【松風ブロック HC寸法】

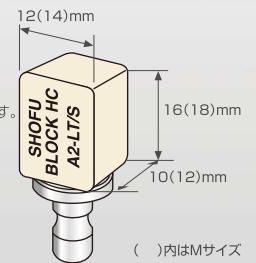

()内はMサイズ

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック HC	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00070000

関連製品



松風ブロック HC ハード

〈色調〉4色 A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT

Sサイズ(5個入)

Mサイズ(5個入)

Lサイズ(1個入)

取扱い店

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

<http://www.shofu.co.jp>

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

1711JEJSI