



CAD/CAM用ハイブリッドレジンディスク
松風ディスク HC

健保適用外

S-WAVE

SHOFU DISK

HC



前歯ジャケット冠

削り出し後、ライトアートのステイニングを行い、セラマージュを築盛

インレー

削り出し後、裂溝部にライトアートのステイニングを行い、レジンペーストにて仕上げ


SHOFU DISK HC

松風ディスク HCは加圧・加熱重合により製造されたCAD/CAM切削加工用のハイブリッドレジンディスクです。松風ブロック HCと同組成で、耐着色性、耐摩耗性、研磨性にすぐれています。また天然歯類似の光拡散性を備え、高い審美性を実現します。

SHOFU INC.

すぐれた耐歯ブラシ摩耗性、耐着色性

松風ディスク HCは、耐歯ブラシ摩耗性にすぐれています。摩耗量が少ない上、摩耗面の表面粗さも小さいため滑沢性を維持することができます。また、耐着色性にもすぐれており、長期的に審美性を維持します。

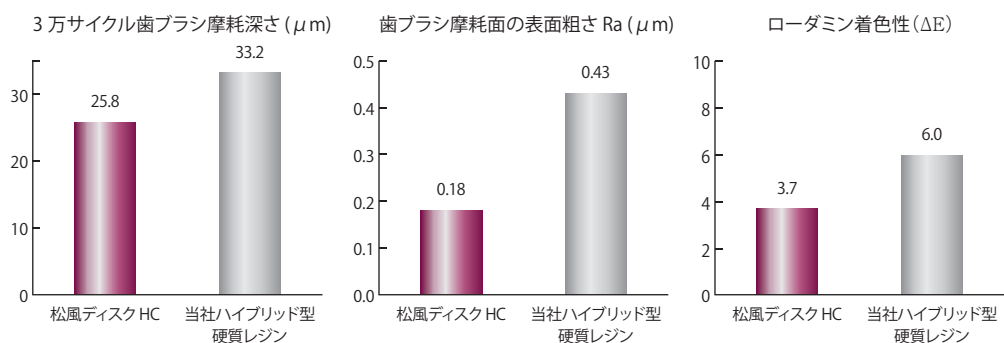

天然歯のような審美性

蛍光性

松風ディスク HCは天然歯に近い蛍光性を有しています。



写真右は松風ブロック HC

色調について

- LT 一般的な硬質レジン材料のボディ色類似的の透明性に設計されています。白歯部クラウンの作製に適しています。
- HT 透明性の高いボディ色です。インレー、前歯部クラウンの作製に適しています。
- エナメル 59はエナメル部の再現が主となる症例に適しています。

	A2	A3	A3.5	59
LT				
HT				
エナメル				

印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

物性

	松風ディスク HC	当社ハイブリッド型硬質レジン
曲げ強さ (MPa)	191	146
圧縮強さ (MPa)	430	354
ビッカース硬度 (Hv0.2)	66	74

※試験方法はJIS T 6517:2011「歯冠用硬質レジン」に準ずる(松風ディスク HCの曲げ強さと圧縮強さは松風独自試験による)

〈代表値〉

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク HC	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 225AKBZX00167000

包装・価格



松風ディスク HC

【サイズ】14mm(φ)98mm)

【色調】

LT系 3色：A2-LT、A3-LT、A3.5-LT
HT系 2色：A2-HT、A3-HT
エナメル 1色：59

関連製品



レジン材料用着色材
ライトアート
フルセット
セット



レジン材料用着色材
ライトアート
カラーペースト
1mL
色調 15色



表面滑沢硬化材
レジングレース
ジェルセット
セット



歯冠用硬質レジン(ハイブリッドタイプ)
セラマージュ
セット・単品各種

価格は2016年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取り扱い店