

赤みのある天然歯の色調を
容易に再現可能な
セミシッタージルコニアディスク



幅広い症例に対応できるピンク系の3色をラインナップ

ピーチホワイト、ピーチライト、ピーチミディアムの3色を使い分けることによって、フルカウントウア、コーピング・フレームのいずれにおいても、天然歯により近い色調を容易に再現することが可能です。また、着色済みのジルコニア粉末を原材料に使用しているため、陶材焼成後の色調の変化が起りにくくなっており、弊社陶材「ヴィンテージ ZR」との相性も良好です。

色調名	ピーチホワイト	ピーチライト	ピーチミディアム
備考	ホワイトニング色などの薄い色調を再現可能	ステイニングテクニックによりA1～A2を再現可能	A2～A3の色調を再現可能

高い透過性と適合性

高い透過性を有するジルコニア粉末を高圧で成形しているため、本焼結時の変形が少なく、均一に収縮します。そのため、ロングスパンブリッジやインプラント上部構造体などの症例においても高い適合性を示します。

推奨焼結スケジュール

開始温度(°C)	昇温速度(°C/分)	焼成温度(°C)	係留時間(分)	降温
室温	5	1450	120	放冷

物性

曲げ強さ (MPa)	熱膨張係数 (25-500°C)($\times 10^{-6}K^{-1}$)	密度 (g/cm ³)	コントラスト比(1.0mm) ピーチホワイト
1200	10.9	6.06	0.79

※全て松風独自試験による

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ディスク ZR-SS カラード	歯科切削加工用セラミックス	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00132A01

包装・価格



松風ディスク ZR-SS カラード

サイズ：3種 / φ98×厚み14、18、26mm
色調：3色 / ピーチホワイト、ピーチライト、
ピーチミディアム

このカタログに記載の価格は2014年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店