

ご使用に際しては、記載の
注意事項をよく読んでください。

メルサーチュPCペレット

歯垢・歯石染色材

【種類・用途等】

種類	用途	香味	成分
レッド*	歯垢染色用	ストロベリー	水、グリセリン、甘味料、着色材、キシリトール、防腐材、界面活性材、ストロベリー香料
ブルー	歯垢・歯石染色用	ミント	水、グリセリン、甘味料、着色材、キシリトール、防腐材、界面活性材、スペアミント香料

【特長】

- 1) 染色液をスポンジに適量しみこませてあり、歯面に塗布した際に均等に拡散することで、簡単に染色することができます。
- 2) レッドは歯垢判別用で、歯垢の厚いもの、薄いものの判別ができます。
- 3) ブルーは歯垢・歯石判別用で、歯垢は赤く、歯石は赤みがかった青色に染色されます。
- 4) レッドはストロベリー、ブルーはミントの香味を付与しています。

【注意事項】

- 1) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと。
- 2) 本材の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 目に入らないように注意し、万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。
- 4) 本材は説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- 5) 誤って衣服についた場合は直ちに水洗するか、家庭用漂白剤で洗浄すること。
- 6) 使用済みのスポンジは再使用しないこと。

【使用方法】

- 1) スポンジ1個をピンセット等ではさみ、歯面の染色させたい部分に軽く押し当てて塗布します。
- 2) うがいをしたのち染色部を確認します。

【使用例】

- 1) 歯ブラシによるブラッシング指導前後の歯垢の確認
- 2) PMTCや歯石除去による清掃状況の確認

【包装】 レッド、ブルー：スponジ100個入



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

<http://www.shofu.co.jp>

本社●〒605-0983京都市東山区福稻上高松町11・TEL(075)561-1112(代)