

医療用具承認番号 20200BZY01050

ピエゾンマスター400ボトルセット上の注意



ボトルは指先で軽く持ち、ボトルマウントに水平にセットし、軽く回してください。

ボトル回転中に抵抗を感じたら、無理に回さないで、少し元に戻し、水平を確認の上、再度回し込んでください。



B、Cのように握るとボトルがグラつき、ボトルマウントに水平にセットできず、無理な力が加わりボトルディスクが破損する原因になりますので、十分ご注意くださいようお願いいたします。



注意！

ネジ込み式ではありませんので、回しすぎるとボトルディスクに負担がかかり、破損する恐れがあります。