



メルサージュプロを 快適にお使いいただくために.





この度はメルサージュプロをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 この器械はきっと患者様への快適な診療にお役立ていただけるものと思います。 歯面研磨ペーストは非常に器械内部に残りやすい性状ですので こまめなお掃除をお願いいたします。

手順は簡単!日頃のルーティンに入れてください。



① シャンクとヘッドを 取り外します。



② ナイロンブラシ等で内部までよく 洗います。 金属製の物は使用しないで下さい。



ワッテ等で拭きます。



④ シャンクとヘッドを 取り付けます。



⑤ パナスプレープラスに付属のス プレーノズルを 10 回転程ねじ込んで 装着します。



⑥ しっかり固定し、パナスプレープラスを モータの接続部に差込2~3秒注油します。





⑨ オートクレーブで滅菌します。

135℃を超える乾燥は 省略してください。




⑦ 2~3秒ゆっくり数えましょう! 汚れがひどいと写真のようになります。

※ しっかり回路をキレイにしないとオート クレープ後にペーストが固まってしまいます。 汚れが重なると、ヘッドが回転しなくなり、 修理になります。(保証対象外です。)



⑧ 余分なオイルを拭き取り 清潔なところに立ててオイル を抜きます。

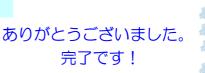



パナスプレープラス 定価:4,500円