


# はじめにお読みください

本器に関する最新の情報は、  
当社ホームページ(www.shofu.co.jp/eyespecialc4/)をご参照ください。

## 内容物の確認

ご購入いただいた「アイスペシャルC-IV」のパッケージの中身は以下のとおりです。内容をご確認のうえ、不備な点がございましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。

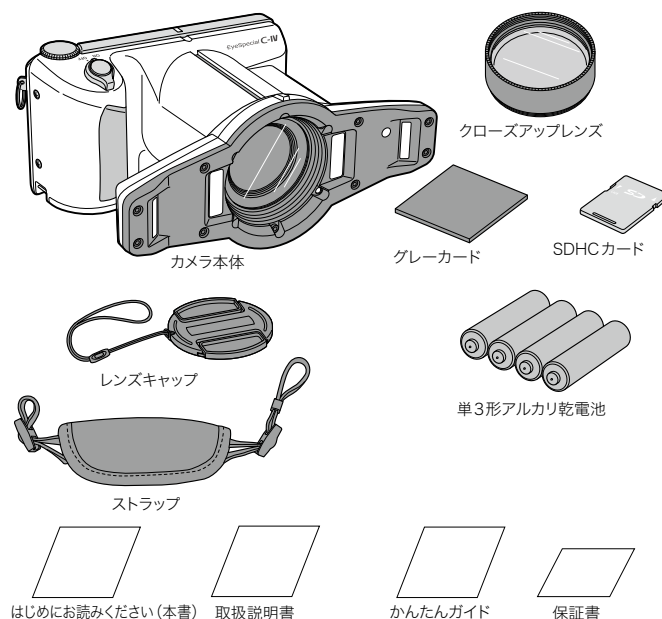

## 必要に応じてご用意いただく市販品

本器には以下のものをお使いいただけます。必要に応じて別途お買い求めください。

- ・単3形電池(アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池)
- ・画像記録媒体 SDカード/SDHCカード/SDXCカード  
※お使いのパソコンにSDカードスロットが無い場合、SDカードリーダーを別途お買い求めください。
- ・HDMIケーブル(HDMI(Type A) ↔ Micro HDMI(Type D))  
※推奨品(モニター側端子形状がHDMI(Type A)のとき):  
ELECOM社: CAC-HD14EU15BK

## 安全にお使いいただくために

本器を安全にお使いいただくために、以下の事項を必ず守ってください。

### 【警告・注意などの記載について】

本書および取扱説明書では、安全に関する重要な注意事項を「警告」、「注意」に分類して説明しています。必ず各内容をよくお読みのうえ、厳守してください。各警告表示の内容は次のように定義されています。

	<b>警告</b> この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを表しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、使用者が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性があることを表しています。

### 【その他の表示について】

「警告」や「注意」表示以外については、以下のとおりです。

**注記** この表示を無視して誤った取り扱いを行うと、機器が正常に作動しないまたは故障する可能性があることを表しています。

**参考** この表示は、使用時の作業をわかりやすくするための補足説明を表しています。

## ご使用について

### ⚠ 警告

- 万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、すみやかに電池を抜き、使用を中止すること。電池も高温になっている場合があるので、火傷には十分注意すること。  
使用を続けると感電、火傷、火災の原因となります。お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。
- 落下や損傷により内部が露出した場合は、内部に触れないように電池を抜き、使用を中止すること。  
フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も使用を続けると、感電、火傷、火災の原因となります。お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。
- 製品および付属品を、幼児・子供の手の届く範囲に放置しないこと。  
幼児・子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意をはらってください。けがや事故の原因となります。
- 分解、修理、改造は絶対に行わないこと。  
内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。また、異常動作によるけがや感電、火災の原因となります。修理や分解が必要な場合は、お買い求めの販売店にご依頼ください。
- フラッシュを人の目の近くで発光させないこと。人の目の近くで発光させる場合は目を保護すること。  
目の近くでフラッシュを発光させると、視力障害を起こす原因となります。
- 内部に異物(金属、水、液体、粉末など)が入った場合はすみやかに電池を取り出し使用を中止すること。  
使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買い求めの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- 鞆の中、箱の中、引き出しの中のような狭い場所に入れて使用しないこと。  
狭い場所で使用すると放熱不良となり、発熱、発火の原因となります。
- 洗面台、流し台、水槽の近くなど、水のかかりやすい場所では使用しないこと。また、カメラの上に液体の入った物を置かないこと。  
火災や感電の原因となります。
- 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製品を使用しないこと。  
爆発や火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 長時間使用する場合は、皮膚に触れたままにしないこと。  
本体の温度が高くなり、低温火傷の原因になることがあります。
- 長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないこと。  
電池やカードが熱くなっているため火傷の原因となります。電源をOFFにして、温度が下がるまでしばらくお待ちください。
- 発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないこと。  
発光時に発光部が熱くなり、火傷の原因となります。
- 液晶モニターを強く押ししたり、衝撃を与えたりしないこと。  
液晶モニターが割れるとけがの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の液体に触れてしまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流した後医師にご相談ください。
- 製品および付属品を身体などに強くぶつけないこと。  
けがの原因となります。
- ハンドストラップを必ず使用すること。  
落下によるけがの原因となります。
- カメラに取り付けた付属品やストラップにゆるみ、がたつき、ひものほつれがないか、定期的に点検すること。  
けがの原因となります。

## お手入れと保管について

### ⚠ 警告

- 幼児の口に入るような小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管すること。  
幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- お手入れの際にベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないこと。  
爆発や火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所、火などの過度の熱にさらされる場所、多湿になる場所、腐食性のガスが発生する場所、温度変化の激しい場所、埃や油分の多い場所、静電気が多く発生する場所、強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所での使用や保管（電池も含む）は避けること。  
故障、外装の変形、電池の液漏れ、発熱、破裂による火災、火傷、けがの原因となります。

## 電池について

### ⚠ 警告

#### 【爆発のリスク】

- 指定の電池以外のものを使用しないこと。また、外傷、変形の著しい電池は使用しないこと。  
指定の電池以外に交換した場合、また、外傷、変形の著しい電池を使用した場合、爆発、感電、火災の原因となります。
- 電池を火中や高温の炉へ廃棄したり、機械的な押しつぶし・切断をしたりしないこと。  
爆発、感電、火災の原因となります。

#### 【爆発・液漏れのリスク】

- 電池を過度の高温又は低温環境で使用・保管・輸送しないこと。  
爆発、液漏れ、感電、火災の原因となります。
- 電池を標高が高く気圧が低い環境で使用・保管・輸送しないこと。  
爆発、液漏れ、感電、火災の原因となります。
- 電池を過度の高温環境に放置しないこと。  
爆発、可燃性の液体もしくはガスの漏出、液漏れ、感電、火災の原因となります。
- 電池を過度の気圧が低い環境に放置しないこと。  
爆発、可燃性の液体もしくはガスの漏出、液漏れ、感電、火災の原因となります。



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

本社 ● 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11 ● TEL(075)561-1112(代)