

無線 LAN 接続の設定方法は 2 通りあります。いずれかの手順に従って設定してください。

本機の簡単設定 (WPS) を使って設定する方法

WPS とは、無線 LAN 機器と接続先(無線 LAN ルーター)の通信設定をボタン 1 つで簡単に行うことができる仕組みです。接続先(無線 LAN ルーター)が WPS に対応している必要があります。

1 簡単設定 (WPS) を選びます


設定画面から [Wi-Fi 設定] を選びます。
[MENU] → [F4] → [タブ 5] → [Wi-Fi 設定]

Wi-Fi 設定で Wi-Fi を [ON] にします。

Wi-Fi 設定の画面から [接続先登録] を選びます。

新たに接続先を登録しますかと表示されたら [OK] を押します。




登録方法の画面から [簡単設定 (WPS)] を選びます。

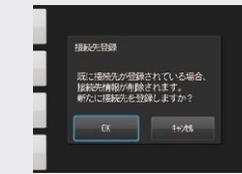

2-A WPS (プッシュボタン方式) の場合

[WPS(プッシュボタン方式)] を選びます。

接続先(※)の WPS ボタンを押し、2 分以内に [OK] を押します。

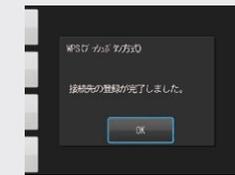
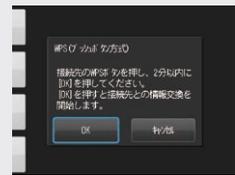
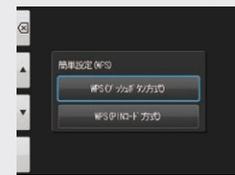


※接続先(無線 LAN ルーター / アクセスポイント)の WPS 機能については、接続先の取扱説明書をご覧ください。

2-B WPS (PIN コード方式) の場合

[WPS (PIN コード方式)] を選びます。

表示された PIN コードを接続先(※)に入力し、2 分以内に [OK] を押します。

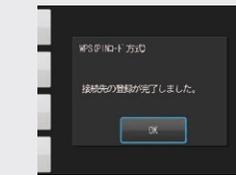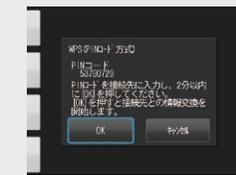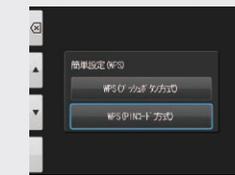

※PIN コードの入力方法は接続先(無線 LAN ルーター / アクセスポイント)の取扱説明書をご覧ください。

3 WLSDDMonitor に機器登録を行います

WLSDDMonitor を起動し、[設定] を選びます。

[新しいアイススペシャルを追加する] を選びます。



アイススペシャルの追加ウィザードで [次へ] を押します。

各チェックボックスの内容を確認後、チェックを入れて [次へ] を押します。

本機の MAC アドレスを入力し、[次へ] を押します。

[ルーターの WPS 機能を使用してアイススペシャルをネットワークに接続する] を選びます。

機器の説明を入力し、[完了] を押します。

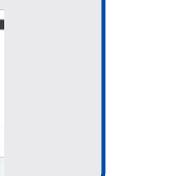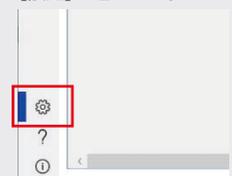

4 無線 LAN スイッチを ON にします

ホーム画面で接続したい機器の無線 LAN ON・OFF スイッチを [ON] にします。



設定完了

事前のご準備について

- 本機の無線 LAN (Wi-Fi) 機能を使って画像転送を行うには、別途アクセスポイントおよび受信用パソコンが必要です。対応 OS は受信用ソフトウェアのダウンロードページでご確認ください。
- 受信用ソフトウェア (WLSDDMonitor Ver.2.0 以上)、アイススペシャル専用の画像振り分けソフトウェア (松風シェアファイル Ver.3.0 以上) をパソコンにインストールしていただく必要があります。
- SD カード内に本機で撮影した画像以外のファイルが存在すると、無線 LAN (Wi-Fi) 機能を使った画像転送ができない場合があります。SD カードは必ず本機でフォーマットしてからご使用ください。
※ SD カードは本機専用としてご利用ください。
- 本機の無線 LAN (Wi-Fi) 機能を使用するには無線 LAN ルーターの DHCP 機能を ON にしていただく必要があります。DHCP 機能の設定は無線 LAN ルーターの取扱説明書をご確認いただくか、貴院のネットワーク管理者にご相談ください。

SD カードのフォーマット方法

SD カードを本機に挿入し、⇒ (MENU キー) ⇒ (F4 キー) ⇒ タブ 5 ⇒ [SD カードのフォーマット] を選択します。

注記 ・フォーマットを行うとプロテクトをかけた画像を含め、全ての画像データが消去されます。SD カード内に消したくないデータがある場合は事前にバックアップを取ってください。

WLSDDMonitor について

WLSDDMonitor は本機が無線 LAN 接続した状態で撮影を行うと、自動的に本ソフトウェアによってパソコンに画像が転送されます。転送された画像は松風シェアファイルにより患者さまごとのフォルダに振り分けられます。

ダウンロードや詳しい説明はコチラ www.shofu.co.jp/eyespecialc5/wlsdcard.html

松風シェアファイルについて

松風シェアファイルは本機で撮影した画像をパソコンに取り込む際、自動的にフォルダを振り分けられることができるソフトウェアです。

ダウンロードや詳しい説明はコチラ www.shofu.co.jp/surefile/

WLSMonitor で設定し、本器にインポートする方法

1 WLSMonitor で無線 LAN 接続設定を行います

WLSMonitor を起動し、設定を選びます。

[新しいアイススペシャルを追加する]を選びます。

アイススペシャルの追加ウィザードで[次へ]を押します。

各チェックボックスの内容を確認後、チェックを入れて[次へ]を押します。

本器の MAC アドレスを入力し、[次へ]を押します。

[本ウィザードを使用し〜]を選び、[次へ]を押します。

接続先の SSID を選択、ネットワークキーを入力し、[次へ]を押します。

機器の説明を入力し、[完了]を押します。

2 SD カードへの書き込みを行います

書き込みウィザードが表示されたら[次へ]を押します。

パソコンの SD カードスロットに SD カードを挿入し、[次へ]を押します。

SD カードが挿入されているドライブを選択し、[次へ]を押します。

設定用ファイルの書き込み開始画面が表示されたら [次へ]を押します。

書き込み完了後、[完了]を押します。

3 Wi-Fi を ON にします

本器に SD カードを挿入します。

本器の設定画面から [Wi-Fi 設定] を選びます。

Wi-Fi 設定を ON にします。

4 本器に設定をインポートします

Wi-Fi → [接続先登録] を選びます。

新たに接続先を登録しますか? と表示されたら [OK] を押します。

[SD カードから設定の読み込み] を選びます。

続く

4 本器に設定をインポートします (続き)

[設定ファイルの読み込みを開始しますか?]と表示されたら [OK] を押します。

[設定完了しました] と表示されたら [OK] を押します。


5 無線 LAN スイッチを ON にします

ホーム画面で接続したい機器の無線 LAN ON・OFF スイッチを [ON] にします。

設定完了

液晶モニターの表示

本器に挿入している SD カードの状態および無線 LAN の電波状況に応じて液晶画面に表示されるアイコンが変わります。各アイコンの情報は以下の通りです。

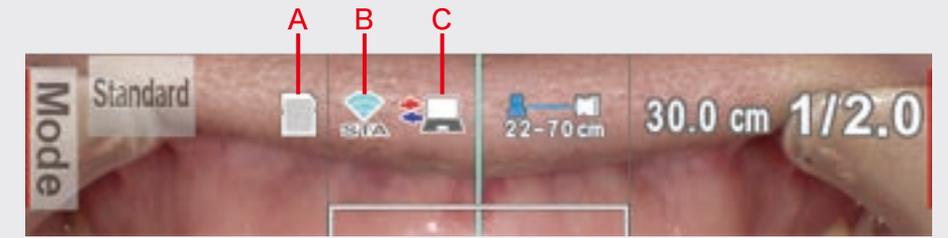

アイススペシャル C-V 撮影画面

A 挿入している SD カードの状態に応じて表示が変わります。

	アイススペシャル C-V の Wi-Fi 設定が OFF の場合に表示されます。
	SD カードにエラーがある場合に表示されます。
	SD カード内の画像が全て転送済みの場合に表示されます。
	SD カード内に未転送の画像がある場合に表示されます。
	SD カード内に未転送の画像があるか確認できない場合に表示されます。

B 無線 LAN の電波状況に応じて表示が変わります。

	無線 LAN 機能が OFF の場合に表示されます。
	無線 LAN 機能が ON かつアクセスポイントへ未接続の場合に表示されます。
	無線 LAN の電波強度が弱い場合に表示されます。
	無線 LAN の電波強度が中程度の場合に表示されます。
	無線 LAN の電波強度が強い場合に表示されます。

C 本器と WLSMonitor の間の通信状況に応じて表示が変わります。

	本器と WLSMonitor の間で通信が行われている場合に表示されます。表示されている間は SD カードを抜いたり、本器の電源を切らないようにしてください。
--	---