



歯科用電動式ハンドピース
NiTiプロ

安全なエンド治療をサポート

Smarter and Safer




SHOFU INC.

安全性の追求

アラーム機能とオートリバース機能で
ファイルの破折リスクを大幅に軽減


設定したトルク値に対して、2種類のアラーム音でファイルに対する
負荷状況を的確に伝えます。また、設定したトルク値に負荷が達する
とオートリバース機能が働きファイルの破折リスクを軽減し、治療の
安全性を高めます。

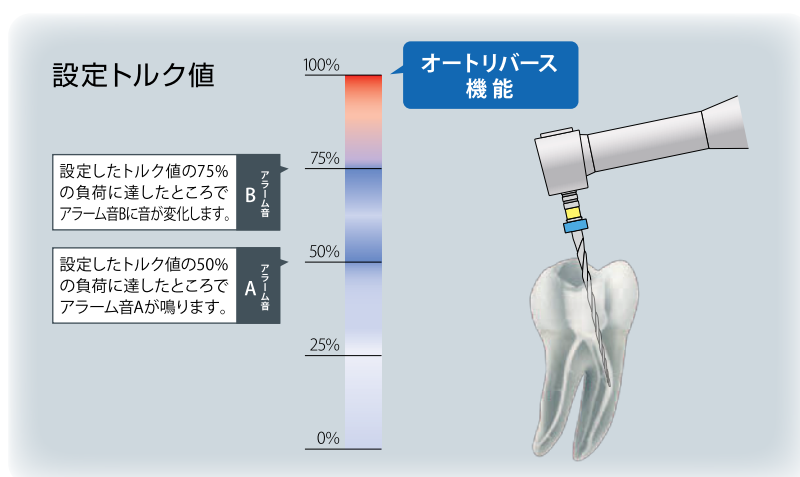


治療効率の追求

回転速度、トルク、ギヤ比、オートリバースモードの組み合わせを5パターンまでメモリーしてお使いいただけます。


プログラム設定パネル

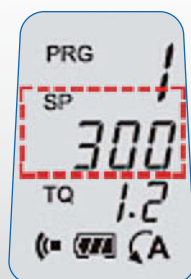

回転速度

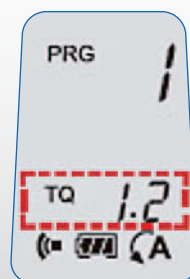

トルク

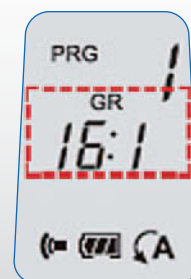

ギヤ比

直感的でスピーディーな 操作を実現


大きくフラットなボタン
ボタンが大きく操作性が向上します。

コードレスで快適な操作
コードがないので、
自由自在な操作が可能です。

見やすい液晶パネル
治療に必要な内容を一目で
確認できます。


可変できるヘッド

治療部位に応じてヘッドの向きを
6方向に変更できます。

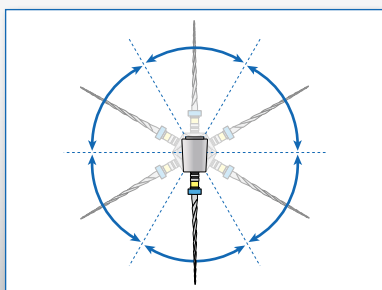

広がる視野

ミニヘッドとスリムなネックの
コントラアングルを採用することで、
広い視野を確保できます。

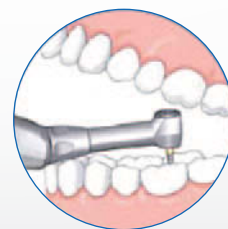

短時間で充電可能

1.5時間の急速充電が可能です。
また、無接点充電のため、接触不良がなく
確実な充電が可能です。
端子がないので、清掃しやすく衛生的です。



販売名・一般の名称

| 販売名 | 一般の名称 | 承認・認証・届出番号 |
|------------|--------------|---|
| エンドメイト TC2 | 歯科用電動式ハンドピース | 管理医療機器 医療機器認証番号 222ALBZX00018000 特定保守管理医療機器 |

包装

歯科用電動式ハンドピース
NiTiプロ (エンドメイト TC2)

【内容】

モーターハンドピース、
コントラングルヘッド (MP-Y SHO)、
1/16減速シャंक (F16R SHO)、
TC2用充電器、充電器用電源コード 各1



仕様

モーター

| | |
|---------|------------------------------|
| 定格電圧 | DC2.4V ±20% |
| 電源入力 | 0.3VA |
| 回転速度* | 2,000～9,000min ⁻¹ |
| 連続使用時間* | 約1.2時間 |

*電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

充電器

| | |
|------|--------------------|
| 定格電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 電源入力 | 12VA |
| 充電時間 | 約1.5時間 |

別売品

モーターハンドピース



NiTiファイル用
コントラングルヘッド
(MP-Y SHO)



NiTiファイル用 (ミニヘッド用)
コントラングルヘッド
(NML-Y)



※ラッチ式

1/16減速シャंक (F16R SHO)



根管長測定器接続用
(ロングシャंक用)
コントラングルヘッド
(MPA-Y)



根管長測定器接続用
(ショートシャंक用)
コントラングルヘッド
(MPAS-Y)



※シャंक長12mmまでのNiTiファイルに使用可

TC2用 充電器

充電器用電源コード

関連商品

手用ファイルに近い術式で使える電動式歯科用NiTiファイル
Mtwoファイル

【セット】


6本
種類:2種
Mtwo ファイルベーシックアソート 21mm、
Mtwo ファイルベーシックアソート 25mm
セット内容:右の表を参照してください。



写真はベーシックアソートです。

【単品】

6本
種類:24種

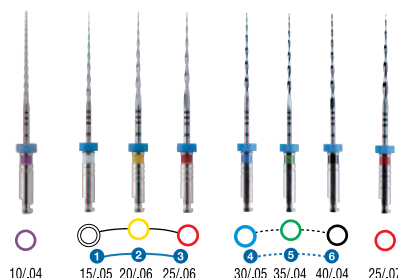

| 先端径 (ISO) | 刃部 | 針部 | テーパ | 先端径 (ISO) | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | | 010(#10) | 015(#15) | 020(#20) | 025(#25) | 030(#30) | 035(#35) | 040(#40) | |
| レギュラー (R) 16mmタイプ | 2種 21mm 25mm | | .04 | ● | ● | | | | | ● | ● |
| | | | .05 | | ● | | | ● | ▲ | | |
| | | | .06 | | | ● | ● | ● | ● | | |
| | | | .07 | | | | | ● | ■ | | |
| ロング (L) 21mmタイプ | 2種 25mm 31mm | | .04 | ● | | | | | | | |
| | | | .05 | | ● | | | | | | |
| | | | .06 | | | ● | ● | | | | |

●印はベーシックアソートに含まれるファイルです。
◆は刃部長さ=15mm、▲=14mm、■=13.5mm となります。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店