



歯科咬合スプリント用材料

キャプチャーシート ハード

# より多くの成型器に対応する 硬質シート

オーラルアプライアンス  
松風のOAシステムにラインナップ



## 透明なPET(ポリエチレンテレフタレート)素材

- スプリント製作に求められる常温重合レジンとの接着性があり、筆積みに適しています。
- お茶や水の容器(ペットボトル)と同じ、溶出性の少ない安全なPET樹脂です。

*ORAL APPLIANCE*



SHOFU INC.

仕様・用途・包装

仕 様			用 途	
種類	厚さ(mm)	入数(枚)	矯正治療 (アライナー、リテーナー など)	スプリント (オクルーザルスプリント、ブラキシズムスプリント) 動揺歯の固定 など
円型 φ120(mm)、φ125(mm) 	0.5	20	○	
	0.8	20	○	
	1.0	20	○	
	1.5	10		○
	2.0	10		○
正方形 127×127(mm) 	0.5	20	○	
	0.8	20	○	
	1.0	20	○	
	1.5	10		○
	2.0	10		○



リーズナブルな正方形仕様は円型にも対応します。  
 ★外箱に円型(φ120、φ125mmの2種)にカットできるガイドを付与しているため、円型シート専用の成型器にも対応できます。


■成分:PET(ポリエチレンテレフタレート) ■色調:クリア

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
キャプチャーシート ハード	歯科咬合スプリント用材料	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000223

製作方法

● 技工用カーバイドバー(7N、7B、7NF)

石膏模型からの取外し後、外形調整  
バリ除去やレジンを築盛した咬合面を調整  
します。

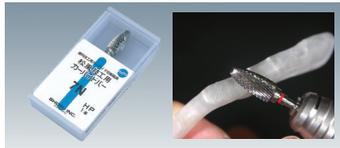

● ビッグシリコンポイントHP(紅)

中仕上げ研磨  
発熱して変形しないように低速でソフトタッチ  
で研磨してください。



必要に応じてビッグシリコンポイントR3  
またはバフ研磨で仕上げてください。  
発熱に注意して、できるだけソフトタッチで研  
磨してください。



ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風技工用カーバイドバー	歯科技工用カーバイド切削器具	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000134
松風ビッグシリコンポイント	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000009