


アイスペシャル C-V ファームウェアバージョンアップ手順書

2023/12/21
株式会社 松風

本ドキュメントでは、アイスペシャル C-V のファームウェア(本体制御用ソフトウェア)をバージョンアップする方法について解説します。

手順1 ファームウェアバージョンの確認

- ① アイスペシャル C-V の電源を ON にしてください。
- ② 下記画面の左上に表示されるバージョン番号がアップデート対象であるかどうかを確認します。

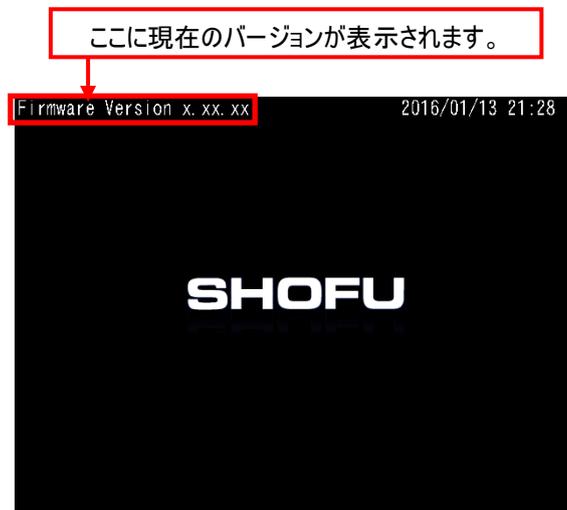

※現在の最新バージョンは松風ホームページ(<https://www.shofu.co.jp/eyespecialc5/firmware.html>)よりご確認ください。
※ファームウェアのバージョンが最新版の場合はバージョンアップの必要はありません。

- ③ アイスペシャル C-V の電源を OFF にしてください。

手順2 松風ホームページからファームウェアのダウンロード

松風ホームページから最新ファームウェアをダウンロードしてください。


<https://www.shofu.co.jp/eyespecialc5/firmware.html>

手順3 バージョンアップ用 SD カードの準備

i 注意

- ・ 松風ワイヤレス LANSD カード、Eye-Fi カード等の無線 LAN 内蔵型 SD カードはご使用にならないでください。
- ・ アイスペシャル C-V に同梱されていた SD カードの使用を推奨します。
- ・ SD カードの中にデータが残っている場合は、パソコンや他のメディアにコピーするなどして、データを別の場所に保存してください。

- ① SD カードの中に保存されているデータをすべて消去してください。
- ② 「手順2」でダウンロードした最新ファームウェア (UPDATE5.FRM) を SD カードのルートディレクトリ (PC から SD カードのドライブを開いたすぐの場所) にコピーしてください。

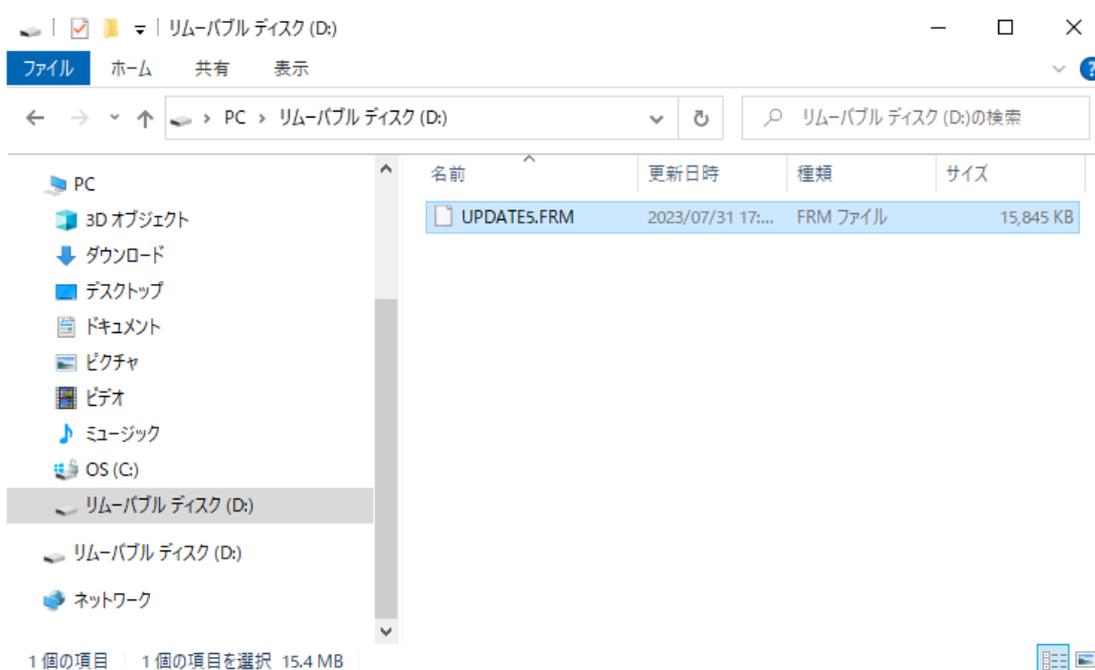

i 参考

- ・ SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み可能」側にしたままの状態で行うと、バージョンアップ完了後に自動的にファームウェア (UPDATE3.FRM) が削除されます。
- ・ 連続して複数のカメラをバージョンアップする場合は SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み禁止」側に切り替えてからお使いください。



手順 4 バージョンアップ作業

i 注意

- ・ 新しいアルカリ乾電池、またはフル充電された充電式電池を使用してバージョンアップを行ってください。
- ・ バージョンアップ中は、以下のことは絶対に行わないでください
 - アイススペシャル C-V の電源を OFF にしたり、電池を抜いたりしないでください。
 - SD カードスロットカバーを開けないでください。
 - ボタン、ダイヤルなどの操作を行わないでください。
 - アイススペシャル C-V に強い衝撃を与えないでください。


- ① 「手順 3」で準備したバージョンアップ用 SD カードを、アイススペシャル C-V の電源を切った状態で SD カードスロットに挿入してください。
- ② SD カードスロットカバーを閉じてください。閉じずに③へ進むと正しくアップデートできません。
- ③ アイススペシャル C-V の電源を ON にしてください。
- ④ 下記の画面が表示されたら、「OK」をタッチしてください。




i 注意

- ・ 上記の画面が表示されない場合、SD カード内からファームウェアが消去されてしまったことが考えられます。その場合は弊社 HP から再度ファームウェアをダウンロードしてください。

- ⑤ 下記の画面が表示されている間はしばらくお待ちください。

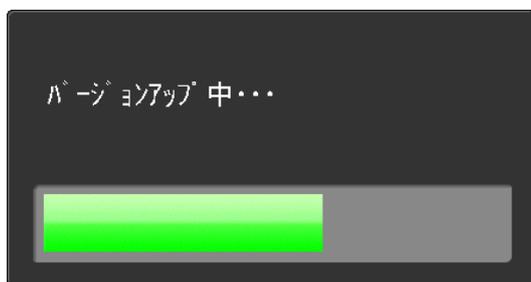

- ⑥ バージョンアップが完了すると下記のように表示されます。赤線部分のバージョンが最新版になっていることを確認してください。

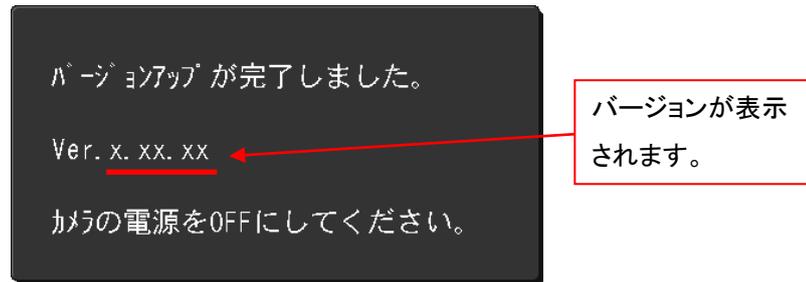

- ⑦ アイススペシャル C-V の電源を OFF にしてください。
- ⑧ SD カードを取り出して、「手順1」に従いバージョンが最新版になっていることをもう一度確認してください。
- ⑨ 別のアイススペシャル C-V をバージョンアップする場合は「手順3」を繰り返してください。

i 注意

- ・ SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み可能」側にしたままの状態で行った場合、バージョンアップ完了後に自動的に SD カード内のファームウェア (UPDATE 5.FRM) が削除されていますので、続けてバージョンアップすることはできません。


手順 5 バージョンアップ用 SD カードのフォーマット

SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み禁止」側に切り替えてバージョンアップを行った場合は、最後に下記の手順でファームウェア (UPDATE5.FRM) を削除してください。

- ① SD カードのライトプロテクトスイッチを「書き込み可能」側に切り替えてください。



- ② SD カードをアイスペシャル C-V に挿入してください。
- ③ 撮影モードまたは再生モードから MENU キーを押し、さらに F4 キーを押します。

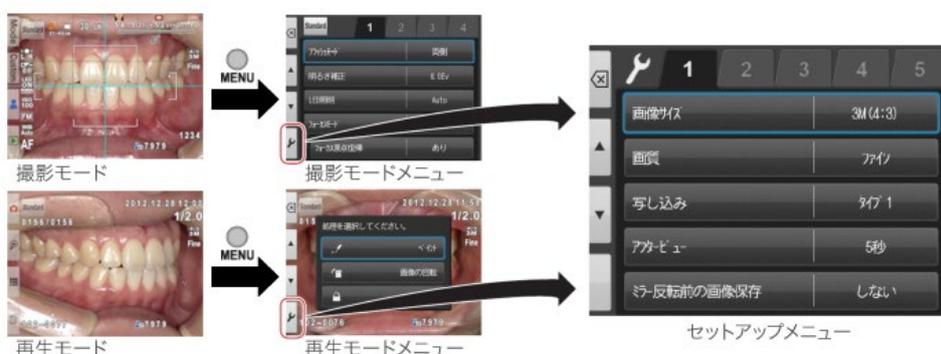

- ④ タブ5を選択し、その後「SD カードのフォーマット」を選択します。



- ⑤ 「カードをフォーマットしますか?」というメッセージが表示されたら「OK」を選択します。



SD カードのフォーマットが完全に終了したことを確認してから、SD カードを取り出してください。

以上