

顔貌モード撮影時の影について


フラッシュを発光させて撮影すると、被写体の背景に影が映りこんだり、背景が暗くなったりすることがあります。改善するためには、フラッシュ発光をOFFにする方法とスレーブストロボを使用する方法があります。

● フラッシュをOFFにする方法

フラッシュを発光OFFにすると、影のない全体が明るい画像を撮影できます。フラッシュを発光させずに撮影する場合は、十分に明るい場所で行なってください。また、手振れを防止するため、しっかりと構えて撮影してください。



フラッシュ発光なしのとき

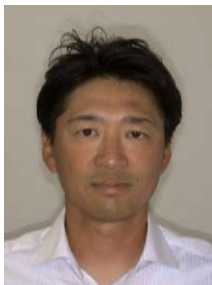


フラッシュ発光ありのとき


● スレーブストロボを使用する方法

フラッシュの発光をトリガ発光にします。スレーブストロボを用意し、撮影を行います。

・顔写真(側面)

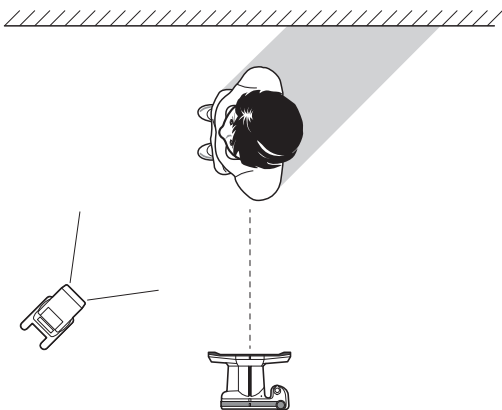

・顔写真(正面)

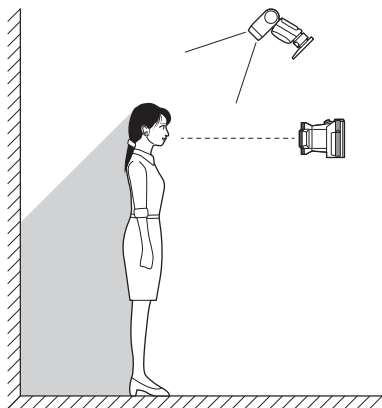

スレーブストロボを使用する場合、ストロボの位置や角度、光量により明るさが変化します。これらの調整を行い、ストロボを固定することをおすすめします。



注記

スレーブストロボには、プレ発光に反応するものとシングル発光に反応するものがあります。本器はシングル発光に対応したストロボをお使いください。

●フラッシュ発光の選択方法

● [ショートカット操作]



+



(ダイヤルキー) F1 キーを押しながら、ダイヤルキーを回す。



参照

P.92「フラッシュモード」

P.102「撮影モードメニューのショートカット操作について」