



歯列矯正用ブラケット

プレシ クリスタル

PRECI CRYSTAL


プレシ クリスタル

包装

単品 (10入)

1症例キット (20入)

(社内処理コード: 018 KP01/022 KP02)

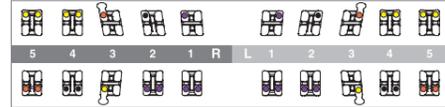

マクロフリンセットアップ


Table with columns: 部位, フック, トルク, アンギュレーション, 幅径, .018スロット (左, 右), .022スロット (左, 右). Rows include U1, U2, U3, U4&U5, L1&L2, L3, L4, L5.

1症例キット

Table with columns: 1症例キット内容, .018スロット, .022スロット. Rows for 上下顎5-5 with and without hooks.

オプション

Table with columns: 部位, フック, トルク, アンギュレーション, 幅径, .018スロット (左, 右), .022スロット (左, 右). Rows for U3 and L3.

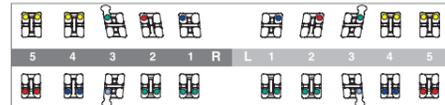

ロスセットアップ

Table with columns: 部位, フック, トルク, アンギュレーション, 幅径, .018スロット (左, 右), .022スロット (左, 右). Rows include U1, U2, U3, U4&U5, L1&L2, L3, L4, L5.

1症例キット

Table with columns: 1症例キット内容, .018スロット, .022スロット. Rows for 上下顎5-5 with and without hooks.

アンドリュースセットアップ

Table with columns: 部位, フック, トルク, アンギュレーション, 幅径, .018スロット (左, 右), .022スロット (左, 右). Rows for U1 and U2.

Table with columns: 販売名, 一般的名称, 承認・認証・届出番号. Row for プレシ クリスタル.

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

www.shofu.co.jp/ortho/

SHOFU logo, 世界の歯科医療に貢献する, 株式会社 松風 営業部 矯正課, 〒113-0034 東京都文京区湯島3-16-2 松風ESTビル, Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682, www.shofu.co.jp

SHOFU INC.

PRECI CRYSTAL

Translucent Ceramic Brackets



松風オリジナルSWA 審美ブラケット

1991年に松風がSWA(ストレートワイヤー アプライアンス)を紹介してから30年以上。ストレートワイヤーテクニックに精通したドクターのご意見を取り入れ、プレシ クリスタルは誕生しました。SWAのコンセプトを守り、Andrews、Roth、McLaughlinセットアップをラインナップ。こだわりを持って作られたプレシ クリスタルは、より良い治療を目指す先生方のご要望にお応えします。

機能と審美性の調和

Function and Esthetics



プレシクリスタルは、ツインタイプの審美性に優れたブラケットです。患者の快適性を向上させるため、ロープロファイルで丸みのあるデザインになっています。高度なインジェクションモールド技術で製造されており、高いブラケット強度と、歯の色を反映させて「調和」する美しさを持つブラケットです。

Andrews、Roth、McLaughlinセットアップをラインナップ



ツインウィング

・片側タイなども可能です。



一体成型で製造されたブラケットボディ

・患者さまの快適性のための丸みを帯びた滑らかで平らなタイウィング
・トルクインベース
・正確なトルクコントロール



Angled Debonding Feature

・ディボンディングしやすいよう、近遠心のベース面を面取り加工しています。



"BUTTERFLY" 型タイウィングデザイン

・近遠心のタイウィングにエラスティックや結さつ線をかけやすいデザイン



Excellent Sliding Mechanics

・ワイヤースロットの入り口に丸みをもたせ、ワイヤーのスライディング性の向上とノッチング(引っ掛かり)を抑制します。

