

高いポテンシャル。コードレスの扱いやすさ。

5942 VALOオーソ コードレス キット

- ◎ハンドピース.....1
- ◎リチウム電池.....4
- ◎充電器一式(充電器本体、ACアダプター)・1
- ◎ライトシールド.....1
- ◎ブラケット.....1
- ◎ブラックライトレンズ.....1
- ◎VALOコードレス バリアスリーブ.....50

(社内処理コード:S972)



付属品 各種

5961 VALOコードレス 充電器用ACアダプター



5962 VALOコードレス 充電器



5963 VALOコードレス リチウム電池 2個



5896 VALOコードレス バリアスリーブプリフィル 600枚



5929 VALOコードレス ライトシールド



(社内処理コード:S973)

1667 ブラケット



508 ウルトラテクト UVオレンジ保護メガネ



5939 ブラックライトレンズ



※ブラックライトレンズは、蛍光触媒含有のボンディング材を見分ける際に使用します。



(社内処理コード:S971)

VALOオーソ コードレス	
波長域	385nm～515nm
出力レベル [*]	スタンダード 1,100 mW/cm ²
	エキストラパワー 2,100 mW/cm ²
	エキストラパワー クオドラント 2,100 mW/cm ²
ハンドピース	本体寸法 20.3cm 本体質量 170g(電池含む)
充電器・充電電池	出力 DC12V(0.5A) 入力 AC100-240V リチウム電池3.2V 2個 再充電可能 規格: RCR123A
硬化深度	4.74mm(※ウルトラデント社測定値)
保証	2年(電池・バリアスリーブなど付属品は90日)

*ISO106501に準じた測定値。テストに使用するメーターの種類、精度により異なります。

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
VALO オーソコードレス	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000057 特定保守管理医療機器
VALO コードレス 付属品	歯科重合用光照射器	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000053 特定保守管理医療機器

ご使用の際は説明書、添付文書等をよく読んでお使いください。



HAVE YOU SEEN
THE LIGHT?

VALO

ORTHOCORDLESS
broadband LED curing light

効率的な治療を目指したコードレスタイプ



モードガイド	スタンダードパワー	エキストラパワー	エキストラパワーオドラント	バッテリー 残量ランプ
出力レベル [※]	1100mW/cm ² ●	2100mW/cm ² ★	2100mW/cm ² ★	
スタートボタン 照射時間ランプ モードランプ 時間/モード変更ボタン	 	 	 	 電池残量が 少なくなると 赤く点灯します。
メタルブラケット／審美ブラケット 光照射時間	10 秒×1 回	3 秒×2 回	3 秒×2 回	

※130106501に準じた測定値。テストに使用するメーターの種類、精度により異なります。

VALOオーソコードレスの特長

深く浸透する光。
ブラケットのボンディングにも **わずか3秒**のスピード重合。



ブラケット装着のための連続照射モード



- **エキストラパワーオドラントモード**
照射時間は3秒×5回。VALOオーソコードレスの最大の特長であるクオドラントモードはスタートボタンを1回押すだけで5歯分を連続的に照射できるよう設計されており、3秒照射→2秒消灯を5歯分繰り返しますので、**ボタンを何度も押す手間を軽減**します。



幅広い波長域により、さまざまな光重合歯科材料に使用可能


- 異なる波長のLEDパネルを搭載することで、**385～515nmの幅広い波長域**を実現しました。
- 矯正だけでなくホワイトニング材、シーラント材などにも使用可能です。
- VALOオーソ1台でほとんどの歯科材料に対応でき、診療効率をアップ**できます。

光源が先端にあるため、光の直進性が高く、強力な光が拡散せず垂直に深く浸透します。

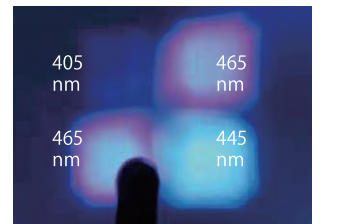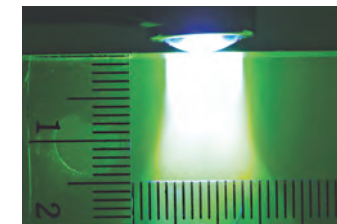


口腔内で操作しやすいコンパクトなヘッド形状

- ロープロファイルなヘッド形状により、ライトガイドタイプの照射器ではアプローチしにくかった**7番遠心部**へも**容易に照射**でき、口腔内での使用がしやすくなっております。また、開口量の少ない患者さまの診療にもご使用いただけます。

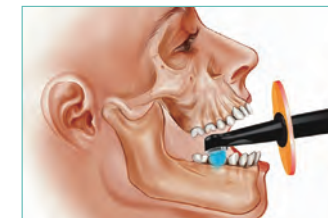

レンズ直径 約 10 mm

- ヘッドはコンパクトですが、**直径約10mm**のレンズを採用。ブラケットの上からでも光照射が可能です。

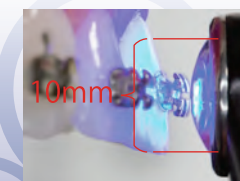

インダイレクトボンディングに

- ハイパワーで深くまで浸透する光により、インダイレクトボンディングを行う際など、トランスファートレー越しでも十分な光照射が可能です。

