



歯列矯正用スプリング

エスプリ

esprit[™]
CLASS II CORRECTOR

簡便な装着が可能なクリップ機構
(クリップタイプ)

快適性と

耐久性を追求した

クラスⅡコレクター

CNC加工による高い耐久性

レーザーろう着を採用し
口腔内でも高い耐久性を発揮


着脱しやすく快適性の高い
近心部のフック

Comfort &
STRENGTH


Now Aligned



SHOFU INC.

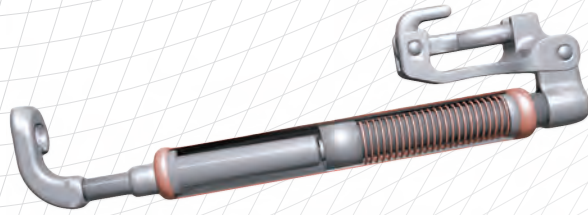

スプリングは内部に収納されているため、不快感を軽減します。

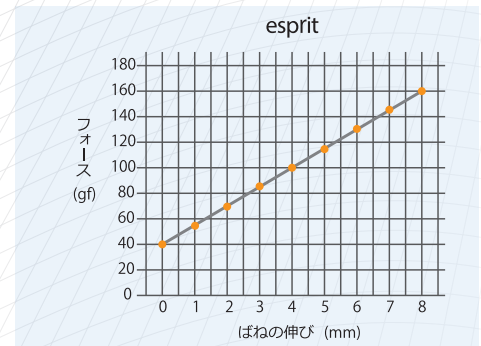

※グラフは除荷時の力です。

装着方法

※詳細については添付文書をご参照下さい。



チューブの遠心部から下顎犬歯のブラケット遠心部までの距離を測り、プッシュロッドのサイズを選択します。(計測結果が2サイズの中間だった場合は短い方を選択します。)



クリップをヘッドギアチューブの近心部から挿入します。




プライヤーを使用し、カチッと音がするまではさみ、ロックします。



プッシュロッドの先端をプライヤーではさんで、下顎犬歯遠心部のワイヤー上に装着します。




口を大きく開けていただき、フォースモジュールにプッシュロッドを挿入すれば装着完了です。

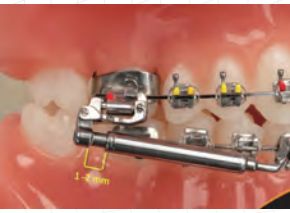

口を閉じたときに1~2mmほどの遊びが生じるように装着します。

「ピンタイプ」のラインナップもございます。

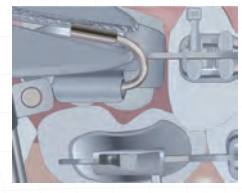

ピンタイプを使用する場合は、ヘッドギアチューブの遠心側から近心側へ向けてユークリッドピンを挿入し、プライヤーを用いてピン先端を屈曲させて固定します。

(社内処理コード:SD01)

900-123

エスプリ クリップタイプ トライアルキット(1症例)

フォースモジュール クリップ付 L/R 各1
メジャーリングデバイス 1、クリンパルストップ 2
プッシュロッド 26mm L/R 各1
プッシュロッド 29mm L/R 各1
プッシュロッド 32mm L/R 各1

900-124

エスプリ クリップタイプ スターターキット (5症例)

フォースモジュール クリップ付 L/R 各5
メジャーリングデバイス 2、クリンパルストップ 10
プッシュロッド 26mm L/R 各2
プッシュロッド 29mm L/R 各2
プッシュロッド 32mm L/R 各2

900-109

エスプリ ピンタイプ トライアルキット (1症例)

ユークリッドピン 2、フォースモジュール ピン用 2
メジャーリングデバイス 1、クリンパルストップ 2
プッシュロッド 26mm L/R 各1
プッシュロッド 29mm L/R 各1
プッシュロッド 32mm L/R 各1

900-110

エスプリ ピンタイプ スターターキット (5症例)

ユークリッドピン 15、フォースモジュール ピン用 10
メジャーリングデバイス 2、クリンパルストップ 10
プッシュロッド 26mm L/R 各2
プッシュロッド 29mm L/R 各2
プッシュロッド 32mm L/R 各2

症例キット

100-969 エスプリ クリップタイプ 23mm 1症例キット

フォースモジュール クリップ付 L/R 各1
クリンパルストップ 2、プッシュロッド 23mm L/R 各1

100-970 エスプリ クリップタイプ 26mm 1症例キット

フォースモジュール クリップ付 L/R 各1
クリンパルストップ 2、プッシュロッド 26mm L/R 各1

100-975 エスプリ クリップタイプ 29mm 1症例キット

フォースモジュール クリップ付 L/R 各1
クリンパルストップ 2、プッシュロッド 29mm L/R 各1

100-976 エスプリ クリップタイプ 32mm 1症例キット

フォースモジュール クリップ付 L/R 各1
クリンパルストップ 2、プッシュロッド 32mm L/R 各1

単品

900-056 プッシュロッド 23mm R (5入)
900-057 プッシュロッド 23mm L (5入)
900-113 プッシュロッド 26mm R (5入)
900-114 プッシュロッド 26mm L (5入)
900-115 プッシュロッド 29mm R (5入)
900-116 プッシュロッド 29mm L (5入)
900-117 プッシュロッド 32mm R (5入)
900-118 プッシュロッド 32mm L (5入)
900-126 フォースモジュール クリップ付き R (5入)
900-127 フォースモジュール クリップ付き L (5入)
900-128 フォースモジュール ピン用 (5入)
900-121 ユークリッドピン (10入)
900-023 クリンパルストップ (10入)
900-122 メジャーリングデバイス (5入)

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
エスプリ	歯列矯正用スプリング	管理医療機器 医療機器認証番号 227AKBZX00073000

価格は2016年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。ご使用の際は、添付文書等をよく読んでお使いください。