


松風ブロックHCシリーズでインレーをオーダーする方法 (DWX-5Xシリーズ、MD-500S対象)

DentalSystemにおいて、松風ブロックHCシリーズでインレーを設計する際の、
オーダー方法についてのマニュアルです。


DWX-50,DWX-51D,DWX-52D,DWX-52DC,DWX-52DCi,MD-500Sをご使用中の方が対象です。

1. DentalManagerを起動

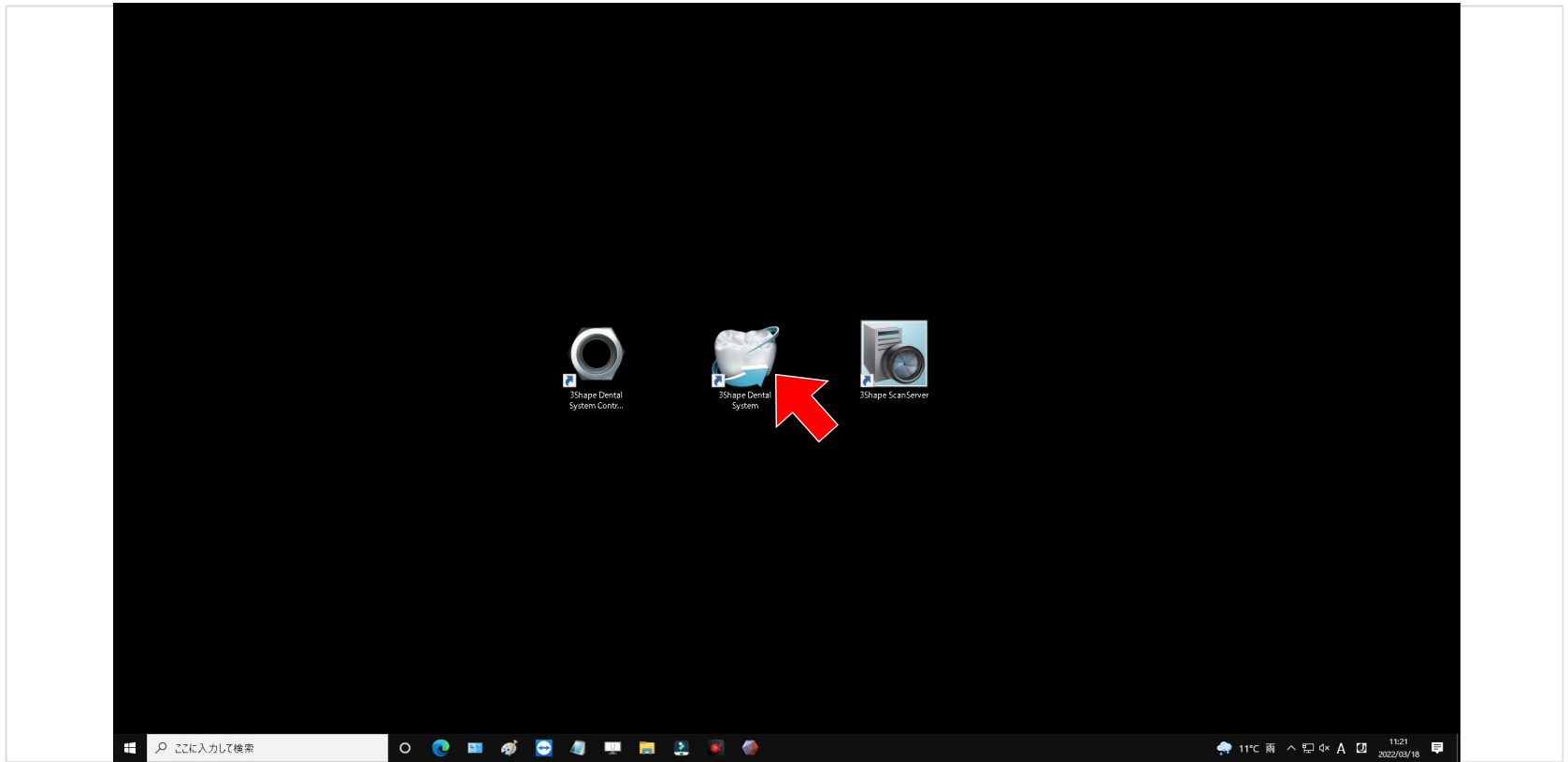


- デスクトップ画面からDentalManagerをダブルクリックして起動します。

2. DentalManagerで新規のオーダーを作成

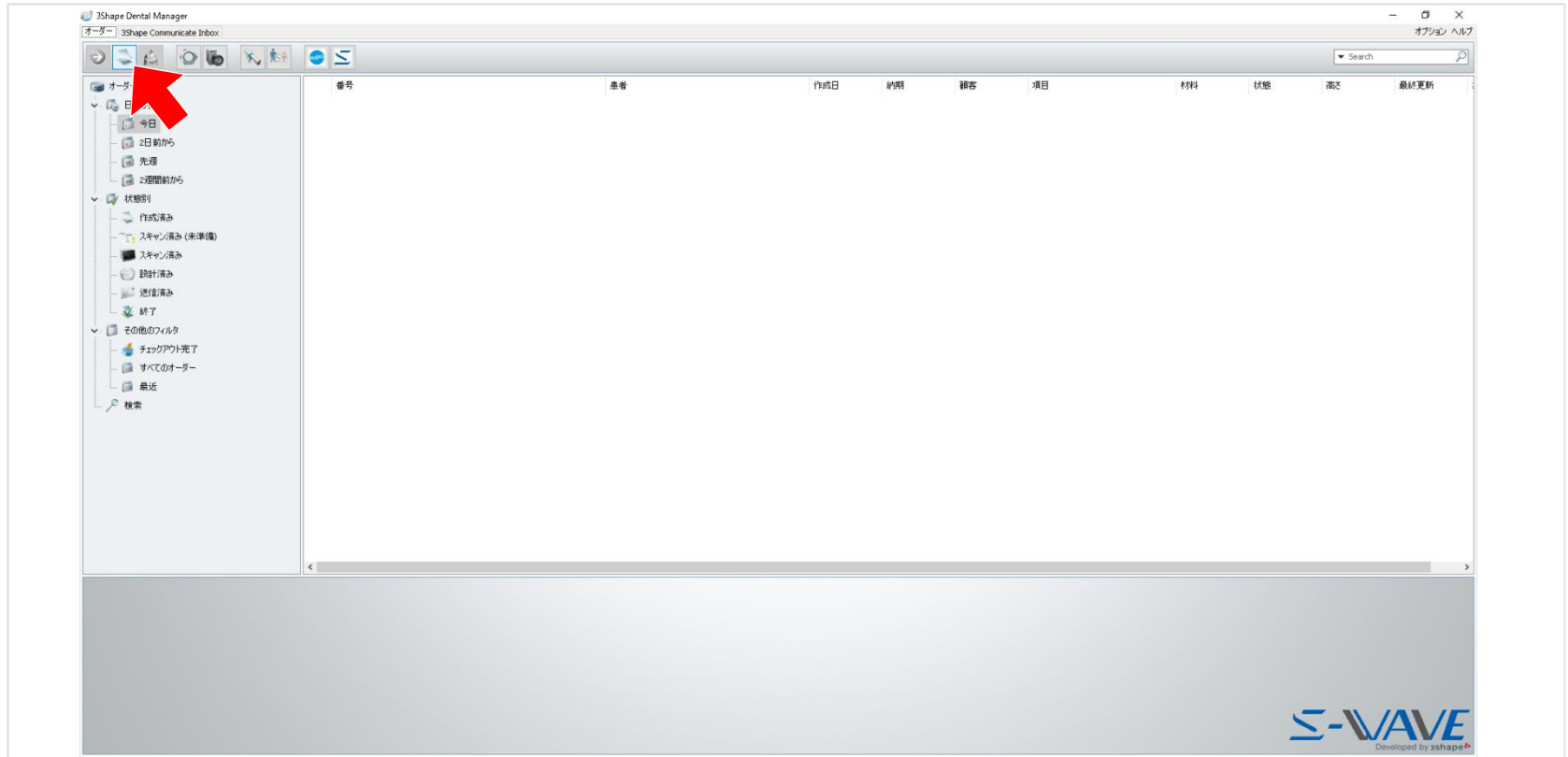


- 画面右上の[新しいオーダー]をクリックします。

3. 必要な項目を入力してオーダーを作成

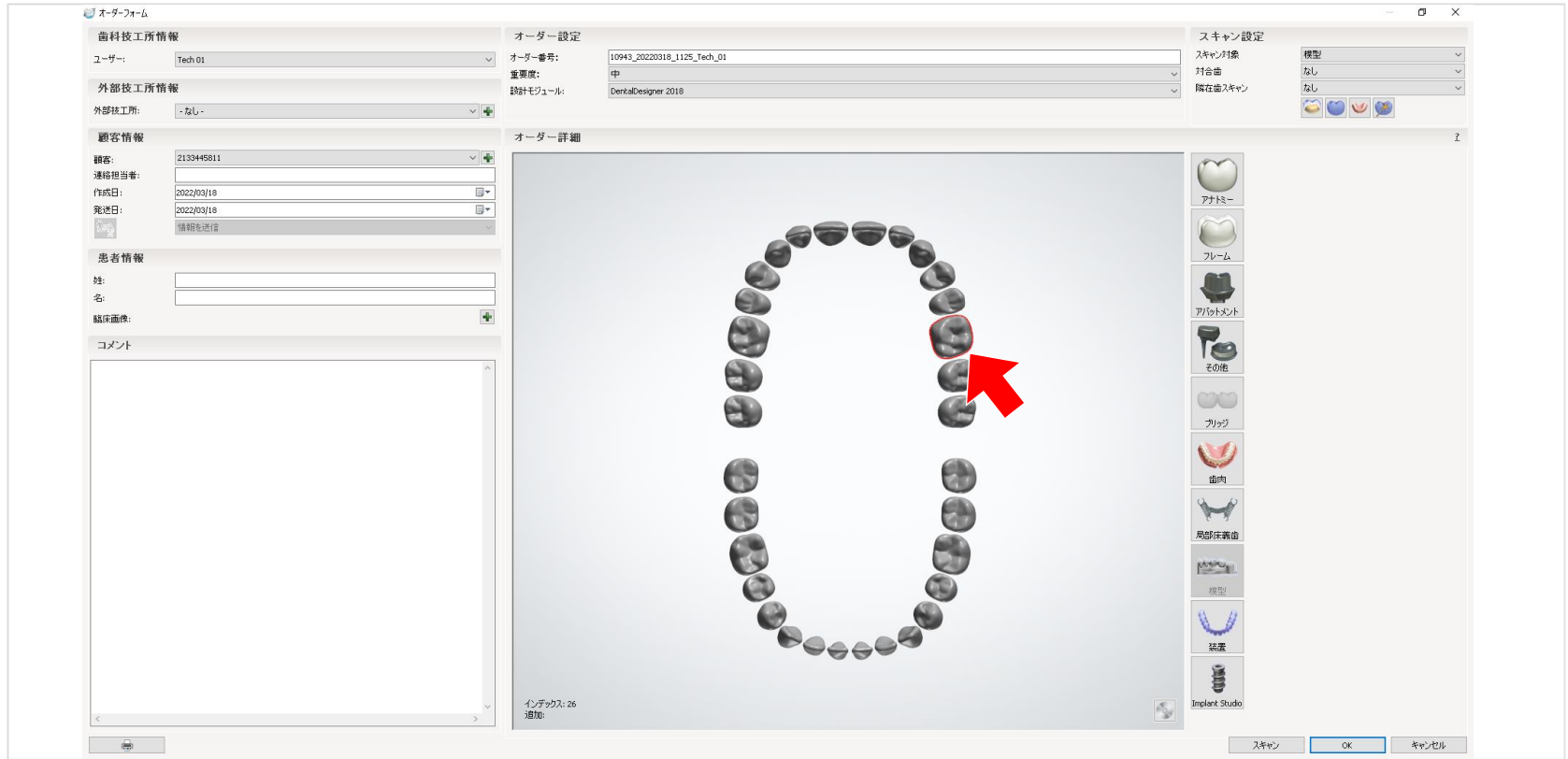


- 患者様の情報等、オーダー作成時に通例されている作業を行います。
- その後、歯列から補綴物製作を行う部位をクリックします。
※選択する部位は歯科技工指示書に従ってください。

4. 補綴物の種類を選択

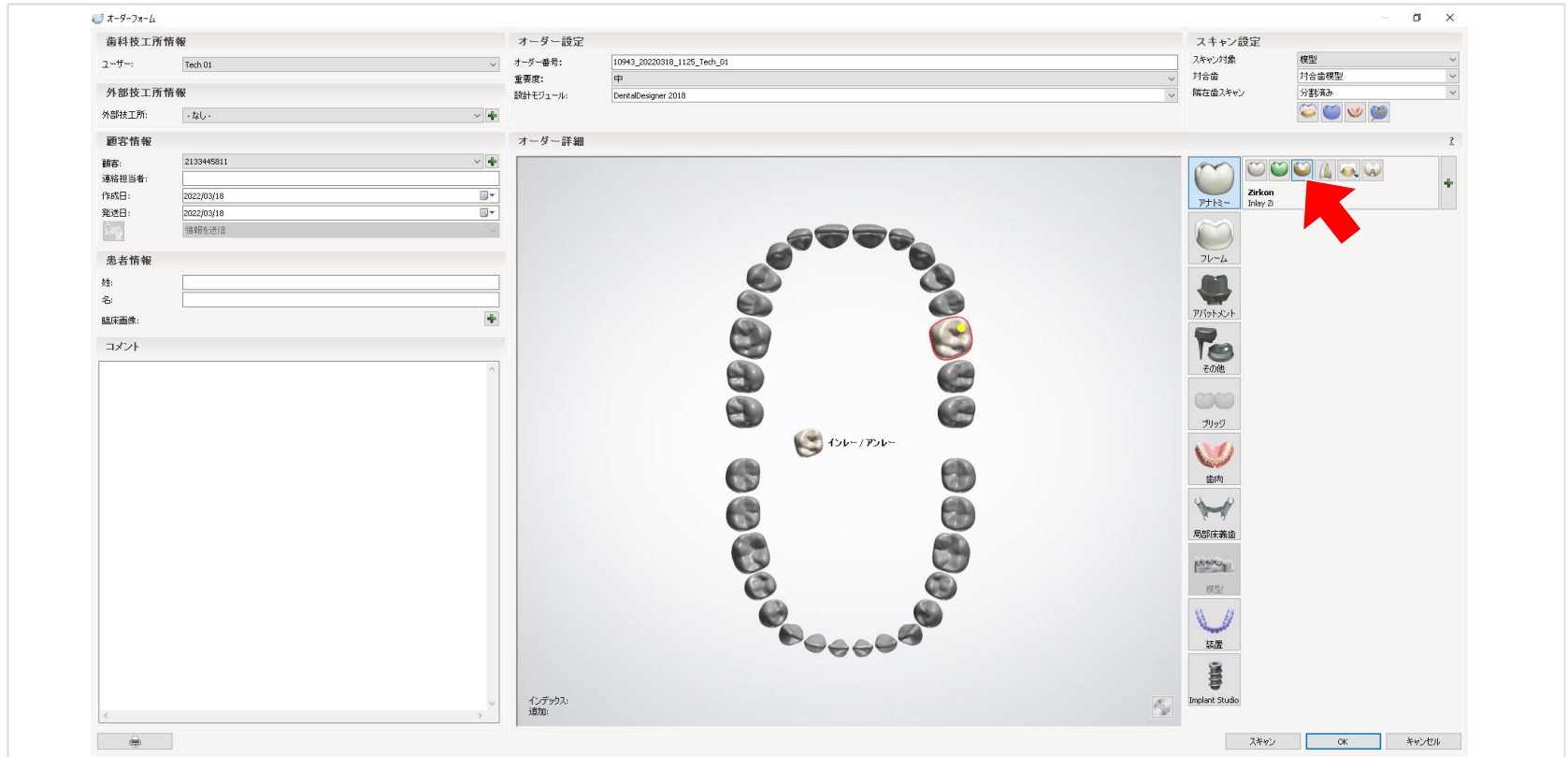


- 一番上の[アナトミー]項目の中の左から2個目の[インレー・アンレー]をクリックします。
※項目名はDentalSystemのバージョンによって多少表現が異なる場合がございます。

5. 材料の選択 - 1

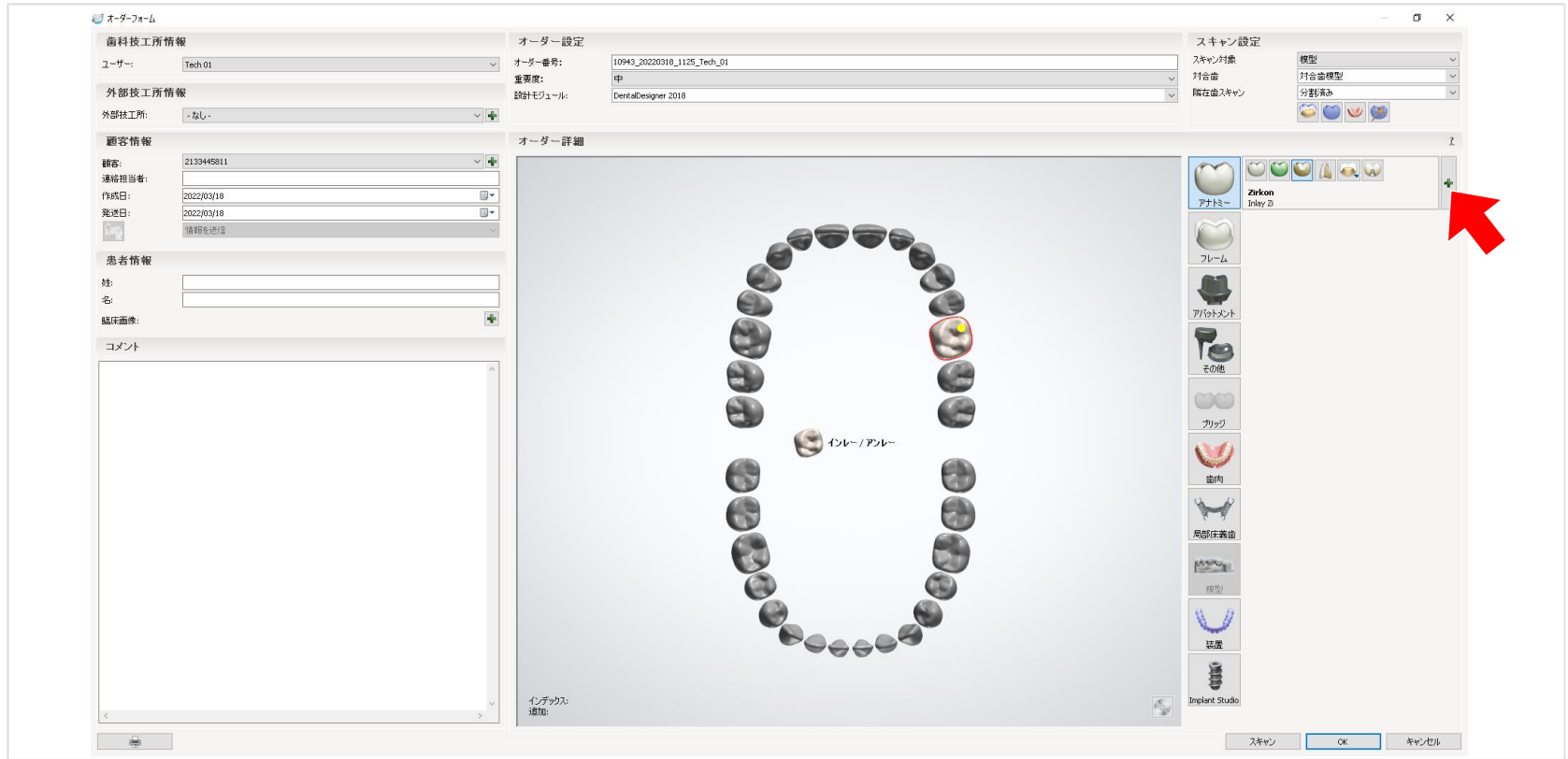


- [+]の箇所にマウスのカーソルを合わせます。

6. 材料の選択 - 2

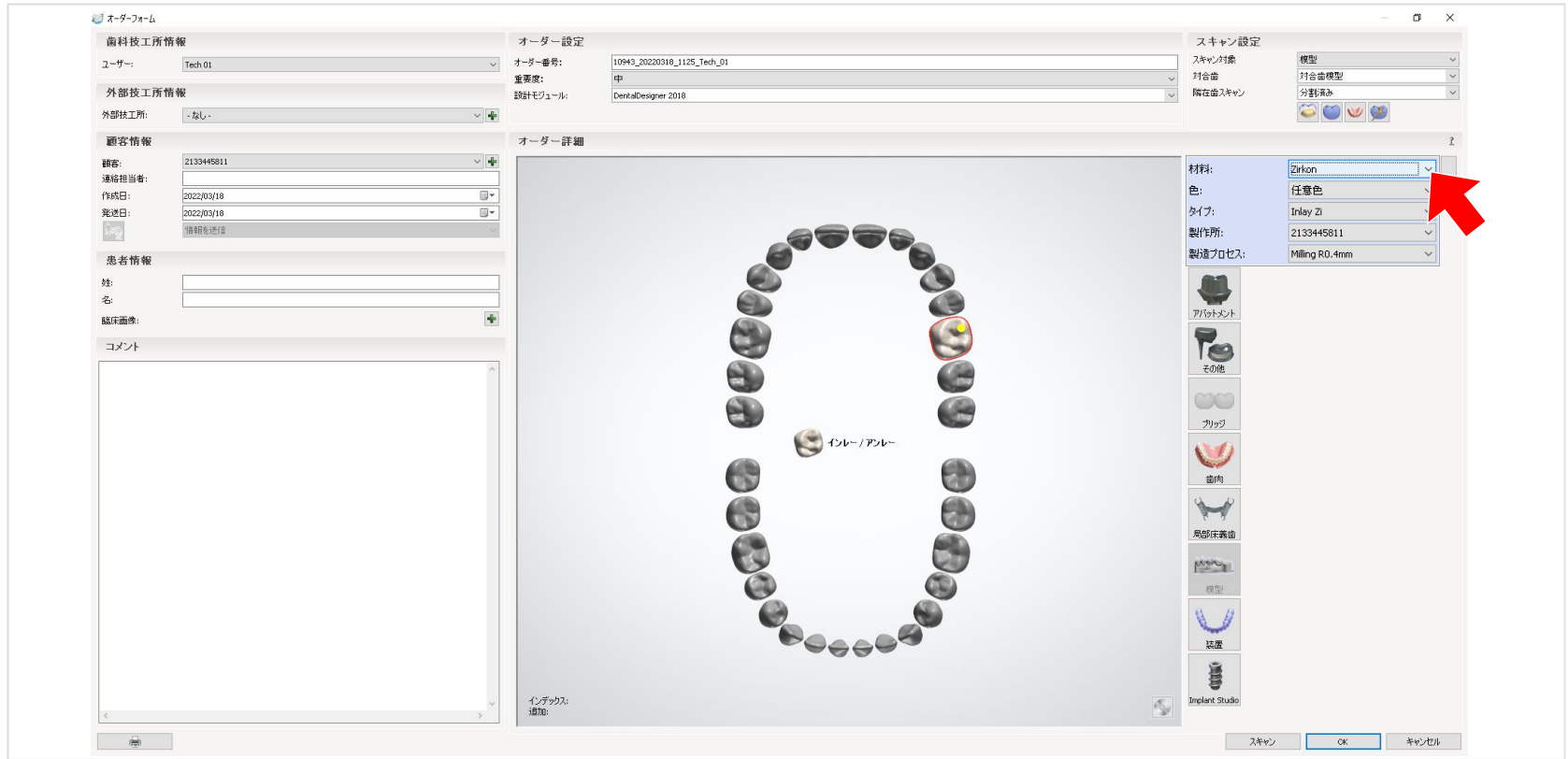

- [+]の箇所にマウスのカーソルを合わせます。

7. 材料の選択 - 3

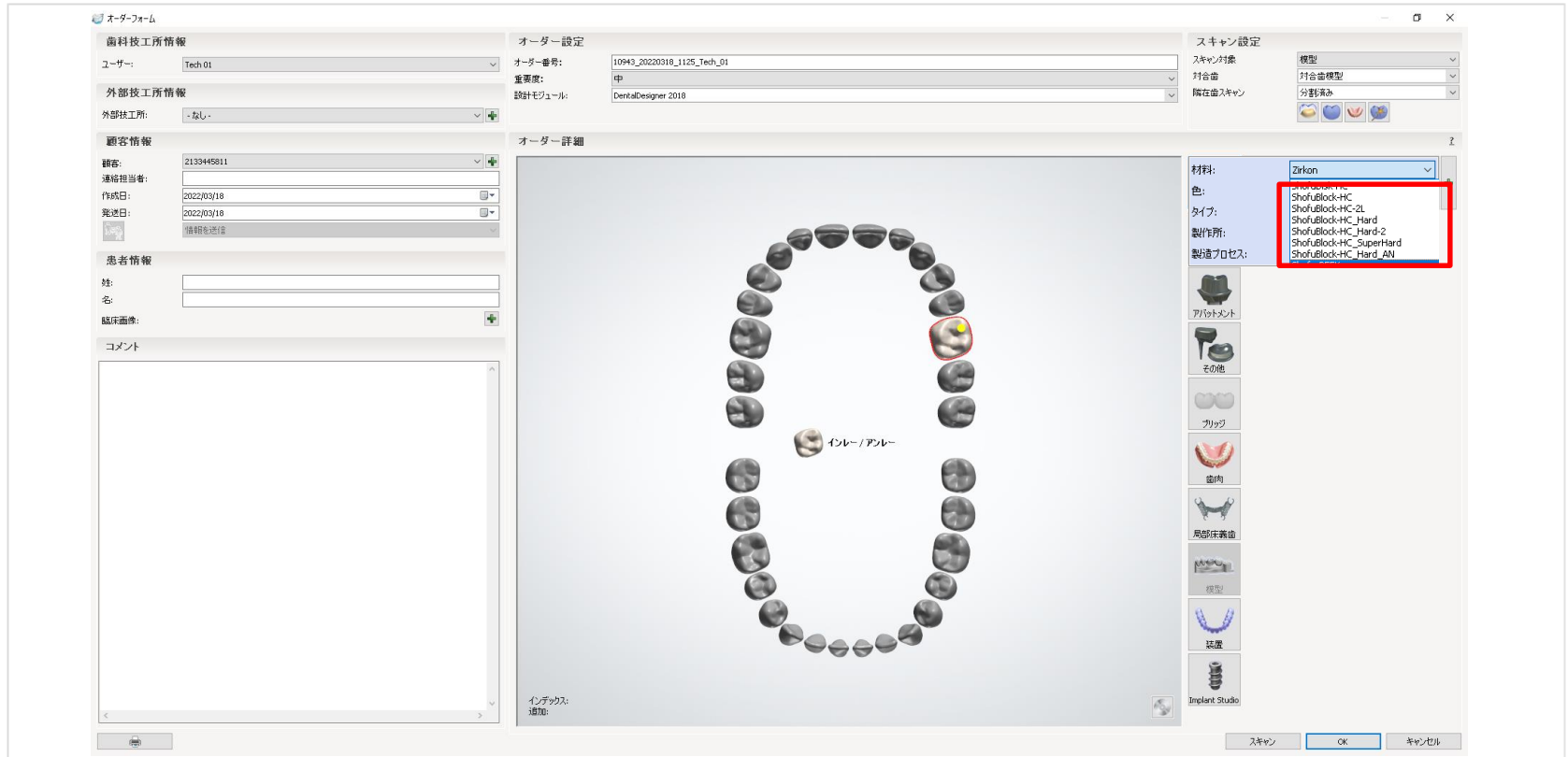


- 使用する松風のハイブリッドレジン材料を選択します。

9. 材料の選択 - 4



- [製造プロセス]をクリックし、[【D1.0】Shofu-HC]に変更します。
- 画面右上のスキャン設定などを変更し、[OK]をクリックします。
- スキャンや設計の工程は、通例通り行ってください。

10. 材料の選択 - 5

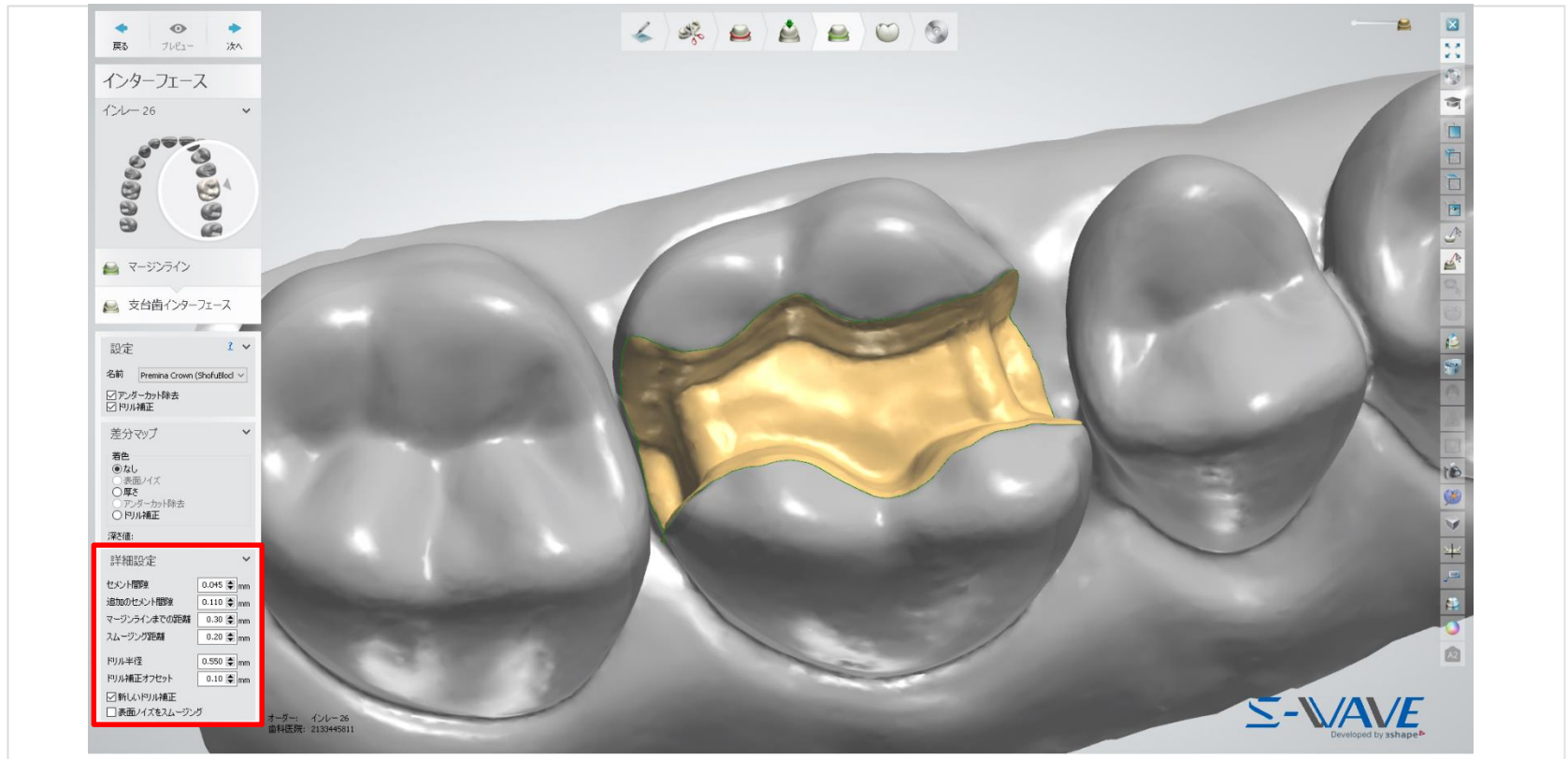

- DentalDesignerでの設計において、インターフェースの項目の数値が上図のように変更されていれば問題ございません。



※デフォルト値は推奨値ですので症例によって変更してください。