

マテリアルファイルのインポート手順

2017年9月20日


1. デスクトップ上にある **3ShapeDentalSystemControlPanel** のアイコンをダブルクリックする。




2. ツールの **インポート/エクスポート** をクリックする。




3. **材料をインポート** をクリックする。

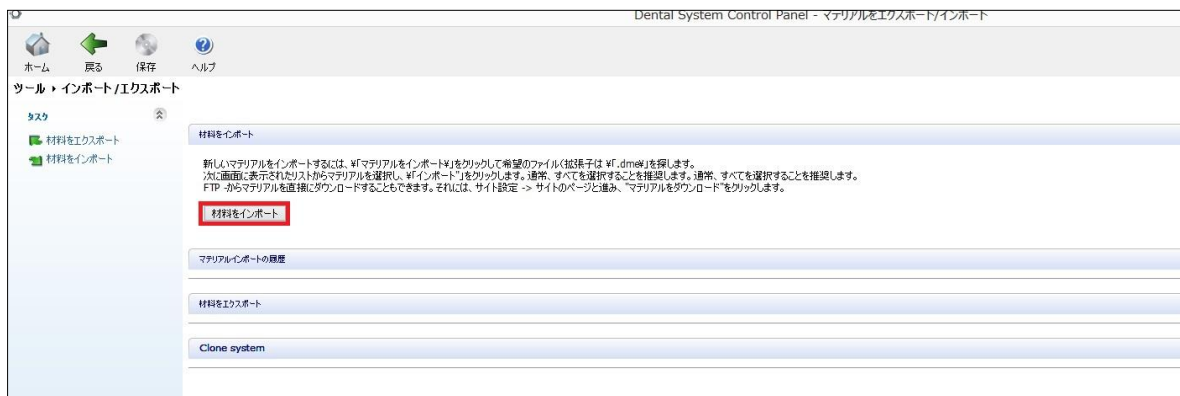

4. インポートするマテリアルファイル (×××××.dme) を選択して、**開く** をクリックする。

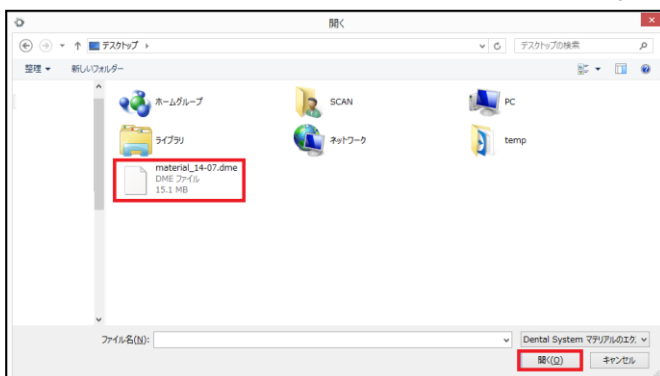


5. **インポート**をクリックする。

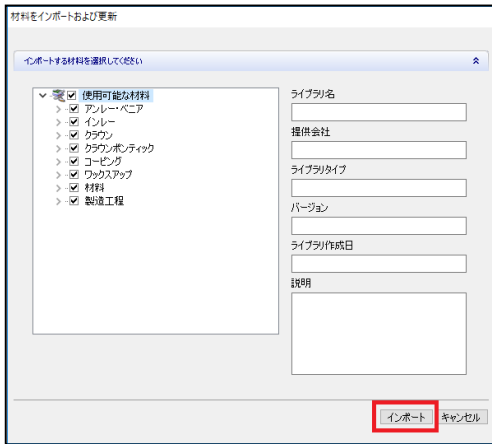


※赤枠で囲んだ部分はインポートする材料によって異なります。


6. 下記のメッセージが表示された場合、「**すべての同様な項目に対しても適用する**」に✓を入れ、**更新**をクリックする。

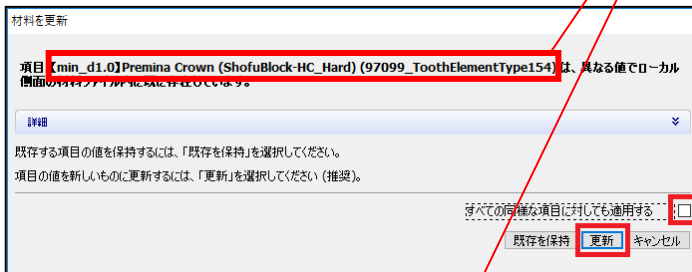

7. 下記のメッセージが表示された場合、「**すべての同様な項目に対しても適用する**」に✓を入れ、**名前を保持**をクリックする。

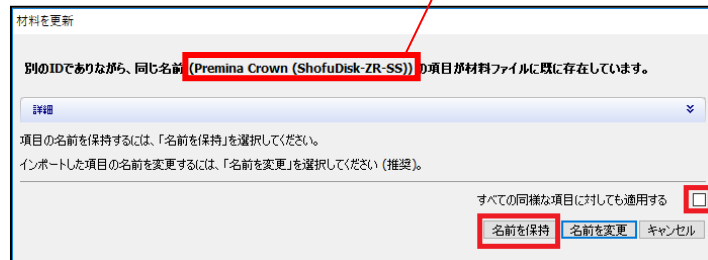

8. **OK**をクリックし、コントロールパネル右上の**x**をクリックし、保存して終了する。

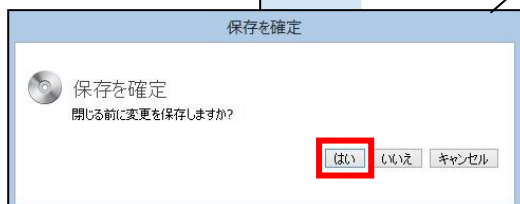

以上