

松風ブロック HC ハードⅡの加工オペリストの追加について

1. 内容

お使いの GO2dental に、松風ブロック HC ハードⅡの加工オペリスト(クラウン)を追加します。

【注意】

- ※ 本オペリストは、Pin 加工モード専用です。Disk 加工モードには追加されません。
- ※ 本オペリストは、ハイブリッドレジン以外の材料(例:ジルコニアなど)では使用できません。
- ※ 本オペリストは、松風のハイブリッドレジンブロック用です。
- ※ 本オペリストは、松風 CAD/CAM ミリングバーDC/DCS専用です。その他の種類のミリングバーで本オペリストを使用すると、加工物が意図した形状に仕上がらない、ミリングバーが折損するなどの恐れがあります。

2. 加工オペリストの追加手順

1. **【重要】GO2dental を操作中の場合は、ソフトウェアを全て終了させます。**
2. 下表をご参照の上、お使いの GO2dental のバージョンに適したインストーラーを、デスクトップ、マイドキュメントなどの任意の場所に保存します。

GO2dental のバージョン	インストーラー名
Ver. 5.13	GO2dental_P23_Additional_data(HC-Hard2)
Ver. 6.02	GO2dentalV6_P28_Additional_data(HC-Hard2)
Ver. 6.04	GO2dentalV604_P15_Additional_data(HC-Hard2)
Ver. 6.02 for dwx-4	GO2dentalV6_DWX-4_P11_Additional_data(HC-Hard2)

3. 保存したインストーラーをダブルクリックします。
最初の画面のセットアップタイプでは、すべて(C)を選択してインストールをすることをお勧め致します。
その後は画面に表示される指示に従い操作を進めてください。
GO2dental のインストール先フォルダをデフォルトから変更した場合、インストールフォルダ名を変更している場合は、本書末項の“5. インストールができない場合”を参照してください。
4. インストール作業完了後、GO2dental を起動し、お使いの加工機に合わせて次項“3. GO2dental のバージョンごとの追加内容”に記載の加工モードを選択してください。材料選択画面において、以下のマテリアルが選択可能であることを確認します。

【ShofuBlock_HC_Hard_2】

3. GO2dental のバージョンごとの追加内容

お使いの GO2dental のバージョンごとに、下表に示す加工モード、加工材料、加工形状でご使用いただけます。

Ver5.13

加工機	加工モード	加工材料		加工形状
		種類	サイズ	
DWX-50	Pins 7Pins	ShofuBlock_HC_Hard_2	S サイズ(10.0×12.0×16.0) M サイズ(12.0×14.0×18.0) L サイズ(14.5×14.5×18.0) S サイズ縦(12.0×10.0×16.0)	クラウン

Ver6.02

加工機	加工モード	加工材料		加工形状
		種類	サイズ	
DWX-50	Pins 7Pins	ShofuBlock_HC_Hard_2	S サイズ(10.0×12.0×16.0) M サイズ(12.0×14.0×18.0) L サイズ(14.5×14.5×18.0) S サイズ縦(12.0×10.0×16.0)	クラウン
DWX-51D	Pins 9Pins			

Ver6.04

加工機	加工モード	加工材料		加工形状
		種類	サイズ	
DWX-50	Pins 7Pins	ShofuBlock_HC_Hard_2	S サイズ(10.0×12.0×16.0) M サイズ(12.0×14.0×18.0) L サイズ(14.5×14.5×18.0) S サイズ縦(12.0×10.0×16.0)	クラウン
DWX-51D	Pins 9Pins			
DWX-52DC	Pins Pins 8P			
DWX-52D	Pins 8P 7Pins			
DWX-52DCi	Pins 8P 8Pins			

Ver6.02 for DWX-4


加工機	加工モード	加工材料		加工形状
		種類	サイズ	


DWX-4	4ATC Pins Multi-Pins	ShofuBlock_HC_Hard_2	S サイズ(10.0×12.0×16.0) M サイズ(12.0×14.0×18.0) L サイズ(14.5×14.5×18.0) S サイズ縦(12.0×10.0×16.0)	クラウン
-------	----------------------------	----------------------	---	------

4. インストーラダウンロード時のメッセージについて

インストーラのダウンロード時に「コンピューターに問題を起こす可能性があります」などの警告メッセージが表示される場合があります。

その場合は、ダウンロードページに記載されているファイル名と、表示されたメッセージに記載されているファイル名が一致することを確認し、ファイル名が一致している場合は、以下の手順でダウンロードを続行してください。

▶ ダウンロード 

ファイル名	GO2dental_P11_Additional_data_DiskHC.exe
データ内容	松風ディスクHCディスクステップ毎の加工に必要な材料データを追加します。
バイト数	3.11MB
掲載日	2016/02/00
対応ソフトウェア	GO2dental Ver5.13.214, Ver5.13.220
転載条件	転載禁止
インストール方法	 インストール方法 (1.1MB)

ファイル名が一致していることを確認してください。一致していれば、「操作」をクリックしてダウンロードを続けてください。

GO2dental_P11_Additional_data_DiskHC.exe はダウンロードしたユーザー数が少ないため、PC に問題を起こす可能性があります。

削除(D) **操作(A)** ダウンロードの表示(V)

↓

GO2dentalV6_P13_Additional_data_ZR-SS_Lucent-DiskHC.exe (3.15 MB) を実行または保存しますか?

実行(R) **保存(S)** キャンセル(C)

以下の画面が表示された場合は、[詳細情報]>[実行]をクリックしてください。

Windows によって PC が保護されました

Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

詳細情報

実行しない

Windows によって PC が保護されました


Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

アプリ: GO2dentalV604_P09_Additional_data(ShofuDisk_ZR_Lucent_Supra).exe
発行元: 不明な発行元


実行 **実行しない**

5. インストールができない場合


下図のようなメッセージが出る場合、以下についてご確認ください。

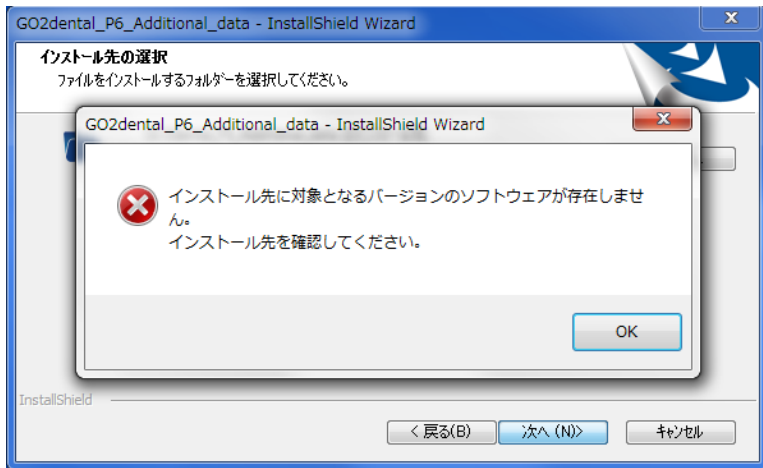

- お使いの GO2dental と、対応するインストーラーの種類が合っているかをご確認ください。
※GO2dental がインストールされていない PC には、本インストーラーはご使用いただけません。
- GO2dental のインストールフォルダを初期設定のインストール場所から変更されている、又はフォルダ名を変更している場合は、インストール先の「変更」をクリックします。

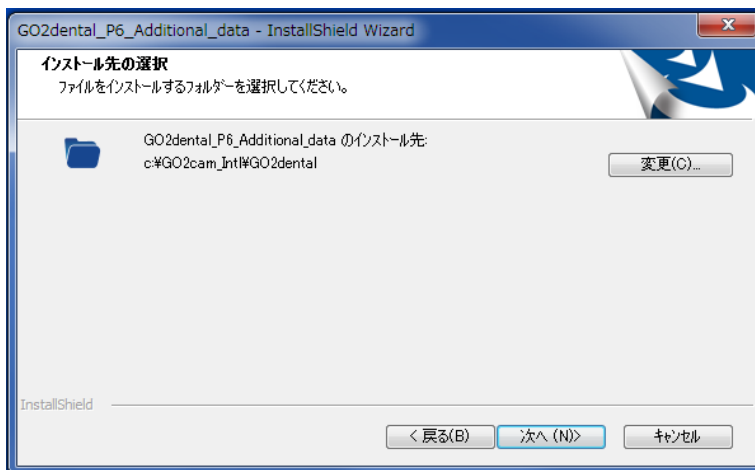

- 初期から変更された GO2dental のインストールフォルダを指定してください。

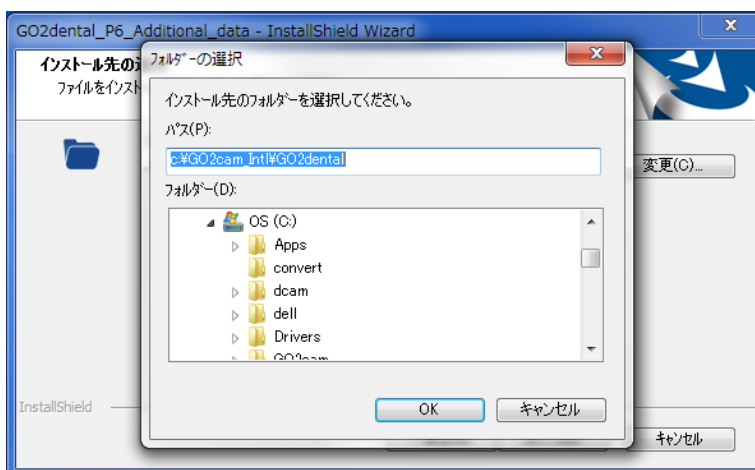

以上