



光重合型動揺歯固定材

PRGスーパーフィックス ご使用ガイド

安定した固定のために、
必ずご確認ください。



1 推奨プロトコルをお守りください

接着力を高めるために、歯面清掃はしっかり
行なってください。

前処理材の組み合わせを守ってください。



天然歯

松風
エッチャント



補綴装置
(金属・セラミックス・
コンポジットレジン)

ビューティボンド
Xtreme
補綴装置については、前処
理を行う前に被着面を粗造
化してください。



2 エッチング処理は30秒

接着力向上のため、エッチング30秒を推奨します。

松風エッチャント処理

15秒以上水洗

エア乾燥



30秒放置



エッチング処理後、乾燥した歯面が改質していない場合は、
再度エッチング処理を繰り返してください。

3 ニードルチップの識別について

PRGスーパーフィックス ペースト

松風ニードルチップ (黒)



PRGスーパーフィックス
ペーストのニードルチップ
(黒)を必ずご使用ください。

松風エッチャント

松風エッチャントニードルチップ (灰色透明)



松風エッチャントのニードル
チップ (灰色透明)を必ずご使
用ください。

ニードルチップはシリンジ先端部に挿入後、時計回りに回してしっかりと固定してください。

4 まずは下顎前歯の固定から

まずは扱いやすい症例で操作性をご確認いただき、適応範囲を広げていただくことを
おすすめします。



おすすめ症例
(取り組みやすい症例)

- 下顎前歯の固定
- 咬合干渉の少ない症例
- 接着面積が十分確保できる症例



慎重な対応が
望ましい症例

- バイトが深い症例
- 強い咬合力が予想される症例
- 脱離リスクが高い症例

※ご使用にあたって必ず電子添文・使用説明書を
確認し正しくご使用ください。

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
PRGスーパーフィックスキット	歯科動揺歯固定用接着材料	管理医療機器 医療機器認証番号 307AKBZX00103000
PRGスーパーフィックス	歯科動揺歯固定用接着材料	管理医療機器 医療機器認証番号 307AKBZX00102000

SHOFU INC.