



1 補綴装置の前処理①

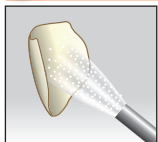


アルミナサンドブラスト
処理後、超音波洗浄

必要に応じてフッ酸系エッチング材
をお使いください。


2 試 適

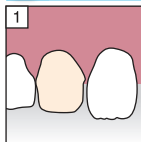


通常に従い、歯面を清掃

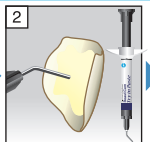

補綴装置にビューティセム
トライラインを塗布し、
歯面に圧接

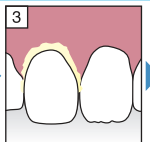


周辺歯質、隣在歯との
適合性を確認しビュー
ティセム ベニアの色調
を決定

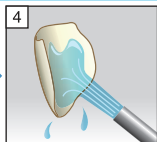


補綴装置を水洗し、ビュー
ティセムトライラインを十分
に除去。その後乾燥

3 補綴装置の前処理②

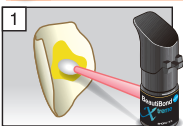


ビューティボンド Xtremeを
塗布し、弱圧 → 強圧エア乾燥*

※塗布面が光沢のある均一な面でない場合は、塗布を繰り返してください。推奨：弱圧5秒→強圧十分に乾燥。
※十分に乾燥し、ビューティボンド Xtremeの液だまりができないようにしてください。

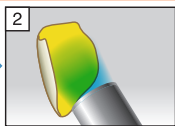


光照射 LED:5秒 ハロゲン:10秒


4 歯 面 の 前 処 理

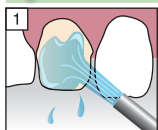


歯面を水洗し、ビューティ
セムトライライン等を十分に
除去

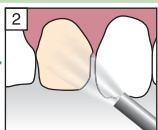

歯面の乾燥

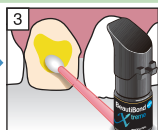


ビューティボンド Xtremeを塗布*し、弱圧 → 強圧エア乾燥
※事前に歯面をエッチング処理した場合は20秒間こすり処理
してください。

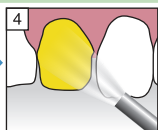

光照射
LED : 5秒
ハロゲン : 10秒


※照射面積が広い場合は、複数回に分けて十分に照射してください。

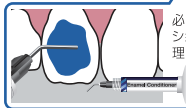


必要に応じて松風エナメルコンディ
ショナー(別売)でエナメル質を前処
理してください。

※処理後は水洗・乾燥を
行なってください。


5 装 着

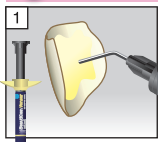


ビューティセム ベニア
を補綴装置に塗布

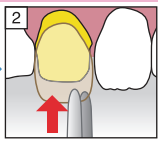

補綴装置を装着

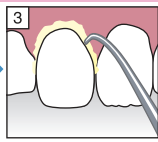


余剰ペーストに2~3秒間
光照射を行い、余剰セメン
トを除去

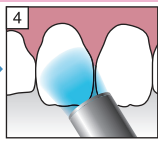

光照射
LED : 10秒
ハロゲン : 20秒

※照射面積が広い場合は、複数回に分けて十分に照射ください。

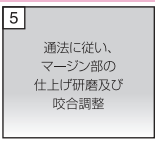

通常に従い、
マージン部の
仕上げ研磨及び
咬合調整