



自己接着性レジンセメント
ビューティセムSA



練和しやすい!

伸びが良い!

除去しやすい!



プライマー不要*のレジンセメントが
たっぷりサイズで
新登場!

同時発売

手練和不要の
オートミキシングタイプ



口腔内環境の
健全化に寄与する
**S-PRGフィラー
配合**

BeautiCem SA

SHOFU INC.

*陶材と接着する場合は、ポーセレンプライマーの塗布が必要です。

Q 内容量はどの位ですか？

A 9mL(15.7g)入っています。

Q どの位の量を出せば良いの？

A クラウンに用いる場合以下のペースト量が必要です。



Q シリンジ1本で何回使用できますか？

A クラウンの場合、目安として約120回使用できます。(1歯あたりのコストは約75円)



たっぷり使える
デカシリンジ

POINT

1

練和しやすい!

Triturated

軽いタッチで練和できるやわらかいペースト性状です。

手練和不要のオートミキシングタイプもご用意。



※10秒間練和してください。



※オートミキシングタイプのペーストの特長はハンドミキシングタイプと全く同じです。

POINT

2

伸びが良い!

Elongation

伸びが良く、薄い被膜を形成できるため、補綴装置接着時の浮き上がりを軽減できます。



被膜厚さ

11μm

POINT

3

除去しやすい!

Removal

余剰セメントは、垂れにくく、半硬化させることで簡単に除去できます。


照射光が届かない場合は、化学重合により半硬化させて余剰セメントを除去可能です。



垂れにくい



写真提供: 篠ヶ瀬 鋼先生(篠ヶ瀬歯科)

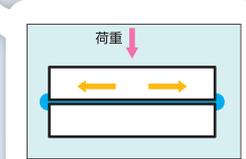

光照射

2秒間光照射後、除去

化学重合

補綴装置装着後、3~4分放置して除去

POINT

4

プライマー無し※で

様々な被着体に接着可能!



松風ポーセレンプライマー

※陶材と接着する場合は、ポーセレンプライマーの塗布が必要です。



写真提供: 上田 恭史先生(うえだ歯科医院)

写真提供: 加藤 賢吾先生(東海歯科醫院)

OTHER POINT

練和後の操作余裕時間は2分です。

(室温23℃の場合)

オートミキシングはミキサーチップより押出後、2分です。



※1: 照射光が届かない場合は、補綴装置装着後、3~4分程度放置して余剰セメントを半硬化させてください。

※2: 補綴装置内側のセメントはまだ硬化していないので、除去時に補綴装置が浮き上がってしまう場合があります。補綴装置を押さえながら余剰セメントを除去してください。

色調は3色をご用意しています。

- クリア** 透明性が高く、審美性を気にされる場合におすすめです。
- アイボリー** 象牙質に近似した色調です。
- オパーク** 隠蔽性の高い不透明な色調です。金属等の色調を遮蔽したい場合におすすめです。




ビューティセム SA は口腔内環境の健全化に寄与する S-PRG フィラーを含有しています。

S-PRGフィラーって


S-PRGフィラーはビューティセムSAに含まれている松風独自開発のフィラーです。

口腔内環境の健全化に寄与する6種類のイオンがセメントマージン周辺および歯質(支台歯)へと徐放され、以下の特長を発揮します。

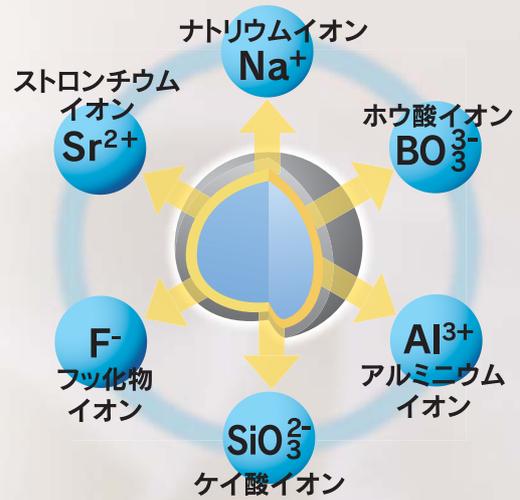

酸中和能の発現

S-PRGフィラーの働きにより、周囲環境を中性領域に移行させます。

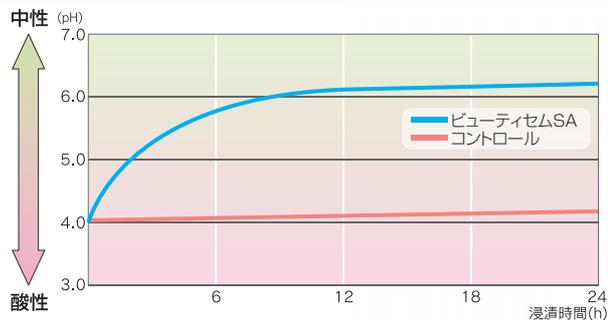


ビューティセムSAの硬化体を乳酸水溶液(pH=4.0)に浸漬したときのpHの変化 (自社独自試験)



イオンリリース&フッ素リチャージ

S-PRGフィラーからフッ素をはじめとする6種類のイオンが持続的にリリースします。

また、フッ素含有ハミガキやジェルを使用する事で、口腔内のフッ化物イオンをリチャージします。

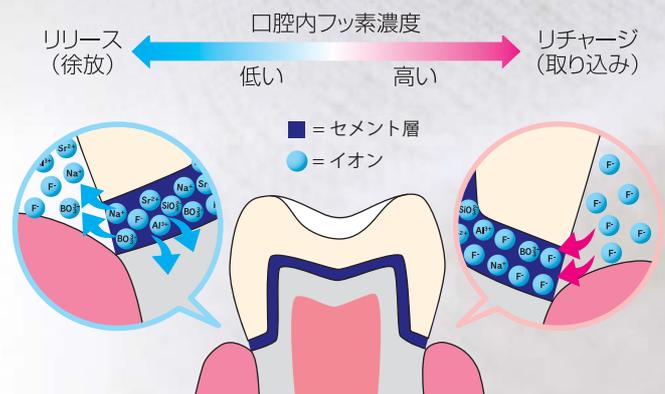

包装・価格

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティセム SA	歯科接着用レジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00179000



ビューティセム SA ハンドミキシング

【内容】
ビューティセム SA ペースト 9mL
紙練板 1
スパチュラ 1
ステップカード 1



ビューティセム SA オートミキシング

【内容】
ビューティセム SA ペースト 5mL
ミキサーチップ 10
ステップカード 1

■色調:3色(ハンドミキシング・オートミキシング共通)



関連製品



更に審美的、更に強固な接着をお求めの方に
**レジセム
ベーシックセット**

1セット

【セット内容】

レジセム ペースト オートミキシング(クリア)5mL 2
レジセム プライマー-A 3.0mL 1
レジセム プライマー-B 2.5mL 1
ミキサーチップ 20
マイクロチップファイン ピンク 50
(ハンドル1、アプリケーターチップ 50)
プチティッシュ 1

ビューティセムSAオートミキシング・レジセム共用

松風ミキシングセット

ミキサーチップ

50個



陶材接着の前処理に
**松風ポーセレンプライマー
5mL**



フッ素配合口腔ケアジェル
メルサーージュ クリアジェル
メルサーージュ クリアジェル [キッズ]
各60g

フッ素950ppm配合

フッ素500ppm配合

カタログに記載の価格は2013年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>