

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント 16709002

松風ハイ-ユージノールセメント

【禁忌・禁止】

- 1) 本材又は酸化亜鉛ユージノールセメントに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材又は酸化亜鉛ユージノールセメントに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

* 【形状・構造及び原理等】

[成分]

構成	性状	成分
粉	粉	酸化亜鉛、ロジン、酢酸亜鉛、けい酸アルミニウム、HY材、その他
液	液	チオウジ油

[原理]

主成分の酸化亜鉛とユージノールがキレート結合し、ユージノール亜鉛を生成することにより硬化する。

* 【仕様】

JIS T 6610: 2013「歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント」

タイプ1(仮着)及びタイプ5(仮封)

項目	タイプ1	タイプ5
硬化時間(37)	3分	3分30秒

JIS試験方法による

【使用目的又は効果】

暫間補綴物の仮着、仮封に用いる。

* 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 粉液の採取(標準粉/液比は4.4g/1.0g)
特に仮着物の取りはずしを容易にする場合は、液をやや多く練和します。(液は経時的に黄色~黄褐色に変色することがあるが性能には影響ありません。)

* 2) 練和

粉と液を紙練板又はガラス練板上に採取し、粉を2~3等分し、液中に徐々に投入し、約30秒間で均一に練り上げます。練和量が多いときや硬め(パテ状)に練和する場合は1分程度で練和します。

練和温度条件: 23±2

練和湿度条件: 50±5%

練和時間: 30秒

操作時間: 2分

3) 仮封、仮着

練和後直ちに適用しますが、形成した歯面はエアやアルコールで乾燥させずに使用します。余剰セメント泥は軟らかいうちに除去します。なお、初期硬化は仮封、仮着後4分程度です。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 永久補綴物の仮着には使用しないこと。
- 2) 液を採取する際は、容器を逆さにして気泡を抜いてから計量すること。
- 3) 正しい計量のために、液容器のノズルに付着した液は、湿ったガーゼなどで拭き取ること。
- 4) 粉及び液の容器は、使用后すぐに密栓すること。特に粉は、湿気に触れないように注意すること。
- 5) 仮着や仮封に使用する場合は、歯面を乾燥させずに濡れた状態で使用すること。
- 6) 露髄又は窩洞が歯髄に近接した場合は、水酸化カルシウム製剤等を用いて歯髄保護を行うこと。

* 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- * 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- * 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- * 3) 粉、液又は練和物との接触による過敏症を防ぐため、医療用(歯科用)手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭いた後、大量の流水で洗浄すること。
- * 4) 粉、液又は練和物が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】


[保管方法]

- ・直射日光、高湿度を避け室温(1~30)で保管すること。
- ・本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[記載の使用期限は当社データによる。]

(例  YYYY-MM-DD は 使用期限 YYYY年MM月DD日を示す。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風

住所 〒605-0983

京都市東山区福稲上高松町 11

電話番号 075-561-1112