

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用仮封材 70871002

ハイシーラ

【禁忌・禁止】

- 1) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[構成]

性状	成分
パテ状	硬質石こう、グリセリン酢酸エステル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、硫酸カリウム、二酸化チタン、タンニン酸、その他

色調：ユニバーサル

[原理]

本材は、唾液からの水分による石こうの水和反応（二水石こうの針状結晶が成長して）で硬化する。

【使用目的又は効果】

歯の仮封に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 窩洞は水洗後、湿潤した状態で、必要量のハイシーラを採取し、歯科用充填器で填入します。過剰部は除去します。
- 2) 填入後は、唾液により表面から硬化しますが、1時間程度は噛まないようにします。
- 3) 除去時は、歯科用エキスカベータ等でほとんど除去できますが、わずかな付着物はアルコール綿球で容易に除去できます。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 容器は使用后すぐに密栓すること。

* 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- * 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- * 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】


[保管方法]

- ・高温、多湿、直射日光及び火気を避けて、常温（15～25℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

※(例)  YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112