

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント 70878000

IPテンプレート

*【禁忌・禁止】

- 1) 本材又はグラスアイオノマーセメント・ポリカルボキシレートセメントに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- * 2) 本材又はグラスアイオノマーセメント・ポリカルボキシレートセメントに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

【構成】

構成	性状	成分
粉	粉	酸化亜鉛、シリカ、添加材、ガラス粉末、酸化マグネシウム、その他
液	液	アクリル酸-トリカルボン酸共重合体ナトリウム塩水溶液、精製水、りん酸

【原理】

粉と液を混合練和することにより、ガラス粉末とアクリル酸-トリカルボン酸共重合体ナトリウム塩水溶液が反応して硬化する。

【使用目的又は効果】

歯科修復物又は暫間修復物を、口腔内硬組織又は歯科用インプラントのアパットメント等に密着させるための仮合着材（仮着材）に用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 粉液の採取（標準 粉：液比、1.8g：1.0g）
粉量計 1 杯分に対して、液 2 滴を紙練板又はガラス練板上に取り出します。
- * 2) 練和
粉を 2 等分し、液の中へ半分を加えてスパチュラで 10 秒～15 秒間練和し、残りの半分を加え同様に練和します。総練和時間は 30 秒以内とします。
練和温度条件：室温（23±1℃）
練和時間：30 秒以内
操作時間：練和開始から 2 分 30 秒（室温 23±1℃）
硬化時間：口腔内装着後、約 3 分 30 秒※
※ 測定は JIS T 6609-1：2005 歯科用ウォーターベースセメント-第 1 部：粉液型酸-塩基セメントに準拠する。
- 3) 仮着
 - ①仮着
歯科修復物又は暫間修復物に練和物を塗布後、以下の状態に保った支台歯（歯質、その他）にその修復物を圧接して仮着します。
 - ・歯質：乾燥させず濡れた状態（濡れている状態が目視で確認できる程度）
 - ・その他の支台歯：乾燥させた状態
 - ②余剰セメントの除去と硬化
口腔内に仮着後、2 分 30 秒～5 分の間に、余剰セメントを除去し、硬化するまで保持させます。但し、余剰セメント泥を水銃により除去する場合は、仮着後、30 秒以内に洗い流し、硬化するまで保持します。
 - ③除去
一定期間後、仮着した修復物を除去し、最終修復処置を行います。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- * 1) 操作可能時間は、室温が 23℃より高い場合は短くなり、23℃より低い場合は長くなるので注意すること。
- * 2) 粉を採取する際は、付属の粉量計を用いてすり切ることにより計量すること。
- * 3) 液を採取する際は、容器を逆さにして気泡を抜いてから計量すること。

- 4) 正しい計量のために、液容器のノズルに附着した液は、湿ったガーゼなどで拭き取ること。
- * 5) 粉及び液の容器は、使用後すぐに密栓すること。特に粉は、湿気に触れないように注意すること。
- * 6) 露髄又は窩洞が歯髄に近接した場合は、水酸化カルシウム製剤等を用いて歯髄保護を行うこと。

*【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- * 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- * 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- * 3) 粉、液又は練和物との接触による過敏症を防ぐため、医療用（歯科用）手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、口腔軟組織や皮膚に附着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭いた後、大量の流水で洗浄すること。
- * 4) 粉、液又は練和物が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 5) 本材は遊離シリカを含有します。遊離シリカは、長期にわたって吸入すると肺が損傷される可能性があります。粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。


【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本材は、高温、多湿、直射日光及び火気を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本材の使用期限は包装に記載のとおり。
[当社データによる]

※（例） YYYY-MM-DD は→使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112