



インプラント・プロビジョナルクラウン用仮着セメント  
**IP テンプセメント**



**IP**

# Temp Cement

被膜厚さ 10  $\mu$ m

インプラントに適したテンポラリーセメント!!



**SHOFU INC.**

# Q IP テンプセメントってどんなセメント？

A  
インプラント処置において重要なポイントである  
上部構造体の浮き上がりを抑制できるテンポラリーセメントです。

## 操作性

### 1. 練和性向上

液材の粘度を抑え、粉材と液材のなじみを良くしました。

### 2. 余剰セメントの除去が容易

CASE1  
探針での除去



シャープに硬化するため、探針による一括除去が可能です。

CASE2  
水銃での除去




探針での除去が困難な場合も水銃による除去が可能です。

## 審美性

セメントの色調に経時的変化がほとんど無いため、暫間修復物等の色調に影響を与えません。

セメント除去後の歯質の色調にも影響を与えないため、最終補綴装置の審美性を阻害しません。

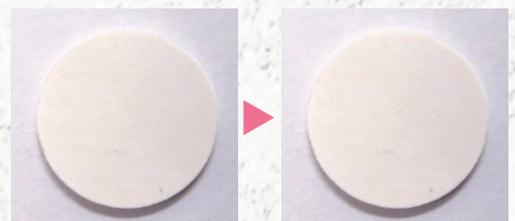

練和開始1.5時間後  
(37℃水中浸漬)

練和開始4週間後  
(37℃水中浸漬)

その理由は…


被膜厚さ  $10\mu\text{m}$  !\*

薄いセメント層を形成できます。

しかも、

硬化がはじまるまでの間、どのタイミングで圧接しても  
被膜厚さはほとんど変わりません。


【被膜厚さの経時的変化】  
(室温23℃)

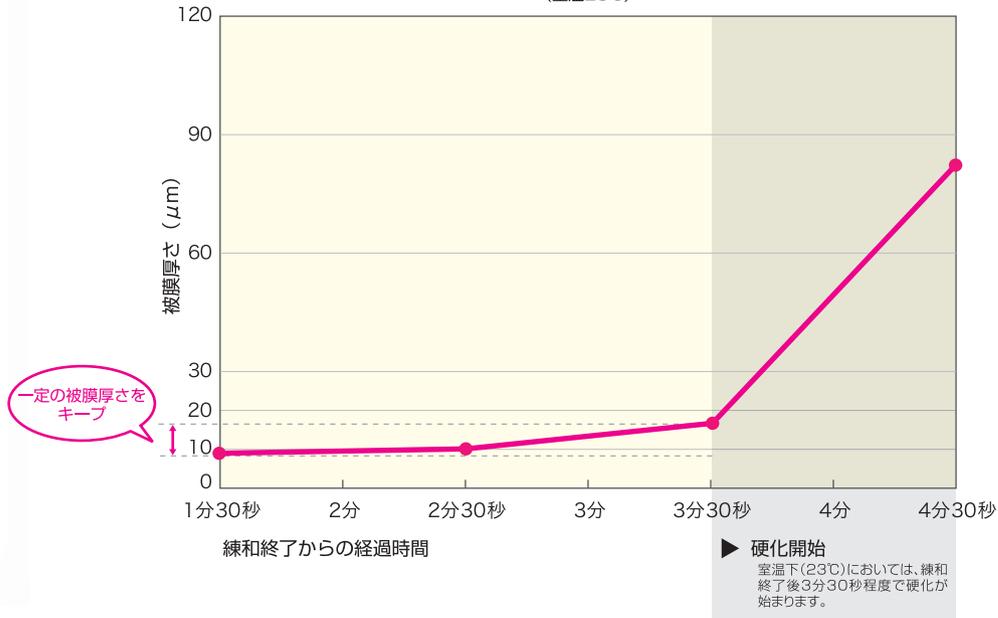

+ α

フッ素リリース&リチャージ機能

IPテンプセメントに含有しているS-PRGフィラーはフッ素など6種類のイオンを徐放します。また、フッ素入りの歯磨剤などを使用することで再びフッ素をリチャージすることが可能です。

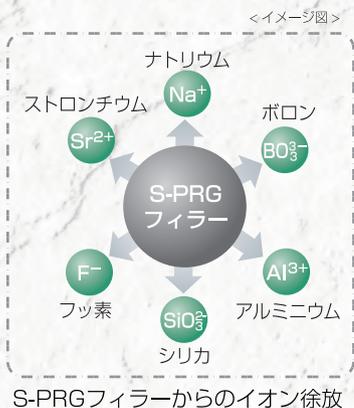

& more


もちろん、インプラント処置以外にも  
ご使用いただけます。

〈例〉  
プロビジョナルクラウンの仮着



# TIME SCHEDULE

操作時の目安としてご参照ください

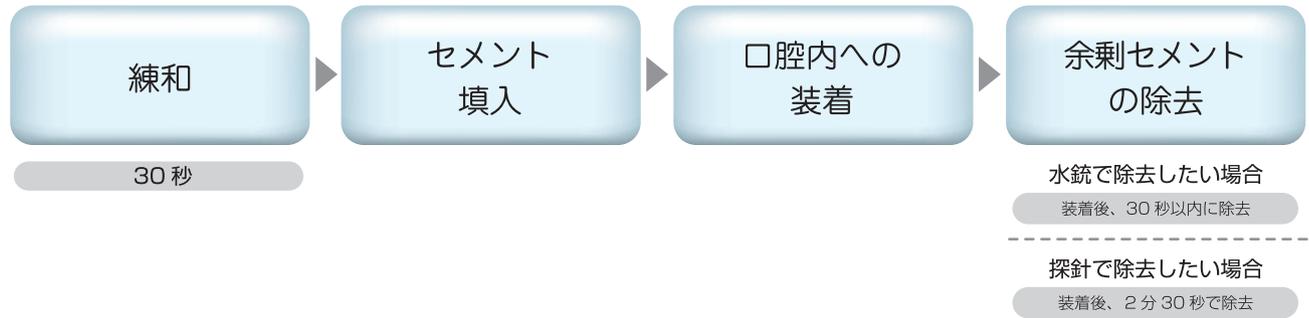

## 包装・価格



### IPテンプレメント 1-1セット……

<内容>  
粉 45g 液 26mL(30g)  
粉量計 1 紙練板 1

#### ■販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
IPテンプレメント	歯科用多目的ガラスボリアルケノエートセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 222AKBZX00094000



粉 45g……  
(粉量計付)



液 26mL(30g)……



セメント紙練板  
60枚綴り 6冊1箱……

## 関連製品

### ■ 最終補綴装置の合着、接着に

管理医療機器 認証番号  
21600BZZ00410000



合着用ガラスイオノマー系  
レジンセメント  
**ハイボンド レジグラス**  
歯科合着用ガラスボリアルケノエート系  
レジンセメント  
(1-1セット)  
<内容>  
粉 15g、液8.6mL(10g)  
粉量計1、紙練板1

管理医療機器 認証番号  
303AFBZX00025000



審美修復用接着性レジンセメント  
**レジセムEX キット**  
歯科用セメントキット

<内容>  
ペースト クリア5.0mL(9.2g) 2、  
ビューティボンド Xtreme(5.0mL) 1、  
松風ミキサーチップ(ショート)……20、  
ディスプレイブラシ ファイン(ピンク)……50、  
松風Vディッシュ……25、ステップカード

カタログに記載の価格は2023年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店