

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科接着・充填材料用表面硬化保護材 70858000

松風バニッシュ

【禁忌・禁止】

- 1) 本材又はアセトンに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材又はアセトンに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[成分]

性状	成分
液	ロジン、アセトン、エタノール

[原理]

歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント、歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメントの硬化時において、その表面に本材を塗布することにより水分との接触を防ぎ、セメント表面の硬化を促進又は保護する。

【使用目的又は効果】

歯科接着・充填材料の表面の硬化促進又は保護に用いる。

* 【使用方法等】

[使用方法]

- 1) 歯科充填用グラスポリアルケノエートセメントの場合
通法により充填した歯科充填用グラスポリアルケノエートセメント表面のつやが消えた時点で本材を塗布し、飛散させない程度のエア乾燥を行います。セメントが十分に硬化したことを確認後、通法により翌日以降に注水下で充填物の形態修整及び研磨を行います。
- 2) 歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメントの場合
通法により充填した歯科充填用グラスポリアルケノエート系レジンセメントを光硬化させてから本材を塗布し、飛散させない程度のエア乾燥を行います。セメントが十分に硬化したことを確認後、通法により注水下で充填物の形態修整及び研磨を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 本材は変色する可能性があります。品質には問題はありません。
- 2) 本材は揮発成分を含むため、使用后直ちに容器を密栓すること。

* 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- * 1) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- * 2) 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 3) 本材はエタノールやアセトンを含んでいるため、換気の良い場所で使用すること。万一本材の蒸気を吸引して気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の中で暖かくして休憩すること。
- 4) 本材は可燃性であるため、必ず火気を避けて使用すること。
- * 5) 本材との接触による過敏症を防ぐため、医療用（歯科用）手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿等で拭いた後、大量の流水で洗浄すること。なお、医療用（歯科用）手袋は本材の直接的な接触を防ぐが、一部のモノマーが短時間のうちに浸透することが知られているので、本材が付着した場合は直ちに手袋を捨て、流水で充分洗浄すること。
- * 6) 本材が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、高温、多湿、直射日光、火気等を避けて、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・本材は、歯科の医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112