

機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000
松風イントラオーラルチップ



再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

〔形状・種類〕

種類	形状	全長(mm)
SS		22.7
XS		16.0

〔材質〕

高密度ポリエチレン

〔原理〕

ミキシングチップ内で練和された歯科材料（印象材料、セメントなど）が本イントラオーラルチップを通して細部に押し出される。

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料、セメントなど）の練和物を細部へ押し出すため、ミキシングチップの先端に装着して使用する。

【使用方法等】

〔使用方法〕

松風ミキシングチップの先端に、対応する種類の本器を押し込み装着します。練和物の押し出し量、出方を調整する場合は、ノズル先端をカッターナイフなどで切断します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 松風ミキシングチップ SS には本器 SS が、松風ミキシングチップ XS には本器 XS が確実に装着されていることを確認してから印象採得を行うこと。
- 2) カートリッジに松風ミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから印象採得を行うこと。
- 3) 無理な力や角度で装着を行わないこと。
- 4) 本器を用いる場合、接合部に手指を挟まないように注意すること。
- 5) ノズル先端は尖形であるので取扱時には注意すること。
- 6) 練和物を急激に押し出すと、カートリッジ、ノズルが割れる恐れがあるので、静かにカートリッジディスペンサーのハンドルを握って練和物を押し出すこと。
- 7) 単一患者のみに使用すること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 1) 消毒用エタノール、歯科用ウエットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
- 2) 本器を使用する際は、割れ、ヒビ、曲がり、キズ・汚れ等があるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本器は、直射日光を避けて保管すること。
- ・本器は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 075-561-1112