

機械器具 6 6 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000

松風ミキシングチップ

再使用禁止


【禁忌・禁止】
再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

*【形状・種類】

種類	ミキシングエレメント (羽根)の数(枚)	固定用キャップ		全長 (mm)	先端の 内径 (mm)
		色	外径 (mm)		
L	11	緑	16.0	88.5	4.9
S	12	桃		82.5	4.9
SS	12	黄		69.5	3.7
XS	12	茶	11.8	46.2	2.2

【構造】

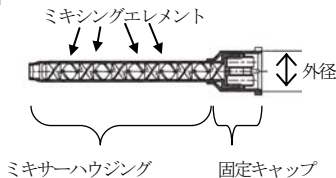

【材質】

- ミキサーハウジング：ポリプロピレン
- 固定キャップ：ポリプロピレン
- ミキシングエレメント：ポリアセタール

【原理】

カートリッジから押し出された歯科材料（印象材料、セメントなど）がミキシングチップ内にあるミキシングエレメント（羽根）によって練り合わされる。

【使用目的又は効果】

歯科材料（印象材料、セメントなど）の練和に使用する。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) カートリッジを松風カートリッジディスペンサーに装着します。
- 2) カートリッジのキャップを反時計回りに1/4回転させてから下方方向に取り外し、松風カートリッジディスペンサーのハンドルを手前に少し引いてペーストを少量押し出し、カートリッジ先端より2種のペーストが均等に出ることを確認します。
- 3) 松風ミキシングチップのV字突起をカートリッジ先端のV字部に合う様に装着し、しっかりと奥まで押し込みます。装着後、松風ミキシングチップの固定用キャップ部をカートリッジに対して時計方向に1/4回転させて確実に装着します。
- 4) 松風カートリッジディスペンサーのハンドルを数回操作し、練和物を押し出します。使用後は松風ミキシングチップがそのままキャップの代わりになります。松風ミキシングチップ交換の際は、キャップと同様に松風ミキシングチップの固定用キャップ部を反時計回りに1/4回転させてカートリッジ先端のV字部に合わせ、下方方向に取り外します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本器の固定用キャップの外径に適合するカートリッジに装着すること。
- 2) カートリッジに松風ミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから印象採得を行うこと。
- 3) 無理な力や角度で装着・脱着を行わないこと。
- 4) 本器を用いる場合、接合部に手指を挟みこまないように注意すること。

- 5) 練和物を急激に押し出すと、カートリッジ、ノズルが割れる恐れがあるので、静かにカートリッジディスペンサーのハンドルを握って練和物を押し出すこと。
- 6) 単一患者のみに使用すること。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 1) 消毒用エタノール、歯科用ウェットティッシュ以外での薬液を使った清拭は避けること。
- 2) 本器を使用する際は、割れ、ヒビ、曲がり、キズ・汚れ等があるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ・本器は、直射日光を避けて保管すること。
- ・本器は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町11
電話番号 075-561-1112