

機械器具 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用注入器具 70718000

## SU スタットチップ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状、構造及び原理等】

[形状・構造]

- ・SU スタットチップ M



種類	製品名	原材料
M	SU スタットチップ	ポリプロピレン ステンレススチール ポリスチレン

### 【使用目的、効能又は効果】

本品は、歯科材料を口腔内又はトレーに注入するために用いる。

### 【品目仕様等】

外観等にキズ、錆、バリ、その他使用上有害な欠陥が無いこと。

### 【操作方法又は使用方法等】

使用方法（例）

1. シリンジのキャップをはずす。
2. シリンジの先端に本品を回しながらしっかりと取り付ける。
3. 口腔内に使用する前に流出性のテストをする。
4. 各材料の取扱説明書に従って材料を塗布する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用注意

- (1) 本品を所定の用途・用法以外には使用しないこと。
- (2) 本品は歯科医療従事者のみ使用すること。
- (3) 使用中にチップが外れないよう、チップはしっかりとねじって取り付けること。
- (4) チップをつけた状態で、口腔内に使用する前に、材料の流出具合を確認すること。
- (5) 材料がスムーズにチップから注出されない場合は、チップを交換すること。

#### 2. 不具合・有害事象

本品の使用によって起こる不具合は以下のとおりである。

##### (1) 重大な不具合

以下のような不具合が現れた場合は、適宜、必要な処置を行うこと。

- ・破損、折損
- ・動作不良

### 【包装】

[単品包装]  
チップ 20 個

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]  
常温保管

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]

ULTRADENT JAPAN 株式会社

〒151-0071 東京都渋谷区本町一丁目7番5号 初台村上ビル4階

電話番号 0120-060-751

[製造業者]

ウルトラデント プロダクツ インク

ULTRADENT PRODUCTS, INC. (米国)

[販売業者]

株式会社 松風

〒605-0983 京都府京都市東山区福稲上高松町11

電話番号 075-561-1112

※ 本添付文書は予告なしに変更することがあります。