



硬質レジン歯(白歯)

ベラシア SA ポステリア

キュービックパック



ベラシア SA ポステリアが、ありそうでなかった新しいカタチの人工歯プレートで新登場！



健保適用品

Veracia SA POSTERIOR

³ : Quick Quality Quartet

Q pack

TIME SAVING!

キュービックパック

ベラシア SA ポステリア

キュービックパック

硬質レジン歯(白歯)

意匠登録済

PAT出願中

パッケージで
排列!?



SHOFU INC.


パッケージのまま排列できる。 それが人工歯プレートの新しいカタチ キュービックパック 「Q³pack」です。

もっと楽に排列したい、作業効率を上げたい、人工歯についたワックス除去の手間を省きたい。技工作业で誰もが考える「あったらいいな」が、キュービックパックというカタチになりました。



排列時間を大幅短縮


4 歯一度に排列できるから、排列時間を大幅に短縮できます。排列しやすく調整に手間のかからないベラシア SA ポステリアですが、キュービックパックで排列すると更なる時間短縮が可能です。

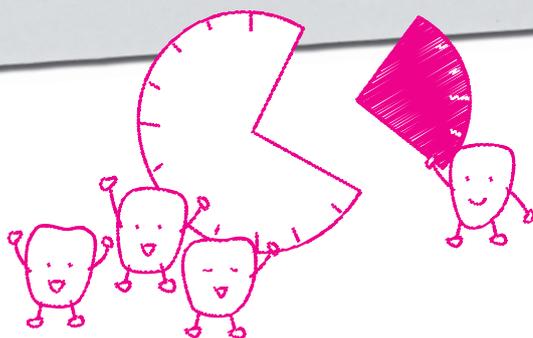

人工歯がベタつかないワックスフリー

キュービックパックはワックスを使用していない人工歯プレートです。ワックスによるベタつきが無く、快適にご使用いただけます。

4 歯一度にカンタン排列

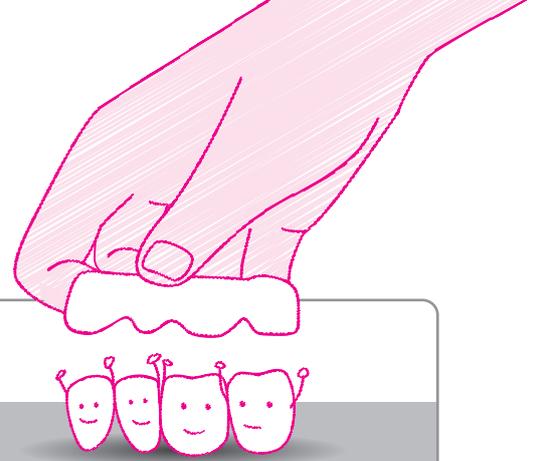

1 置いて

排列基準を目安にキュービックパックを置き、ワックスで仮留めします。



2 調整して

キュービックパックの持ち手の部分が左右ともに同じ高さかつ、仮想咬合平面に対して平行になるよう調整します。



3 固定するだけ

人工歯をパラフィンワックスで固定します。



取り外しもカンタン

完成！

キュービックパックで設定している排列湾曲は目安です。キュービックパックでの排列後、人工歯排列の最終的な調整を行なってください。

※ 詳しい排列方法は、製品に添付の使用手順書をご参照ください。

排列後は 1 歯ごとに自由に調節できます。

単独歯ですので、4 歯一度に排列した後は、必要に応じて 1 歯ごとに調節いただけます。



販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ベラシア SA ポステリア	硬質レジン歯	管理医療機器 医療機器認証番号 220AKBZX00079000

包装・価格

硬質レジン歯(白歯)

ベラシア SA ポステリア **キュービックパック**



12組入り包装

1箱12組

【色調】2色:A2、A3

【形態】上下顎各3種:S28、S30、S32




30組入り包装

1箱30組

【色調】1色:A3

【形態】上下顎各2種:S28、S30

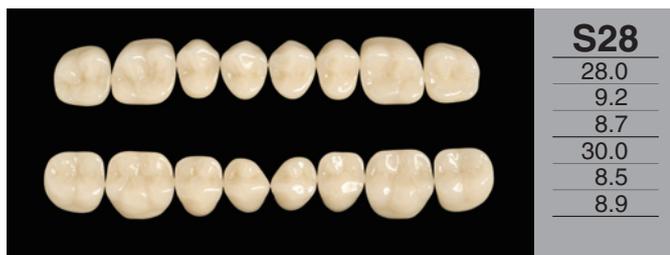

S28

28.0
9.2
8.7
30.0
8.5
8.9



S30

30.0
9.9
9.4
32.5
9.3
9.5



S32

32.0
10.6
10.0
34.5
9.9
9.9

白歯寸法表示の読み方(mm)

形態

上顎	①片側4歯全幅径 ②第一小白歯の長径(カラーを除く) ③第一大臼歯の頬舌径	下顎	④片側4歯全幅径 ⑤第一小白歯の長径(カラーを除く) ⑥第一大臼歯の頬舌径
----	---	----	---

関連商品



ベラシア SA アンテリア □
1組 1箱16組



ベラシア SA ポステリア ⊕
1組 1箱12組

カタログに記載の価格は2011年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

<http://www.shofu.co.jp>

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595