




歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)
松風ビューティボンド ユニバーサル

Official partner



ファイラー
HEMA **無**配合

テクニカルエラーの抑制にこだわった
1液性アドヒーズ

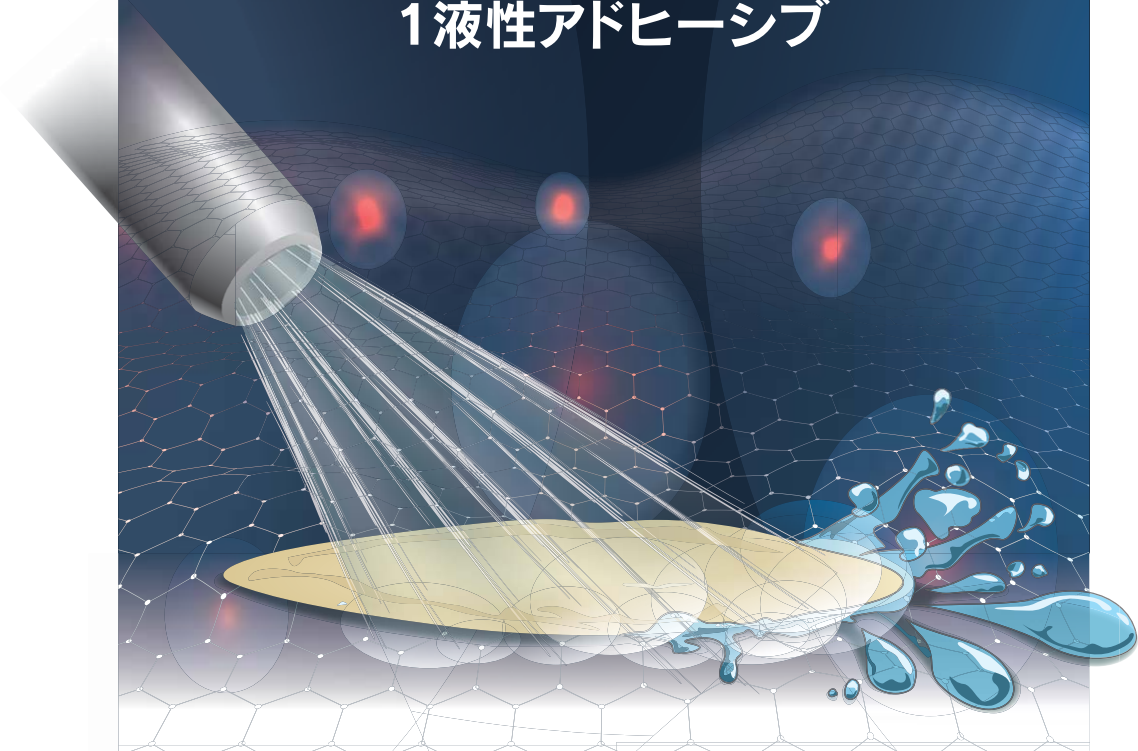

BeutiBond
Universal

コストパフォーマンスにすぐれた
トリプルパックもご用意!



SHOFU INC.

安定した接着を追求し、フィラー無配合、疎水性モノマーを採用!

●フィラー無配合

オールインワンアドヒーズは、塗付後のエア乾燥時に残留した水の量が多いと接着力が低下します。フィラー無配合によりアドヒーズの粘度を抑え、水の除去を容易にします。

●HEMA無配合

水との親和性が高い親水性モノマー(HEMA)を配合していないため、アドヒーズへのエア乾燥によって、モノマー成分と水を容易に分離・除去できテクニカルエラーを抑制します。

イメージ図

均一なアドヒーズ層(塗布時)
モノマー・アセトン・水が相溶している

歯面

フィラー無配合のため粘性が低く、歯面に塗布したアドヒーズ層が薄い

不均一なアドヒーズ層
アセトンの蒸発によりモノマーと水が分離する

弱圧エア乾燥

アセトンエア乾燥によって蒸発

歯面

水と親和性の高いモノマー成分を含まないためにアセトンを蒸発させることでモノマー成分と水が容易に分離する

均一なアドヒーズ層

強圧エア乾燥

強圧エアによって水が除去される

均一なアドヒーズ層が形成される

歯面

強圧エア乾燥により、水を除去することができ、水を含まない均一なアドヒーズ層が形成される

イメージ写真

①滴下直後

②弱圧エア乾燥後

アセトンが蒸発してモノマー成分と水が分離し、水が表面に浮き出てくる。

③強圧エア乾燥後


硬化を阻害するアドヒーズ中の水が容易に分離・除去できます。

動画
(QRコードにアクセス)

モノマーと水の分離のしやすさ

エア乾燥時にアドヒーズが飛散しにくい

エア乾燥時に、アドヒーズが隣在歯に飛び散りにくいよう設計されているため、MI窩洞の症例でもスムーズな診療が可能です。

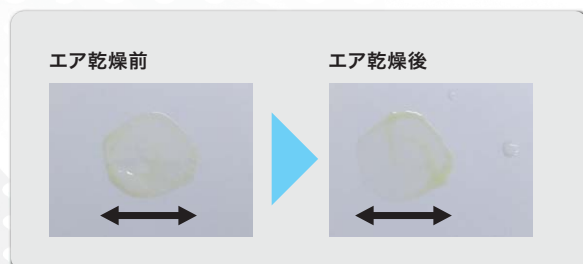


UNIVERSAL

安定した接着性に加え、強さ、 使いやすさ、美しさをプラス!

strength
強さ

エナメル質、象牙質に対して2ステップ接着システム (フルオロボンドII) に迫る接着力を有します。

初期接着性 (24時間後)

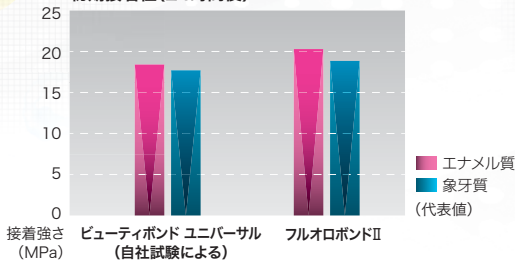


ease of use
使いやすさ

煩雑な操作 (2回塗布、混和等) を必要とせず、トータル25秒*のスピーディーな接着操作が可能です。 ※LED照射器使用時




各種被着体に安定した接着強さを示します。

初期接着性 (24時間後)

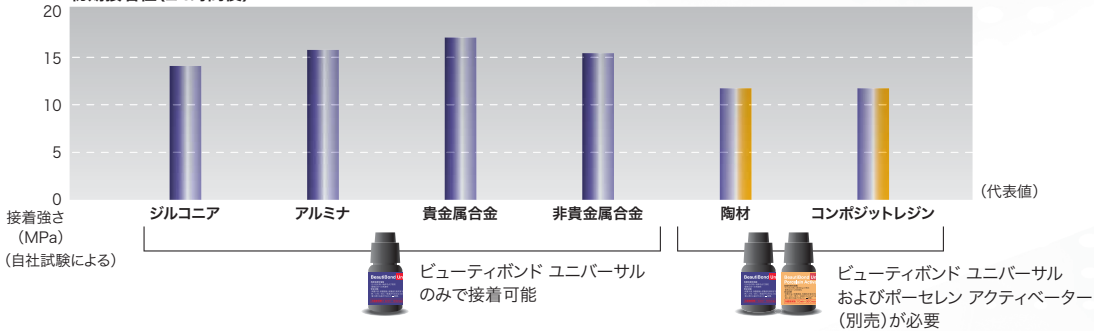


beauty
美しさ

審美修復に適した薄膜のアドヒーズ層を形成します。

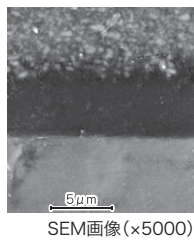


ビューティフィル フロー プラス X
アドヒーズ層 (ビューティボンド ユニバーサル)
象牙質

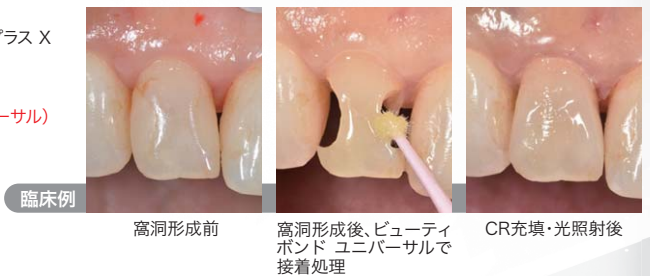

ビューティフィル フロー プラス Xに配合したS-PRGフィラーから徐放されるイオンが、ビューティボンド ユニバーサルのアドヒーズ層を通過することを確認しています。

松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラーです。6種類のイオンリリースにより、抗プラーク付着性の他、酸中和能の発現や、エナメル質の脱灰を抑制することが報告されています。

**S-PRG
フィラー II**
フッ化物を含む
6種類の
イオンリリース

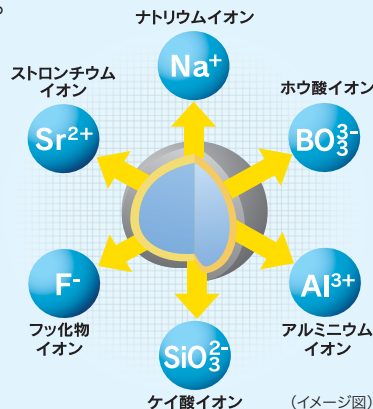

S-PRGフィラー含有フロアブルコンポジットレジン ビューティフィル フロー プラス X

詳細はWebで



レジンセメントやレジンコア材料との併用が可能な多目的接着システム

充填修復やリペアの用途だけでなく、レジンセメントやレジンコア材料の前処理材としても使用可能です。
※レジンセメント、レジンコア材料との併用の場合、DCA(別売)が必要です。



ラミネートベニア用レジンセメント
ビューティセム ベニア



CAD/CAM用レジンブロック対応レジンセメント
ブロックHCセム



接着性レジンセメント
レジセム



レジン支台築造システム
ビューティコアキット EX

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ビューティボンド ユニバーサル	歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)	管理医療機器 医療機器認証番号 230AFBZX00001000

包装・価格



ビューティボンド ユニバーサル

ビューティボンド ユニバーサル 1セット

【セット内容】

ビューティボンド ユニバーサル 6.0mL 1、ディスポブラシファイン(ピンク) 50、松風Vディッシュ 25



レジンセメントやレジンコア材との併用時に使用

ビューティボンド ユニバーサル DCA

3.0mL

コンポジットレジン・セラミックス(シリケートガラス・リチウムシリケートガラス)用処理材

ポーセレン アクティベーター

3.0mL

【単品販売】ディスポブラシファイン(ピンク) 100本
松風Vディッシュ 25枚



関連商品



S-PRGフィラー含有フロアブルコンポジットレジン
ビューティフィル フロー プラス X
2.2g
(付属品:松風ニードルチップ(Thin Wall 20G)5個付)

ラミネートベニア用レジンセメント
ビューティセム ベニア キット

CAD/CAM用レジンブロック対応レジンセメント
ブロックHCセム
ハンドミキシング セット
オートミキシング セット

接着性レジンセメント
レジセム ベーシックセット

レジン支台築造システム
ビューティコアキット EX



歯科重合用光照射器
ペンブライト
一式

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2018年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店