



歯面コーティング材
ビューティコート

Official partner



手軽に白い歯体験！

BeautiCoat

ビューティコートは歯を削ったり、ホワイトニング材のように薬剤を使用することなく白い歯を体験できる審美治療ツールです。

即日で処置を終えることも可能ですので、お急ぎの方にもご対応いただけます。

また、元に戻したい場合もすべて除去できますので、患者さまに気軽に白い歯を体験していただけます。

SHOFU INC.

★ どうやって歯を白くするのですか？

充填用コンポジットレジンベースとしたペーストを歯面に一層コーティングすることで、白く見せることができます。即日で処置することも可能です。

除去したい場合もBCアプリケーターで剥がすだけでもとの状態に戻ることができるため患者さまに、手軽に白い歯を体験していただけます。

※咬合接触部位および下顎には適用できません

詳しい使用方法是
こちらを CHECK!



写真提供：秋本 尚武 先生（秋本歯科診療所）、大森 かをる 先生（鶴見大学歯学部）

★ 歯質への影響はありませんか？

充填用コンポジットレジンベースとしたペーストを使用していますので、安全です。


プライマー処理による脱灰レベルは軽微であり、またペースト除去も比較的容易に行うことができるため、歯質へのダメージはほとんど認められません。

+ one point **GIOMER**
Technology

ビューティコート のペーストに含まれるS-PRGフィラーにはフッ素のリリース&リチャージ機能があります。

※適用期間中にフッ素の塗布やフッ素含有ハミガキなどを使用することで材料にフッ素がリチャージされるため、長期にわたり、フッ素の徐放を継続することが可能となります。

※松風では独自技術S-PRGフィラーを含む材料群を「GIOMER」とカテゴライズしています。

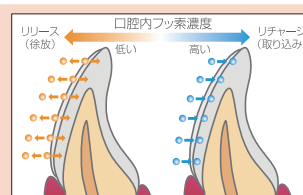


★ 適用後どのくらい効果が持続しますか？

適用箇所や生活習慣等により個人差はありますが、1～3ヶ月程度効果を持続できます。*

臨床で使用されているフロアブルタイプのコンポジットレジン（ビューティフィル フロー）と同程度の物性を有しています。また、少々剥がれであればリペア（修復）できますので、定期健診を行うなど、患者様に定期的に足を運んでいただくことで、より長く白さを保つことが可能です。

※咬合状態（噛み合わせ）や食生活によっては早期に剥がれる場合もあります。

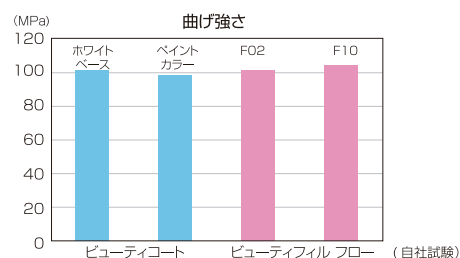

包装・価格

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティコート	歯面コーティング材	管理医療機器 医療機器認証番号 220AIBZX00100000
ビューティコート BCアプリケーター	歯科用充填器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000207

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティコート グロスリファイン	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000205
ビューティコート バフディスク	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000206



ビューティコート ベーシックセット 一式

【内容】ホワイトベース 2g:2色 (BW2、BW3 各 1)、プライマー A 3mL、プライマー B 3mL、グロスメーカー 6g、グロスリファイン 6.5g、BC アプリケーター 1、バフディスク 25 (専用マンドレル 2 本付)、シールドキャップ 2、ディスボブラシ丸筆 50 (チップホルダー 1 本付)、プチディッシュ 1、ニードルチップ 25、カラーテーブル 1、ステップカード 1

●単品販売

ビューティコート ホワイトベース 2g (松風ニードルチップ 5 個付)
 ビューティコート ホワイトオパール 2g (松風ニードルチップ 5 個付)
 ビューティコート ペイントカラー 2g (松風ニードルチップ 5 個付)
 ビューティコート グロスメーカー 6g (松風ニードルチップ 5 個、シールドキャップ 1 個付)
 ビューティコート グロスリファイン 6.5g (松風ニードルチップ 5 個、シールドキャップ 1 個付)
 ビューティコート プライマー A 3mL ビューティコート プライマー B 3mL
 ビューティコート アクティベーター 3mL ビューティコート BC アプリケーター 1 本
 ビューティコート バフディスク 25 個 (専用マンドレル 2 本付)



※印刷のため、色調は実物と異なります。

取扱店

カタログに記載の価格は2023年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
 ●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595