



光重合型コンポジットレジン オペーカーク
ビューティファル オペーカーク

Official partner



天然歯にも金属にも
均一な塗布性と高い遮蔽力

BEAUTIFIL OPAQUER

ビューティファル オペーカーク
光重合型コンポジットレジン オペーカーク



SHOFU INC.

ビューティフィル オペーカーは、遮蔽力と硬化性にすぐれたオペーカーです。
使いやすいシリンジや程よい稠度に設定されたペースト性状、ニードルチップを用いて
直接、部位に塗布できるなど、使いやすさを追求しました。
2色の色調で審美性にもすぐれ、さまざまな症例に対応可能です。

高い遮蔽力と硬化性の調和

着色フィラーの効果により、高い遮蔽力と硬化性を実現しました。
薄い層でも遮蔽力を発揮します。





UO(ユニバーサルオペーク)
着色歯質などの遮蔽に適しています。

LO(ライトオペーク)
補綴物リペア時の金属部などの遮蔽に適しています。

松風独自の技術〈すぐれた発色性〉

オペーカーは顔料を多く含むためにペースト性状が経時的に変化し、色ムラが生じます。当社は種々のフィラーと同様に顔料の表面を改質することにより、顔料の凝集防止と均一な分散が可能となった着色フィラーを考案しました。その結果、ビューティフィルオペーカーは均一で安定したペースト性状によるすぐれた塗布性と、均一な分散状態により、すぐれた発色性を実現しました。

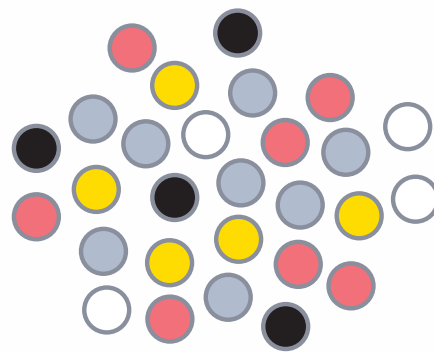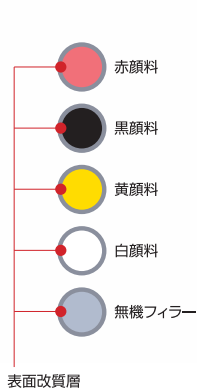

着色フィラーの分散状態モデル

使いやすいシリンジと 薄く均一な塗布性を実現

後ダレのないシリンジはペーストを無駄にせず、かつ使用後のお手入れも簡単です。また、程よい稠度に設定されたペースト性状と直接、部位に塗布できるニードルチップの採用により、色ムラの少ない薄く均一な塗布が可能です。



ニードルチップは Disposable です。

審美的な修復が可能(症例)

LO(ライトオパーク)を使用した症例

後継永久歯欠損部位の変色した乳歯の審美的回復



提供：日野浦 光先生 (日野浦歯科医院)

(ビューティフィルA2+Incシェード使用)

硬質レジン前装冠破折のリペア



提供：秋本 尚武先生 (秋本歯科診療所)

(ビューティフィルA2シェード使用)

UO(ユニバーサルオパーク)を使用した症例

歯肉退縮による露出根面部の修復



提供：猪越 重久先生 (イノコシ歯科医院)

(ビューティフィルA30シェード使用)


高いX線造影性

高いX線造影性を有しているため、天然歯の修復部位が確認できます。

X線造影性

(mmAl)

(代表値)

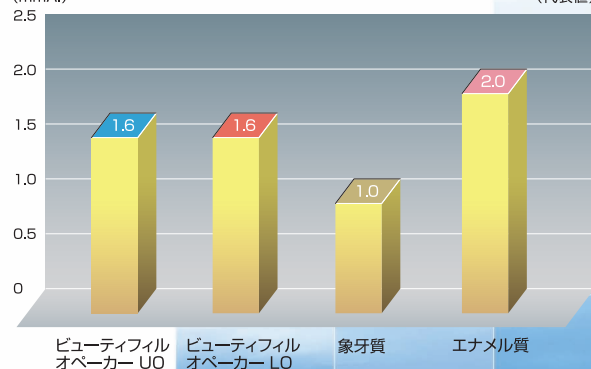

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティフィル オペカー	歯科用色調遮蔽材料	管理医療機器 医療機器認証番号 21700BZZ00012000

包装



ビューティフィル オペカー 2g

(付属品：ニードルチップ5個付)

色調2色：U0(ユニバーサルオペカー)、
L0(ライトオペカー)

<別売品>



松風ニードルチップ
50入

※当品は特定保険医療材料に記載されています。但し、本製品の電子添文の「性能、使用目的、
効能又は効果」の項に記載している内容の中には、現在保険適用外であるものもありますので、
保険診療に用いられる範囲をよく確認してご使用ください。

関連製品

管理医療機器 認証番号
21600BZZ00147000



歯科充填用コンポジットレジン
ビューティフィル フロー

F02 / F10

2g

2g×3本入*

(**F02** A2、A3のみ)

【色調】各7色

※3本入は箱なしの簡易包装です。

管理医療機器 認証番号
229AFBZX00047000



歯科充填用コンポジットレジン
ビューティフィル フロー
プラス X **F00 / F03**

2.2g

2.2g×3本入*

(A2、A3のみ)

【色調】F00/11色、F03/12色

※3本入は箱なしの簡易包装です。

管理医療機器 認証番号
221AKBZX00171000



歯科充填用コンポジットレジン
ビューティフィルⅡ

4.5g

【色調】

12色：A1、A2、A3、A3.5、A4、
B2、B3、C3、A20、A30、
Inc、BW

管理医療機器 認証番号
226AFBZX00106000



歯科充填用コンポジットレジン
ビューティフィル ネクスト

3g

【色調】

12色：A1、A2、A3、A3.5、A4、
B2、B3、C3、A20、A30、BW、Inc

管理医療機器 認証番号
302AKBZX00026000



歯科用象牙質接着材

ビューティボンド Xtreme
1セット

【内容】

ビューティボンド Xtreme 5.0mL、
ディスクブラシ ファイン(ピンク) 50
松風Vティッシュ 25

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595