

歯科材料5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用エッチング材 36153000
松風エナメルコンディショナー

【禁忌・禁止】

本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[構成]

| 構成 | 性状 | 成分 |
|--------------------|----|---------------------|
| 松風エナメル コンディショナー | ゲル | 有機酸、増粘材、着色材、 その他 |

[原理]

歯質(エナメル質)の表面を酸処理することにより歯科用接着材の接着性を高める。

【使用目的又は効果】

歯のエッチングに用いる。

* **【使用方法等】**

[本材と併用する材料]

高分子系歯科小窩裂溝封鎖材：「ビューティシーラント」

高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材：

「ビューティオーソ ボンド」

歯科用象牙質接着材：「フルオロボンド」

「ビューティボンド マルチ」

「フルオロボンド シェイクワン」

歯科充填用コンポジットレジン：「ビューティフィル」

「ビューティフィル フロー プラス」

「ビューティフィル フロー」

「ビューティフィル E ポステリア」

[使用方法]

1) 歯面清掃

通法に従い、歯面清掃を行います。


2) 防湿

ラバーダム等を用い、通法に従い防湿を行います。

* 3) 本材の準備



保管栓を回しながら引き抜きます。

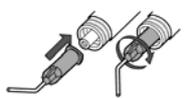

ニードルチップをシリンジ先端部に挿入後、時計回りに回してしっかりと固定します。

4) コンディショナー処理

本材をエナメル質の適用部位に塗布し10秒間放置します。放置後、十分に水洗を行い本材を歯面から除去します。その後、処理面をエア乾燥します。(フッ素塗布剤、次亜塩素酸ナトリウム、又は過酸化水素水の適用から時間が経過していない場合は、放置時間は20秒間を推奨します。)

5) 接着操作

組み合わせて使用する歯科用接着材の添付文書に従い、接着操作を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]


1) ニードルチップを交換する際は、清潔な医療用(歯科用)手袋を着用すること。

2) 処置する際は、排唾管やバキュームを作動させ、口腔内の水、唾液等を吸引すること。

3) 本材を誤飲させないように注意すること。

4) コンディショナー処理した歯面が唾液などにより汚染されないように注意すること。汚染された場合、再度コンディショニングを行うこと。

* 5)

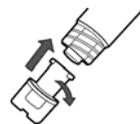

保管時は、ニードルチップを取り外し保管栓をすること。

* 6)



使用後は新しいニードルチップを装着し、キャップ(白)でニードルチップ先端部を保護することができます。(ただし、長時間の保管には保管栓を使用すること。)

7) 使用後は感染防止のため、シリンジ及び保管栓をガーゼ等を用いてアルコールで清拭し、確実に蓋をすること。その際、本材にアルコールが混入しないよう注意すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。

本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。

本材が患者の目や皮膚、あるいは衣類に付着しないような措置を講じること。皮膚や衣類に付着した場合は、直ちにアルコール綿等で拭き取ること。

本材との接触による過敏症を防ぐため、医療用(歯科用)手袋及び保護眼鏡の着用等の防護措置を執ること。また、口腔軟組織や皮膚に付着した場合には、大量の流水で洗浄すること。

本材が万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

ニードルチップは感染防止のため、同一患者のみに使用し、他の患者への再使用はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・本材は、高温、多湿、直射日光等を避けて、室温(1~30℃)で保管すること。

・本材は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

[当社データによる]

(例)  YYYY-XX は 使用期限 YYYY 年 XX 月末日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風

住所 〒605-0983

京都市東山区福福上高松町 11

電話番号 075-561-1112