

① Step by step Porcelain or Resin Crown Repair

ポーセレン&硬質レジン前装冠 破折修復




Masking exposed Metal (金属面露出の場合)




1. Roughen and clean
被着体の粗造化・清掃



2. Apply M.L. Primer
(Leave 10sec.)
メタルリンク塗布
(塗布後10秒間放置)

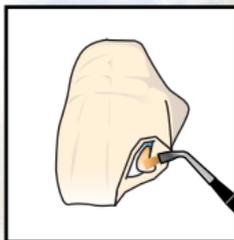

3. Apply Opaque Paste
オパーク処理

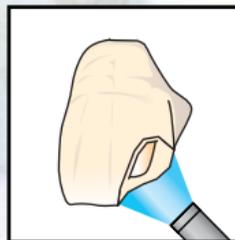


4. Light cure
光重合



Flip this card
表面へ

Non-metal exposed pre-treatment (金属面が露出していない場合)

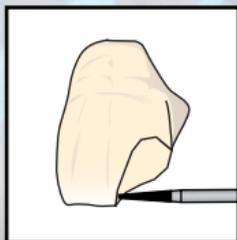

1. Roughen and clean
被着体の粗造化・清掃



Flip this card
表面へ

P&R Repair Kit

SHOFU INC.

② Step by step Porcelain or Resin Crown Repair ポーセレン&硬質レジン前装冠 破折修復


After pre-treatment (前処理後の操作手順)




5. Apply CeraResin Bond I
(Leave 10sec.)
ボンド I の塗布
(10秒間放置)




6. Apply CeraResin Bond II
(Leave 10sec.)
ボンド II の塗布
(10秒間放置)

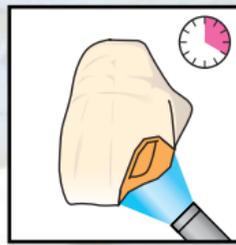


7. Light cure 20sec.
光重合 (20秒間)
(可視光線照射器使用)

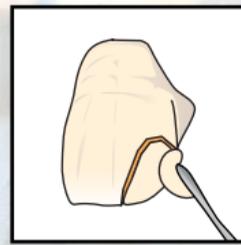

8. Apply composite resin
充填
(コンポジットレジン等)

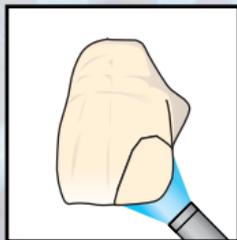

9. Light cure
光重合

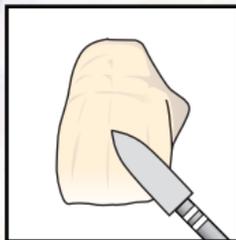

10. Finish and polish
研磨仕上げ

P&R Repair Kit