



常温重合レジン

プロビナイス フロー

# PROVINICE

SELF-CURING ACRYLIC RESIN

## Flow

専用だからこそその操作性

流し込みに特化した常温重合レジン



SHOFU INC.

# 「すぐれた流動性」

流し込み専用のプロビナイス フローなら  
ロングスパンブリッジでも難なく流し込めます



色ムラ、気泡混入も少なく  
美しい仕上がり



インプラントプロビジョナルの製作

## 色ムラが少ない

粉液のなじみがよく、軽い混和でも色ムラが少ない設計です。



混和なし



混和5秒後



混和10秒後

※混和時間は10～15秒が推奨時間です。

## 歯肉色もラインアップ


歯肉色もご用意しており、  
インプラントプロビジョナル、  
コピーデンチャーの製作も可能です。



# [ゆとりある操作時間] & [シャープな硬化]

feature

フロー状態を長く維持できるため、余裕をもって操作していただけます。

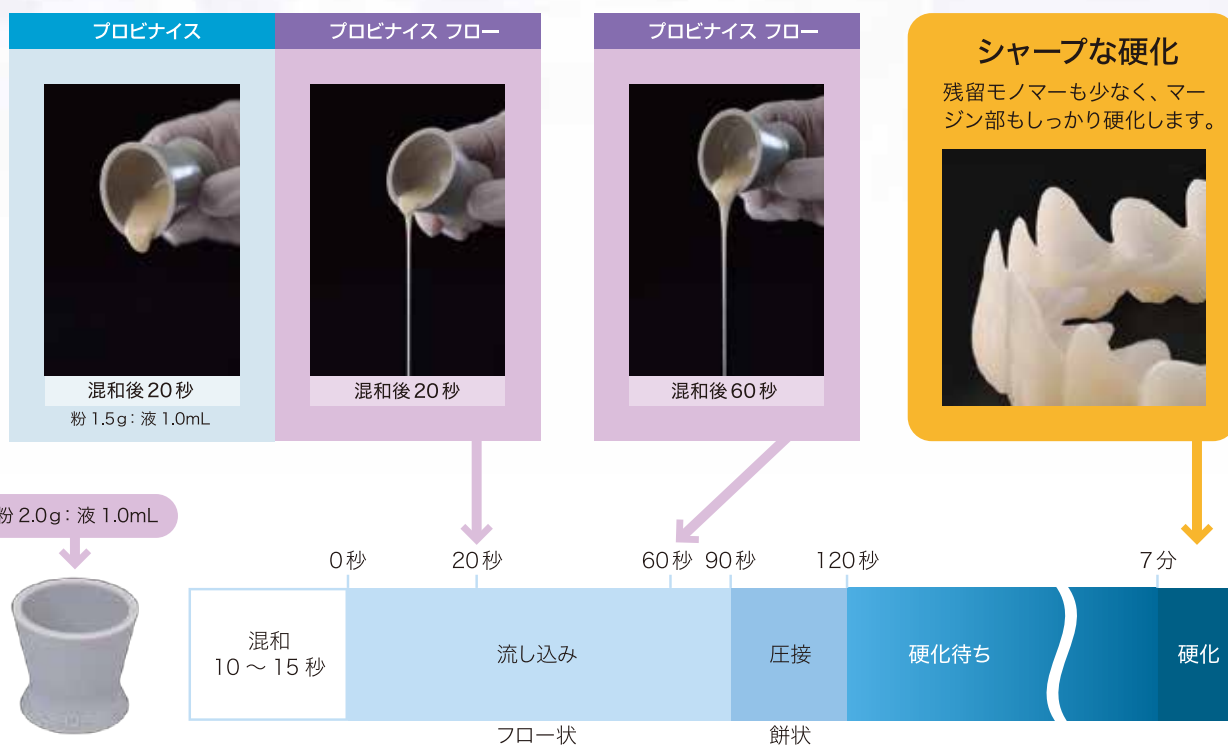


feature

ロングスパンブリッジなど大きな補綴装置に適したすぐれた物性を発現します。


物性

曲げ強さ (代表値)

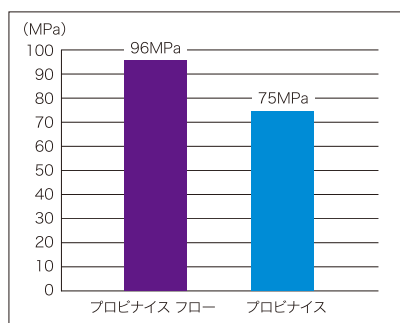


試験方法 JIS T 6518 : 2011 アクリル系歯冠用レジン

ビッカース硬さ (代表値)

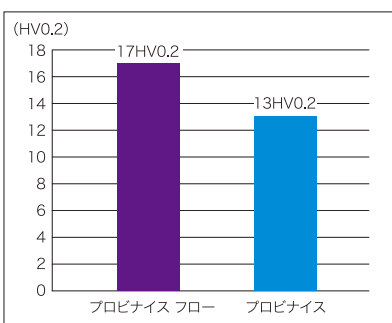

(自社独自試験方法)

線収縮率 (代表値)

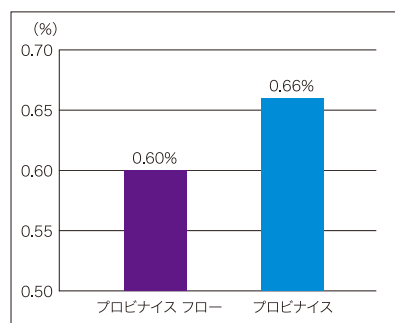

(自社独自試験方法)

プロビナイス フローは粉 2.0g : 液 1.0mL、プロビナイスは粉 1.5g : 液 1.0mL (混和注入法の粉液比) で評価しています。

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
プロビナイス フロー	歯科汎用アクリル系レジン	管理医療機器 医療機器認証番号 228AFBZX00119000
プロビナイス	歯科汎用アクリル系レジン	管理医療機器 医療機器認証番号 21400BZZ00451000


### 流し込み用



#### 常温重合レジン プロビナイス フロー 粉

50g(粉量計付)  
250g(粉量計付)

●色調：3色

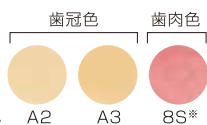

印刷のため色調は  
実物とは異なります。

プロビナイス フロー/プロビナイス 共用液



#### プロビナイス 液

100mL(液用ワンタッチキャップ、液量計、スポイト付)

250mL(液用ワンタッチキャップ、液量計、スポイト付)

液は  
プロビナイス フロー・プロビナイス  
で共用です

プロビナイス ファストの液は使用できません。

### 筆積み・混和用



#### 常温重合レジン プロビナイス 粉

50g(粉量計付)  
250g(粉量計付)

●色調

歯冠色 6色 A1、A2、A3、A3.5、  
Inc(インサイザル)、56  
歯肉色 4色 U2\*、U3\*、8S\*、3S

※は繊維入りの色調です。

## 関連製品

硬化時間が短くチェアタイムの短縮に貢献

管理医療機器 認証番号  
219AIBZX00084000



#### 常温重合レジン プロビナイス ファスト

50g(粉量計付)  
250g(粉量計付)

液用ワンタッチキャップ、スポイト付  
液 100mL  
液 250mL

※液はプロビナイス ファスト専用です。



シリコンゴム混和器  
包装 / 3個

一般医療機器 届出番号  
26BIX00004000213



技工用シリコン印象材(パテ状)  
歯科複製模型用ゴム質弾性印象材料  
松風ラボシリコン  
包装 / セット



分離材  
ハイゾール  
包装 / 80g

管理医療機器 認証番号  
21400BZZ00224000



金属接着性プライマー  
歯科金属用接着材料  
メタルリンク  
包装 / 5mL

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp  
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595