

# ヴィンテージ ハロー の使用適応表



液名	陶材種類	ペースト オペーク	パウダー オペーク	ポディー/ エナメル	マージン	アドオン	液名	陶材種類	ペースト オペーク	パウダー オペーク	ポディー/ エナメル	マージン	アドオン
ヴィンテージ モデリングリキッド		×	×	◎	△ <sup>2)</sup>	△ <sup>2)</sup>	ヴィンテージ ハロー オペーク専用液		×	◎	×	×	×
ヴィンテージ CPM モデリングリキッド		×	×	×	△ <sup>2)</sup>	◎	ヴィンテージ ハロー ペーストオペーク希釈液		◎	×	×	×	×
ヴィンテージ ミキシングリキッド		×	×	◎	△ <sup>2)</sup>	△ <sup>2)</sup>	ヴィンテージ ハロー オペーク専用液 L		×	◎	×	×	×
ヴィンテージ ミキシングリキッド - HC		×	×	◎	△ <sup>2)</sup>	△ <sup>2)</sup>	ヴィンテージ AL/ZR オペークライナーリキッド		△ <sup>1)</sup>	×	×	×	×
ヴィンテージ マージン硬化液		×	×	×	◎	×	ヴィンテージ MP オペーク希釈液		△ <sup>1)</sup>	×	×	×	×
ユニボンド ヴィンテージ オペークリキッド		×	◎	×	×	×							
●ヴィンテージ 黄変防止液ポディー用		×	×	◎	×	×							
●ヴィンテージ 黄変防止液オペーク用		×	◎	×	×	×							

◎… 使用可能

×… 使用不可能

△… 使用条件(乾燥時間など)を変更することで使用可能

1) 乾燥時間を7分以上確実に実施する

2) 乾燥時間を5分以上確実に実施する