

# ヴィンテージ MP の使用適応表



液名	陶材種類	オパーク	ポディー/エナメル	マージン	サービカル トランス/ガム色	アドオン	液名	陶材種類	オパーク	ポディー/エナメル	マージン	サービカル トランス/ガム色	アドオン
ヴィンテージ モデリングリキッド		×	×	×	×	×	ヴィンテージ ハロー オパーク専用液		×	×	×	×	×
ヴィンテージ CPM モデリングリキッド		×	×	×	×	×	ヴィンテージ ハロー ペーストオパーク希釈液		△ <sup>1)</sup>	×	×	×	×
ヴィンテージ ミキシングリキッド		×	◎	△ <sup>2)</sup>	◎	×	ヴィンテージ ハロー オパーク専用液 L		×	×	×	×	×
ヴィンテージ ミキシングリキッド - HC		×	◎	△ <sup>2)</sup>	◎	×	ヴィンテージ AL/ZR オパークライナーリキッド		△ <sup>1)</sup>	×	×	×	×
ヴィンテージ マージン硬化液		×	×	◎	×	×	ヴィンテージ MP オパーク希釈液		◎	×	×	×	×
ユニボンド ヴィンテージ オパークリキッド		×	×	×	×	×							
●ヴィンテージ 黄変防止液ポディー用		×	◎	×	×	×							
●ヴィンテージ 黄変防止液オパーク用		×	×	×	×	×							

◎… 使用可能

×… 使用不可能

△… 使用条件(乾燥時間など)を変更することで使用可能

1) 乾燥時間を7分以上確実に実施する

2) 乾燥時間を5分以上確実に実施する