

# ヴィンテージ ポーセレンセパレーター

## 【形状・構造及び原理等】

主成分:流動パラフィン

## 【使用目的又は効果】

・本品は、石こう支台歯模型から陶材築盛物を離型するための分離材として用いる。

## 【使用方法等】

- ・陶材を築盛する前に、石こう支台歯模型の陶材が接触する部位に付属の筆で適量塗布する。
- ・再築盛する際は、その都度塗布する。

## 【使用上の注意】

### 【使用注意】

- 1) 本材は、可燃性ですので、火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- 2) 本材を使用する際には、適切な換気(1時間当たり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
- 3) 本材は、高温となる場所(ストーブの側、直接日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- 4) 本材は、容器のキャップを取ったままにしておかないこと。
- 5) 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 6) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【重要な基本的注意】

- 1) 本材は直接素手で触れないこと。また、皮膚に付着したり、目に入らないように注意すること。  
皮膚に付着した場合には、すぐにアルコール綿などで拭いた後、流水で洗浄すること。  
万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- 2) 本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・本材は、高温、直射日光を避けて、火気厳禁の屋内に密栓して、室温(1~30℃)で保管すること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・パッケージまたは容器に記載された使用期限内に本材を使用すること。

(記載例:  YYYY-MM-DD→使用期限YYYY年MM月DD日を示す。)

## 【包装】

ヴィンテージ ポーセレンセパレーター 10mL

## 【製造販売業者及び製造業の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町11  
電話番号 075-561-1112



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

<http://www.shofu.co.jp>

本社●〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)