

ヴィンテージ ZR の使用適応表



液名	陶材種類	オベーク ライナー	ボディ / エナメル	マー ジ ン	サー ビ カ ル ト ラ ン ス	アド オ ン	液名	陶材種類	オベーク ライナー	ボディ / エナメル	マー ジ ン	サー ビ カ ル ト ラ ン ス	アド オ ン
ヴィンテージ モデリングリキッド 		×	◎	△ ²⁾	◎	◎	ヴィンテージ ハロー オベーク専用液 		×	×	×	×	×
ヴィンテージ CPM モデリングリキッド 		×	×	△ ²⁾	×	◎	ヴィンテージ ハロー ペーストオベーク希釈液 		△ ¹⁾	×	×	×	×
ヴィンテージ ミキシングリキッド 		×	◎	△ ²⁾	◎	◎	ヴィンテージ ハロー オベーク専用液 L 		×	×	×	×	×
ヴィンテージ ミキシングリキッド - HC 		×	◎	△ ²⁾	◎	◎	ヴィンテージ AL/ZR オベークライナーリキッド 		◎	×	×	×	×
ヴィンテージ マージン硬化液 		×	×	◎	×	×	ヴィンテージ MP オベーク希釈液 		△ ¹⁾	×	×	×	×
ユニボンド ヴィンテージ オベークリキッド 		×	×	×	×	×							
●ヴィンテージ 黄変防止液ボディ用 		×	◎	×	×	×							
●ヴィンテージ 黄変防止液オベーク用 		×	×	×	×	×							

◎… 使用可能

×… 使用不可能

△… 使用条件(乾燥時間など)を変更することで使用可能

1) 乾燥時間を7分以上確実に実施する

2) 乾燥時間を5分以上確実に実施する