


歯科セラミックス用着色材料(ポーセレンステイン)

# ヴィンテージアート

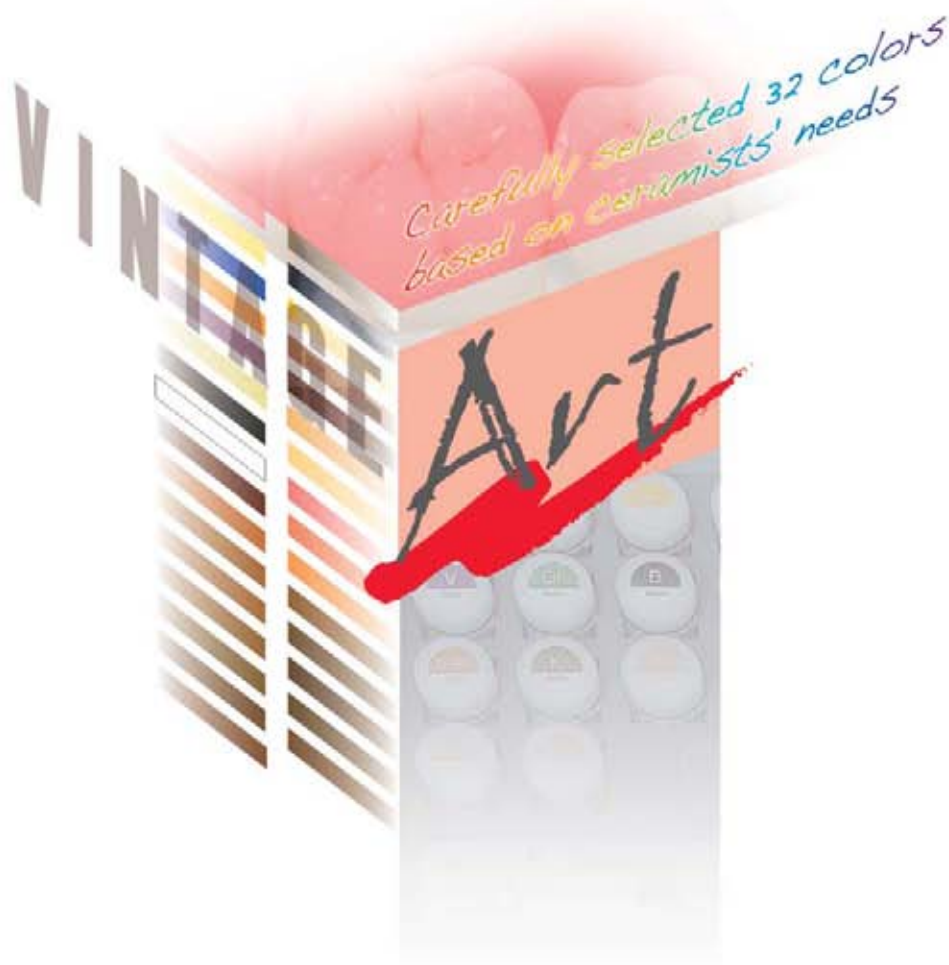

天然歯の色調再現

×

セラミストのニーズ

= ヴィンテージアート

～厳選された全32色のポーセレンステイン～

# VINTAGE Art

## 1 セラミストの日常臨床に役立つ実用的な色調(全32色※)

セラミストのステインパレットに常備されている色調を徹底分析し、必要不可欠な色調を厳選しました。

その結果、天然歯の持つ色調が簡単に再現できる32色※をご用意しました。

特にシェードステインのグループには、セラミックス修復物用の外部ステインとセラミックスフレーム用の内部ステインの2系統を用意し、精度の高い色調再現を可能にしています。※: グレージングペーストを含む



小窩裂溝にブラックブラウンやダークレッドブラウンを使用\*



ヘアライン・クラックライン部にブラウンおよびホワイトを使用\*\*



脱灰部にコーンイエローおよびホワイトを使用\*



マメロン構造部にマメロンピンクを使用



切端部にブルーおよびブルーグレーを使用

### ■ベーシックカラーセット(全17色※) 基本色ステインを中心にしたセット

色調(記号)	イメージ	使用例				
		シェード調整	歯頸部	汚れ	切端部	歯肉色
ピンク(P)		○	○			○
イエロー(Y)		○				
ブルー(BI)		○			○	
オレンジ(O)		○	○	○		
バイオレット(V)		○			○	○
グリーン(Gr)		○				
ブラック(B)		○		○		
ホワイト(W)				○	○	
ダークレッドブラウン(DR-Br)			○	○		
オレンジブラウン(O-Br)			○	○	○	
カーキ(K)			○	○		
Aシェード(AS)		○	○	A1 A2 A3 A3.5 A4 rootA		
Bシェード(BS)		○	○	B1 B2 B3 B4 rootB		
Cシェード(CS)		○	○	C1 C2 C3 C4 rootC		
Dシェード(DS)		○	○	D2 D3 D4		
Rシェード(RS)		○	○	R1 R2 R3 R3.5 R4		

### ■エフェクトカラーセット(全16色※) カラーステインを中心にした特殊色のセット

色調(記号)	イメージ	使用例				
		シェード調整	歯頸部	汚れ	切端部	歯肉色
グレー(G)		○			○	
ブルーグレー(BI-G)					○	
コーンイエロー(CY)					○	
ブラウン(Br)			○	○		
ブラックブラウン(B-Br)			○	○		
マメロンピンク(MP)					○	
マメロンアイボリー(MIv)					○	
ローズピンク(RP)			○			○
ワインレッド(WR)			○			○
ピンクオレンジ(P-O)			○			○
F-Aシェード(F-AS)		○		A1 A2 A3 A3.5 A4 rootA		
F-Bシェード(F-Bs)		○		B1 B2 B3 B4 rootB		
F-Cシェード(F-CS)		○		C1 C2 C3 C4 rootC		
F-Dシェード(F-DS)		○		D2 D3 D4		
F-Rシェード(F-RS)		○		R1 R2 R3 R3.5 R4		

※印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

### ヴィンテージ アートの色調構成

#### ①基本色ステイン

基本的な色調調整や特徴づけを行うための基本色のグループです。特に、従来は発色が「くすみがち」であったピンクやオレンジ系統の色調の発色も明るく、バリエーションも豊富です。またホワイトは、塗布後の白さを焼成後も維持します。

#### ②カラーステイン

豊富な色調を持ち、煩雑な混色作業なく、細部にわたる様々なキャラクタライズに対応できるプレミックス色のグループです。

#### ③シェードステイン

セラミックス修復物用(シェードステイン)とセラミックスフレーム用(ファンデーションシェードステイン)の2系統で構成された歯冠全体の色調調整に使用するグループです。ファンデーションシェードステインは、シェードステインよりも暗く設計されています。

Carefully selected 32 colors  
based on ceramists' needs

## 2 同じステインで幅広い歯科用セラミックス材料に対応

ヴィンテージ アートは、金属焼付用陶材やアルミナ用陶材、ジルコニア用陶材といった熱膨張の異なる歯科用陶材に使用することができます。

また、歯科用セラミックスフレーム材(アルミナ、ジルコニア)およびプレス用セラミックスやCAD/CAM用ポーセレンブロック、既製陶歯などの歯科用セラミックス材料に幅広く使用することができます。



プレス成型後のクラウン



色調調整後



既製陶歯(人工歯)



形態修整および色調調整後

## 3 使いやすいペーストタイプ

微細な粒子をペースト化しており、非常に薄く、ムラなく塗布できます。色調を混ぜ合わせる際にも、色ムラの心配はありません。




## 4 天然歯の蛍光性を再現

ヴィンテージ アートには天然歯に近い蛍光性を付与しており、自然感あふれる発色性を有します。



自然光下\*

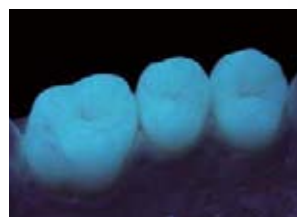

人工光線(紫外線)下\*

【焼成条件】	ケース	焼成方法	焼成開始温度	乾燥時間	昇温速度	最終焼成温度
	内部ステイン	大気焼成	600℃	5~7分	50~60℃/分	830~850℃
	外部ステイン	大気焼成	600℃	5~7分	50~60℃/分	850~870℃
	陶歯へのステイニング	大気焼成	600℃	5~7分	50~60℃/分	1,000℃(2分保留)

\*:写真提供 徳真会 ワールドラボU.S.A 尾形 暁信 先生  
\*\*:写真提供 Mr. Andreas Dücomy

Applicable for Various Dental Ceramic Materials  
Wide Variety of Colors & Shades (32 colors)  
Easy-to-use Paste type  
Fluorescence of natural dentition

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ヴィンテージアート	歯科セラミックス用着色材料	管理医療機器 医療機器認証番号 219AIBZX00110000

包装・価格



ベーシックカラーセット(全17色)

【セット内容】

- ・ペースト各3g: グレージングペースト、ピンク、イエロー、ブルー、オレンジ、バイオレット、グリーン、ブラック、ホワイト、ダークレッドブラウン、オレンジブラウン、カーキ、Aシェード、Bシェード、Cシェード、Dシェード、Rシェード
- ・希釈液50mL 1本
- ・カラーテーブル 1部



【単品販売】ペースト 3g 1本  
希釈液 50mL 1本



エフェクトカラーセット(全16色)

【セット内容】

- ・ペースト各3g: グレージングペースト、グレー、ブルーグレー、コーンイエロー、ブラウン、ブラックブラウン、マメロンピンク、マメロンアイボリー、ローズピンク、ワインレッド、ピンクオレンジ、ファンデーションAシェード、ファンデーションBシェード、ファンデーションCシェード、ファンデーションDシェード、ファンデーションRシェード
- ・希釈液50mL 1本
- ・カラーテーブル 1部

関連商品

種類	用途	
陶材用ナイロン筆No.2(ナイロン毛)	陶材作業	
陶材用ナイロン筆No.5(ナイロン毛)	陶材作業	
陶材用ナイロン筆No.7(ナイロン毛)	陶材作業	
陶材用筆No. A5(動物毛: コリンスキー)	陶材作業	
陶材用筆No. A7(動物毛: コリンスキー)	陶材作業	
陶材用筆No.10(動物毛)	陶材作業	



歯科金属焼付用陶材

ヴィンテージ ハロー



アルミナ用陶材

ヴィンテージ AL



ジルコニア用陶材

ヴィンテージ ZR

カタログに表示の価格は2008年2月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。