



歯科用陶材(ジルコニアフレーム用)  
**ヴァンテージ ZR**



ヴァンテージ ZR ユニレイヤーは、  
 一層築盛により歯冠色が再現できるジルコニア用陶材です。

- 天然歯に類似したオパール性を付与
- ヴァンテージ ZR オペークライナーおよび  
 ヴァンテージ アートとの組合せで簡単に色調の調整が行えます。



一層築盛で歯冠色を再現する  
 ユニレイヤー  
**Uni Layer 陶材**

ヴァンテージ ZR  
**ユニレイヤー**



使用例

- オペークライナー A30
- +
- ユニレイヤー LT
- +
- ステイニング

写真提供：熊木 康雄 先生(南バシヤデンタルラボラトリー)

【使用例】

1 フレームの調整

ヴァンテージ ZR  
 オペークライナーの場合



オペークライナーは各シェードの色調を使用します。  
 \*歯頸部はワンランク濃めに調整します。

ヴァンテージ アートの場合



任意のシェード先端部(又は咬合面)の色調に近いカラーのフレームを選択し、歯頸部から歯冠中央部にかけてヴァンテージアートファンデーションステイン等を用いて調整します。\*支台色調の透過具合も確認します。

2 ユニレイヤーの築盛

ヴァンテージ ZR ユニレイヤー



ユニレイヤーを用いて歯冠外形全体を築盛します。

3 ステイニング

ヴァンテージアート



焼成後、必要に応じてシェードの調整をヴァンテージアートシェードステインなどで行います。

4 完成



ステインワークの一例



咬合面への使用色調  
 O-Br(オレンジブラウン)  
 O(オレンジ)

フレーム隅角部への色調  
 G(グレー)、  
 BL-G(ブルーグレー)、  
 V(バイオレット)

■ 包装・価格

ヴァンテージ ZR ユニレイヤー

- 15g
- 50g

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ヴァンテージ ZR	歯科用陶材	管理医療機器 医療機器認証番号 21800BZZ10011000

このカタログに記載の価格は2014年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。  
 ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

**株式会社 松風**

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>