



レジン材料用着色材  
ライトアート

Official partner



Light-curing coloring pastes

# LITE ART



レジン系  
材料用

カチッと硬まる

キャラクタータライズ用ペースト

三原色  
(CMY)を  
採用



SHOFU INC.

Light-curing coloring pastes

# LITE ART

## ライトアート

高分子系歯冠用着色材料




ライトアートは内部ステイン法で使用する、  
レジン系材料用の色調調整材です。

ソリデックス ハードデュラ、セラマージュ デュオをはじめとする  
歯冠用硬質レジンの色調調整だけでなく、  
硬質レジン歯やアクリル系レジンなど、  
様々なレジン系材料の色調調整が可能です。

## 表面硬化性が向上し、色ムラ、にじみが大幅に減少

新規多官能モノマーと新規光重合触媒の採用により、光重合型レジン特有の表面未重合層を極力抑え、優れた表面硬化性を実現させました。内部ステイン法で薄く塗布した場合においても、追加築盛時の色ムラやにじみがほとんど起こりにくいため、仕上がり後の発色性がとても良好です。

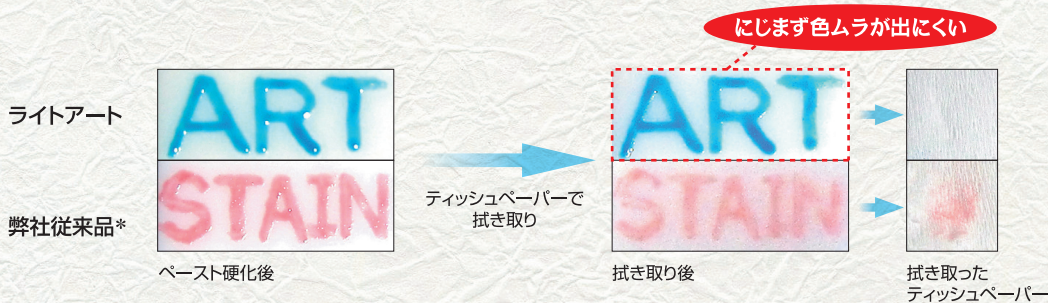

## 筆操作性に優れた低粘度ペースト

カラーペーストは低粘度のため、一度の塗布操作で薄く均一に伸ばすことができ、歯冠部のシェード調整などに便利です。さらに、低粘度でありながら非常に垂れにくいいため、塗布した部分に留まりやすく、白帯の付与などがスムーズに行えます。



### 新規筆を開発

フルセットに付属のユニブラシNo.5を使用することにより、より快適で細密なステインワークが可能になります。

#### 筆先の着色や劣化が起こっても、容易に取替えが可能

毛先の取替え可能なディスプレイ式を採用しました。

#### 筆先: 塗布中も筆先を細く維持

弊社従来品の筆に比べ、毛量を多く、毛先を短くしました。コシがしっかり残るため、塗布中も筆先の細さを維持できます。

#### 柄(筆桿): 長時間の作業でも疲れにくい設計

弊社従来品の筆よりも柄を長くし、筆の重量バランスを最適化しました。また、木製のため手になじみやすく、快適に作業が行えます。

毛量増加

ユニブラシNo.5

弊社従来筆

柄を長くし、重量バランスを最適化

UNI BRUSH 5

(実寸大)

## 様々なレジン系材料の色調調整が可能

ソリデックス ハーデュラ、セラマージュ デュオをはじめとする歯冠用硬質レジンの色調調整だけでなく、硬質レジン歯やアクリル系レジンなど、様々なレジン系材料の色調調整が可能です。

※硬質レジン歯、アクリル系レジン材料の色調調整を行う場合は、接着処理としてセラレジノンボンド(歯科レジン用接着材料)が必要です。

### 例 歯冠用硬質レジンの色調調整




裂溝部にブラウン系色のカラーペースト(写真はB-Br)を塗布。

塗布面を歯冠用硬質レジン  
の透明系色で被覆、以降は  
通法処理。

完成。

### 例 NCベラシア アンテリア(硬質レジン歯)の色調調整

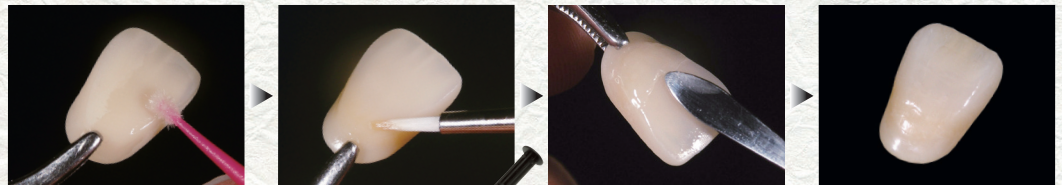

適用面を  
粗造化し、  
セラレジ  
ノンボンドで処理。

適用面にカラー  
ペースト(写真は  
Aシート)を  
塗布。

塗布面を歯冠用硬質レジン  
の透明系色で被覆、以降は  
通法処理。

完成。

## 豊富な色調バリエーション

弊社歯科セラミックス用着色材料「ヴィンテージ アート」に色調を準拠させ、その中でも使用頻度の高い色を厳選しました。また、色料の三原色であるシアン色、マゼンタ色、イエロー色をラインナップに加えました。低粘度で混ぜやすいペースト性状のため、混色による色調再現性が大幅に広がり、オリジナル色のカスタマイズも容易に行えます。



色料の三原色を  
歯科材料で初採用

●印刷物のため実物とは色調が異なる場合があります。

※色料の三原色(シアン色、マゼンタ色、イエロー色)は配合した割合と色彩感覚が一致するため、カラー印刷をはじめとする様々な分野で採用されています。

## 天然歯同様の蛍光性付与

天然歯に類似の蛍光性を付与しています。



ライトアート 弊社従来品\*

ライトアート 弊社従来品\*

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ライトアート	高分子系歯冠用着色材料	管理医療機器 医療機器認証番号 222AKBZX00011000

包装・価格



ライトアート フルセット  
一式

【セット内容】

カラーペースト1mL：15色

ホワイト、ブラック、レッド、Aシェード、Bシェード、カーキ、オレンジ、  
ブルーグレー、バイオレット、オレンジブラウン、ダークレッドブラウン、  
ブラックブラウン、シアン、マゼンタ、イエロー

クリアリキッド6mL：1本

ユニブラシ No.5：1セット(筆柄1、筆先10)

カラーテーブル：1部

ノズルチップ：15個

ノズルキャップ：15個

単品



カラーペースト  
1mL 1本



クリアリキッド  
6mL 1本



ユニブラシNo.5  
(筆柄1、筆先10)

関連製品

管理医療機器 認証番号  
228AFBZX00118000



歯冠用硬質レジン  
セラマージュ デュオ システム  
ベーシック Aセット  
セット

管理医療機器 認証番号  
224AKBZX00141000



歯冠用硬質レジン  
ソリデックス ハーシェル セット  
スタンダード  
セット

管理医療機器 認証番号  
224AKBZX00070000



歯科切削加工用レジン材料  
松風ブロック HC(5個入)  
単層 Sサイズ  
Mサイズ  
2レイヤー Sサイズ  
Mサイズ

管理医療機器 認証番号  
21400BZZ00188000



歯科レジン用接着材料  
歯科セラミックス用接着材料  
セラレジンボンド  
セット

管理医療機器 認証番号  
223AKBZX00235000



歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材  
レジングレイズ [ジェルセット]  
セット

管理医療機器 認証番号  
223AKBZX00235000



歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材  
レジングレイズ [リキッド]  
6mL

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店